

Guide utilisateur - DigiParkV5 - Patients - v4.1

Veillez lire attentivement l'intégralité du guide utilisateur avant d'utiliser DigiPark, un dispositif médical de classe I marqué CE selon le règlement MDR 2017/745.

Table des matières

Guide utilisateur – DigiParkV5 - Patients – v4.1	1
PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RÉGLEMENTAIRES	4
Mentions	4
Principales mesures de diminution de risque.....	5
Avis de non-responsabilité :	5
Avertissements	5
Symboles	7
Utilisation prévue.....	8
Indications	8
Description	8
Utilisateurs concernés.....	9
Patients concernés	9
Environnement prévu / paramètres d'utilisation	9
Contre-indications d'utilisation.....	9
Principe de fonctionnement et mode d'action.....	10
Principe de fonctionnement	10
Mode d'action	10
Pré-requis.....	10
Compatibilité.....	10
Contres-indications environnementales	11
Conformité	12
Instructions de fonctionnement.....	12
Première utilisation	12
Avant chaque utilisation	13
A chaque utilisation	13
Principales étapes	13
Support	13
Principaux messages d'erreur.....	14
Informations de contact	14
PARTIE II : FONCTIONNALITÉS DE DIGIPARK	16
Page d'accueil	17
Je suis réveillé(e) / Je suis couché(e)	18

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Mon pilulier	19
Mon ordonnance	19
Mes prises de médicaments.....	20
Mon historique de médicaments.....	21
Mes symptômes	22
Phonation	23
Tremblements	25
Mon journal des symptômes	26
Mes symptômes	32
Qualité de vie	33
Mes activités	35
Mes activités	35
Mon historique de suivi	36
Calendrier des rendez vous	37
Les vidéos d’Anthony	38
Mes exercices de rééducation (Offre Premium)	39
Mon rapport d’activités.....	45
Rapport d’activités en PDF (Offre Premium).....	47
Mes statistiques.....	47
Parky Assist (Offre Premium)	48
Menu	48
Langues	48
Consignes.....	50
Informations	50
Mentions	51
Consentement.....	51
Politique de confidentialité	52
Conditions Générales d’Utilisation.....	52
Guide utilisateur.....	52
Conditions Générales de Vente.....	53
Suppression du compte	53
Contact	54
Paramètres supplémentaires.....	54
DigiPark Premium	55
Version v4.1	56

Consignes de sécurité importantes



Veillez lire attentivement l'intégralité de ce guide utilisateur avant toute utilisation de DigiPark, dispositif médical de classe I, car elle contient des informations importantes.

Vous devez toujours utiliser le dispositif DigiPark en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice.

- Conservez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin ultérieurement.
- Pour toute assistance technique, vous pouvez nous contacter à tout moment via le support applicatif : support@diampark.io.

PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RÉGLEMENTAIRES

Mentions

- Nom du dispositif médical : DigiPark
- Version: v5
- Référence : DigiParkV5
- Nom du fabricant : DiamPark
- Adresse: 22 RUE GUILLEMINOT, 92370 CHAVILLE, France
- SIRET: 88379964500014
- UDI-DI: +G376DIGIPARKV50+
- Date de marquage classe I : 31/10/2022
- Le dispositif DigiPark est marqué CE de classe I selon le règlement MDR 2017/745 et à ce titre autorisé comme dispositif médical.

À propos de ce guide utilisateur

Les instructions d'utilisation (IFU) font partie intégrante du dispositif médical DigiPark. Il détaille les informations générales et réglementaires et son utilisation.

Note : Les captures d'écran présentées dans l'IFU ne sont que des exemples, elles ne sont pas exhaustives et peuvent différer légèrement des vues disponibles dans l'interface utilisateur.



La version électronique du mode d'emploi est disponible en ligne sur le site web de DiamPark <https://diampark.io/e-ifu> ainsi que sur l'application DigiPark. Elles doivent être lues. Vous pourrez également trouver toutes les versions précédentes de nos produits et services. Les versions électroniques du manuel d'utilisation peuvent être lues au format .pdf et téléchargées via Adobe Reader. Une version imprimée peut être demandée en version papier, cela sans frais supplémentaires, en envoyant simplement un e-mail à support@diampark.io avec votre adresse complète (réponse sous 7 jours ouvrés).

Public visé : Cet IFU est destiné aux patients qui utilisent DigiPark.

Principaux risques identifiés pour l'utilisation

Les principaux risques identifiés sont liés à la saisie et à la réception des données, ce qui peut avoir pour conséquence :

- Des données inexactes ou manquantes enregistrées, ce qui pourrait conduire à des rapports médicaux incorrects ou incomplets.
- Des données des utilisateurs qui ne soient pas stockées ou récupérées pour analyse, pouvant ainsi entraîner des rapports médicaux incomplets ou inexacts.
- Une évaluation incorrecte des tremblements et de la capacité d'articulation de l'utilisateur pouvant ainsi entraîner des rapports médicaux incomplets ou inexacts.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Principales mesures de diminution de risque

Pour modérer ces risques, plusieurs mesures ont été mises en place :

Si quelque chose vous semble anormal, nous vous encourageons à consulter notre équipe support support@diampark.io (veuillez-vous référer au paragraphe « Informations de contact »).

Nous avons également prévu une page dédiée contenant les instructions détaillées pour l'évaluation afin de guider au mieux les utilisateurs.

De plus, des tests sont régulièrement effectués en interne pour s'assurer du bon fonctionnement de l'application.

Avis de non-responsabilité :

DigiPark ne permet pas de diagnostiquer la maladie ni de recommander des traitements. DigiPark n'est pas un outil de diagnostic, thérapeutique, d'aide au diagnostic ou thérapeutique. DigiPark n'est pas un système d'urgence. En cas de problème d'ordre médical, vous devez contacter votre professionnel de santé ou le SAMU. DigiPark Premium inclut une messagerie avec un professionnel de santé. La messagerie vise à fournir des informations pratiques et des orientations générales basées sur les informations que vous fournissez et ne constitue pas, ni ne remplace, une consultation médicale. Nous vous encourageons vivement à consulter votre médecin ou un autre professionnel de santé qualifié pour toute question ou problème de santé spécifique, notamment pour toute évaluation approfondie, surveillance, diagnostic ou traitement.

Avertissements



Avertissement relatif à la cybersécurité

- Veuillez toujours à n'ouvrir que des sites web via une connexion SSL/TLS sécurisée. Dans ce cas, l'adresse internet commence par "https". Les connexions qui commencent uniquement par "http" présentent un risque pour la sécurité.
- Assurez-vous d'utiliser la dernière version de votre navigateur web et mettez régulièrement à jour votre système d'exploitation.
- Gardez vos mots de passe à jour. Utilisez un mot de passe distinct pour chaque application et n'utilisez pas les mots de passe précédents.
- Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les courriels provenant d'expéditeurs inconnus, car ils pourraient vous diriger vers un site web contenant des logiciels malveillants.



Avertissement concernant les effets secondaires

- Si vous remarquez des effets secondaires ou des réactions indésirables lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez de l'utiliser et contactez votre médecin.
- Si vous remarquez un changement notable dans les performances de notre appareil, contactez DiamPark.
- Tout incident grave lié à l'appareil doit être signalé à DiamPark et à l'autorité compétente du lieu où se trouve l'utilisateur (veuillez vous référer au paragraphe « Comment signaler un incident ? »)

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

 *Avertissement concernant l'utilisation*









DigiPark est destiné à être utilisé à domicile, et ne doit pas être utilisé en marchant ou en conduisant ou dans un environnement bruyant. Vous assumez l'entière responsabilité et les risques liés au non-respect de ces instructions. Utilisez DigiPark dans des conditions appropriées (veuillez vous référer au paragraphe « Environnement prévu »).

 *Avertissement concernant les données personnelles*

Le traitement des données personnelles relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans (Chapitre II - Article 7 - Règlement (UE) 2016/679). Si l'utilisateur est âgé de moins de 18 ans, il doit lire attentivement tous les documents d'information avec son parent ou tuteur afin de s'assurer que l'utilisateur et le parent ou tuteur les comprennent.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être visibles sur/au sein du dispositif ou dans la documentation :

Symbole / Texte	Signification
	Les instructions d'utilisation doivent être lues et sont disponibles sous forme électronique (e -IFU).
	Se référer au manuel utilisateur
	Nom et adresse du fabricant
	Date de fabrication
	Avertissement
	Identifiant unique de l'appareil (UDI)
	Marquage CE
	Dispositif médical

Utilisation prévue

Indications

DigiPark est un dispositif médical numérique conçu pour accompagner les patients atteints de la maladie de Parkinson, et destiné à collecter, analyser et aicher des données de santé et de la vie réelle.

Elle permet aux patients de gérer de façon holistique leur état de santé et qualité de vie par le biais d'un suivi continu de données de santé et de la vie réelle.

Description

En particulier, DigiPark vise à suivre et mesurer l'intensité des symptômes et leur qualité de vie, de faciliter le suivi des prises de médicaments, la gestion de leurs rendez-vous médicaux, de suivre leurs ateliers sportifs et de remises en forme, et propose des exercices de phonation, d'articulation et de motricité adaptés.

L'application est organisée autour des fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalités "Compagnon" :

Menu pilulier : Pilulier pour mieux gérer la prise des médicaments, en déclenchant des rappels des horaires de prise des médicaments prescrits. Il offre des options pour consulter leur ordonnance, enregistrer les prises de médicaments, et visualiser l'historique. Enregistrement des périodes de sommeil et d'éveil et des activités quotidiennes.

Menu symptômes : Mesure de l'intensité des tremblements à partir de données recueillies par une smartwatch ou un smartphone, et de l'intensité de la dysarthrie à partir de données recueillies par un smartphone. Il offre la possibilité de tenir un journal quotidien des symptômes ainsi que d'évaluer et d'améliorer leur qualité de vie liée à la maladie de Parkinson en remplissant le questionnaire DPQ-8.

Menu Activités : Exercices pour travailler l'articulation et la motricité, à pratiquer chez soi, ainsi qu'un suivi des activités et des rendez-vous médicaux. Il permet aussi de déclarer d'autres activités et des rendez-vous médicaux. Exercices de rééducation permettant aux patients d'exercer leur motricité manuelle et leurs capacités d'élocution et de langage (exercices d'orthophonie).

La solution offre la possibilité de télécharger un **rapport d'activités** et partageable pour le patient.

Bénéfices

Le dispositif médical Digipark vise à suivre et mesurer l'intensité des symptômes et leur qualité de vie, de faciliter le suivi des prises de médicaments, la gestion de leurs rendez-vous médicaux, de suivre

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

leurs ateliers sportifs et de remise en forme, et propose des exercices de phonation, d'articulation et de motricité adaptés.

Utilisateurs concernés

DigiPark est conçu pour les patients adultes atteints de la maladie de Parkinson.

Patients concernés

- Patient adulte âgé de 18 ans à 65 ans
- Diagnostic : Patients diagnostiqués avec la maladie de Parkinson par un professionnel de santé qualifié.
- Culture numérique : Patients capables d'utiliser un smartphone et un dispositif portable.

Environnement prévu / paramètres d'utilisation

DigiPark est conçu pour être utilisé à **domicile** : les patients peuvent utiliser DigiPark dans le confort de leur domicile, ce qui facilite le suivi quotidien de leurs symptômes et de leur traitement médicamenteux.

Sensibilité au bruit : la fonction de suivi des symptômes de DigiPark repose sur la saisie de l'utilisateur ; il est donc préférable de l'utiliser dans des environnements calmes pour garantir un enregistrement précis des symptômes. Les bruits extérieurs peuvent distraire le patient ou l'empêcher d'interagir de manière optimale avec l'application.

Restrictions de mouvement : certaines fonctionnalités, telles que l'observance thérapeutique, peuvent être utilisées de manière universelle. Toutefois, le suivi des symptômes ou les exercices de rééducation ne doivent pas être effectués lors de certaines activités comme la conduite, car cela peut compromettre la sécurité de l'utilisateur.

Contre-indications d'utilisation

État de la maladie de Parkinson :

- Patients dont le diagnostic de la maladie de Parkinson n'a pas été confirmé par un neurologue.

Capacités cognitives et physiques :

- Patients présentant des troubles cognitifs importants qui les empêchent de comprendre le logiciel DigiPark ou d'interagir avec lui.
- Patients présentant des déficiences visuelles qui rendent les interactions à l'écran difficiles ou des allergies connues aux matériaux contenus dans le dispositif portable qui pourraient entraîner des réactions cutanées.

Affections cutanées :

- Patients souffrant de problèmes cutanés spécifiques qu'un contact prolongé avec les matériaux du produit portable pourrait exacerber.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Sensibilité électromagnétique :

- Patients connus pour leur sensibilité ou leurs réactions indésirables aux champs électromagnétiques, compte tenu de la nature électronique du produit portable.

Principe de fonctionnement et mode d'action

Principe de fonctionnement

Digipark est composé de :

- **L'application mobile**
- **Serveur**
- **Documentation** comprenant les instructions d'utilisation, les documents juridiques et consentements digitalisés

Digipark peut être utilisé en combinaison avec un **une montre connectée** (smartwatch).

Mode d'action

	Étape d'utilisation	Type d'action
1	Installation de l'application et authentification du patient	Action réalisée par le patient
2	Enregistrement de son ordonnance et chaque prise médicamenteuse Déclaration, mesure de ses symptômes et évaluation de leurs intensités Gestion de ses rendez-vous Déclaration de ses ateliers sportifs et de remise en forme	Action réalisée par le patient
3	Réalisation des exercices de motricité et de langage	Action réalisée par le patient
4	Téléchargement et partage du rapport des données du patient	Action réalisée par le patient

Pré-requis

Compatibilité

Caractéristiques du réseau informatique

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

- Conditions minimales : connexion internet avec une latence inférieure à 150 ms et une bande passante supérieure à 100 kbps
- Recommandations : connexion internet avec une latence inférieure à 50ms et une bande passante supérieure à 1 Mbps
- Pare-feu (firewall) activé : domaines digipark.fr et diampark.io sur le port 443

Pour information : toutes les communications entre les applications / serveurs de DiamPark sont sécurisées en SSL/TLS port 443

Systeme d'exploitation (OS)

- Sur Android : OS version 7.0 ou supérieure.
- Sur iOS : OS version 14 ou supérieure.

Les systèmes d'exploitation suivants ne sont pas compatibles : Windows phone mobile et Blackberry OS.

Appareils mobiles

Tous les appareils suivants sont compatibles : tous les smartphones qui supportent le BLE (Bluetooth Low Energy), avec une connectivité internet, un système d'exploitation compatible, avec une puissance de traitement et de mémoire suffisante.

Malheureusement, les appareils suivants ne peuvent pas être utilisés : ordinateurs, tablettes, téléviseurs intelligents, consoles de jeux, lecteurs de musique portables.

Produit portable en combinaison avec le dispositif médical

Modèle Smartwatch disponible sur le Store.

Qualifications & formation

Bien qu'aucune formation spécialisée ne soit exigée, les utilisateurs doivent être familiarisés avec le fonctionnement de base des appareils numériques et la navigation dans les applications.

Les patients diagnostiqués avec la maladie de Parkinson doivent posséder des connaissances de base dans l'utilisation des smartphones et des dispositifs portables

Contres-indications environnementales


- Températures ou taux d'humidité extrêmes en dehors de la plage recommandée pour les smartphones et les appareils portables ou les montres connectées, susceptibles d'affecter les performances ou la durée de vie des capteurs de mouvement.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

- Utilisation du dispositif pour réaliser les tests de tremblement dans des environnements en mouvement, par exemple à l'intérieur d'un véhicule en mouvement.
- Utilisation du dispositif pour réaliser les tests de phonation dans des environnements bruyants ou perturbateurs.

Conformité

 Le dispositif DigiPark est marqué CE de classe I selon le MDR 2017/745 et à ce titre autorisé comme dispositif médical.

DiamPark se conforme aux exigences des réglementations et normes applicables. En tant que fabricant de dispositifs médicaux, nous respectons et appliquons des normes très strictes dans le cadre de nos activités, depuis la conception et le développement jusqu'à la livraison de nos produits et services.

Nous garantissons également la sécurité de vos données, en conformité avec les lois et réglementations françaises et européennes. Nous sommes en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD), afin de garantir aux patients et aux professionnels de santé de conserver et d'exercer tous leurs droits sur les données personnelles. Toutes les données sont stockées au sein d'un HDS agréé avec un accès sécurisé.

Instructions de fonctionnement

Première utilisation

Authentification utilisateurs patients Téléchargement de l'application : commencez par télécharger l'application DigiPark sur votre appareil mobile. Elle peut être téléchargée directement sur le Store.

Processus de connexion et d'inscription : si vous êtes un nouvel utilisateur, cliquez sur "Créer un nouveau compte". Entrez votre adresse email et choisissez un mot de passe sécurisé. Suivez les instructions à l'écran pour compléter le processus d'inscription.

Note : Nous utilisons le système d'authentification Auth0, un système robuste et sécurisé pour l'authentification des utilisateurs sur l'application DigiPark. Auth0 aide à assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à leur compte et aux fonctionnalités associées.

Étapes de Vérification

Activation du compte : Après avoir soumis vos informations, vous recevrez un email de confirmation à l'adresse que vous avez fournie. Cliquez sur le lien dans ce mail pour vérifier votre compte et activer votre accès à l'application. Cette étape de vérification est cruciale pour assurer la sécurité de votre compte et pour vérifier que l'adresse email que vous avez fourni est valide et vous appartient.

Récolte des consentements et documents nécessaires à l'utilisation du compte : avant le démarrage de l'utilisation de l'application, il est nécessaire que l'utilisateur accepte les Conditions

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Générales d'Utilisation, la politique de confidentialité et les consentements. Un refus sur l'un de documents obligatoires bloque l'accès à la solution DigiPark.

L'exercice des droits utilisateurs et retrait des consentements est possible à posteriori au sein de l'application. A noter qu'un retrait d'un consentement obligatoire / document obligatoire engendre une déconnexion de l'utilisateur, ce dernier devra à nouveau donner ses consentements s'il souhaite utiliser de nouveau DigiPark.

Avant chaque utilisation

Avant chaque utilisation de DigiPark, vérifiez les informations suivantes :

- Vérifiez que vous avez téléchargé la dernière version de l'application sur votre (vos) smartphones/montres compatibles.
- Vérifiez que vous pouvez accéder à votre compte avec votre login et votre mot de passe
- Vérifiez que le matériel est suffisamment chargé : smartphone(s)/montres connectées
- Vérifiez que l'environnement est calme, et permet d'avoir une bonne connexion Wi-Fi et qu'il n'y a pas d'interférence Bluetooth.

A chaque utilisation

Processus de Connexion :

- Si vous avez déjà un compte, cliquez sur "Connexion" et entrez votre adresse email et votre mot de passe pour accéder à votre compte.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, suivez les instructions pour le réinitialiser

Principales étapes

	Paragraphe du manuel utilisateur
Processus de connexion, d'inscription, d'activation du compte et collecte des consentements et documents nécessaires	Instructions de fonctionnement
Gestion des médicaments et rappels des prises	Pilulier
Évaluation des symptômes	Symptômes
Exercices de rééducations et suivi des activités	Activités
Visualiser l'évolution des symptômes et des activités et partager son rapport	Menu

Support

Vous pouvez nous contacter si vous avez des informations ou des feedbacks sur l'application à nous partager, en nous écrivant dans la section "Contact" du menu, ou directement à l'adresse mail : support@diampark.io

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion, de l'inscription ou de l'utilisation de l'application DigiPark, nous sommes là pour vous aider à l'adresse support@diampark.io. Lorsque vous nous contactez pour un problème technique, plusieurs informations doivent nous être communiquées afin de pouvoir résoudre votre problème le plus rapidement possible :

- Le nom / marque du dispositif
- Le modèle de votre tablette/téléphone/montre
- La version de votre tablette/téléphone
- La version de l'application mobile (depuis le playstore ou sur votre tablette/téléphone)
- Comment reproduire le problème

Joignez des captures d'écran, des photos ou des vidéos si possible.

Décrivez le problème de manière très précise, n'hésitez pas à agrémenter votre message de captures d'écran afin que nous puissions mieux visualiser la situation.

Digipark est une jeune start-up qui accompagne les patients atteints de la maladie de Parkinson. Nous comptons sur vous pour nous signaler tout dysfonctionnement. C'est ensemble que nous lutterons contre Parkinson.

Principaux messages d'erreur

Titre	Message d'erreur / Ce que vous voyez	Cause racine / Qu'est- ce qui est en cause ?	Comment résoudre ce problème ?
Exemple : Connexion non valide avec l'application	Email or password invalid	Format invalide pour l'email et/ou le mot de passe. L'email ne correspond pas au mot de passe. Le mot de passe ne correspond pas à l'email. Il y a un espace avant et/ou après l'email. Utilisateur inexistant	Essayez de réécrire votre email et/ou votre mot de passe en vous assurant qu'ils sont dans le bon format, sans fautes d'orthographe Contactez support@diampark.io pour créer un nouvel accès.

Informations de contact

Comment exercer vos droits ?

Pour toute question relative au traitement des données par l'entreprise responsable de l'expérience, veuillez contacter le Délégué de Protection des Données de DiamPark via l'adresse mail : rgpd@diampark.io.

Pour toute question, demande ou déclaration concernant vos données personnelles, veuillez-vous

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

référer à la politique de confidentialité de DiamPark. Elle est disponible en ligne sur l'application DigiPark. Si vous souhaitez exercer tout ou partie de vos droits utilisateurs veuillez contacter le Délégué de Protection des Données via l'adresse mail : rgpd@diampark.io ou à l'adresse postale du Délégué de Protection des Données :

DiamPark

A l'attention du Délégué de Protection des Données

22, rue Guillemillot,
92370 CHAVILLE,
France

Comment signaler un incident ?

MATERIAL SAFETY : LA SÉCURITÉ DU MATÉRIEL : Tout incident ou risque d'incident grave (défini selon l'article L5212-2 du Code de la Santé Publique) détecté lors de l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant à l'adresse électronique suivante : support@diampark.io


Vous devez déclarer tout événement à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel vous êtes établi :

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_vigilance_contact_points.pdf

Comment contacter le fabricant ?

DiamPark peut être contacté aux coordonnées indiquées ci-dessous :

	<p>DIAMPARK 22 RUE GUILLEMINOT, 92370 CHAVILLE, FRANCE E-mail : support@diampark.io Site internet : https://diampark.io/</p>
---	---

	<p>Date d'obtention du marquage CE : 2022-10-31</p>
---	---

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark


PARTIE II : FONCTIONNALITÉS DE DIGIPARK

La deuxième partie de ce guide d'utilisation vis à vous familiariser avec les fonctionnalités de l'application Digipark.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Page d'accueil

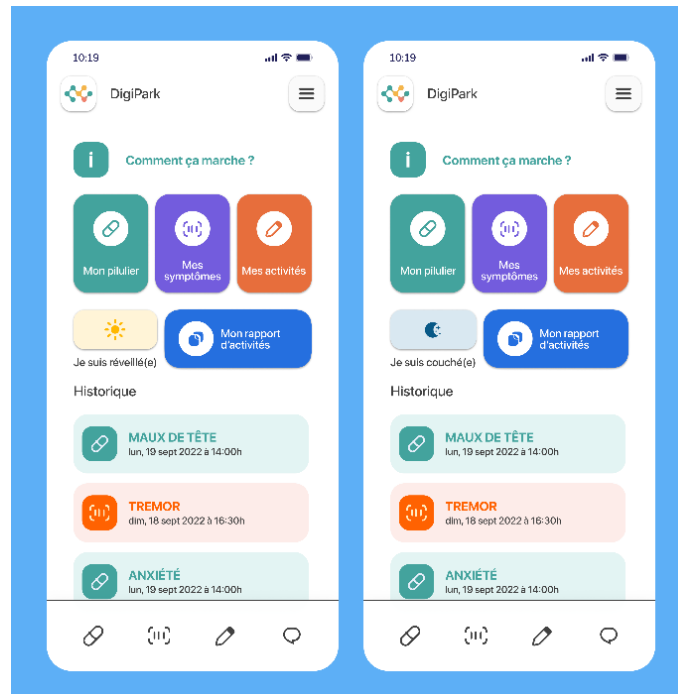

Cette page d'accueil centrale présente de manière claire et intuitive les principales fonctionnalités de l'application, chacune accessible via un bouton distinct aligné horizontalement.

Le patient retrouve des accès rapides aux fonctionnalités suivantes directement depuis son tableau de bord principal :

- **Pilulier** : pour la gestion des médicaments et rappels de prises,
- **Symptômes** : pour le suivi des symptômes de la maladie
- **Activités** : pour les exercices thérapeutiques et le suivi des activités

En dessous,

- **Je suis réveillé(e)/Je suis couché(e)**
- **Rapport d'activités** : pour télécharger facilement les informations et suivi de santé et les partager avec votre professionnel de santé, vos proches et aidants, ainsi que pour consulter vos statistiques pour visualiser l'évolution des symptômes et de vos activités au fil du temps.

La section "**Historique**" récapitule les actions récentes liées aux activités et aux symptômes pour un suivi rapide.

En bas de l'écran, une barre de navigation permet d'accéder rapidement aux quatre fonctionnalités principales, représentées par des icônes :

- Pilulier

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark


- Symptômes
- Activités
- Parky assist

Je suis réveillé(e) / Je suis couché(e)

Lorsque vous vous levez, appuyez sur le bouton « Je suis réveillé(e) ». L'écran indiquera « Je suis réveillé(e) ».

Lorsque vous vous couchez, appuyez sur le bouton « Je suis couché(e) ». L'écran indiquera « Je suis couché(e) ».

Mon pilulier

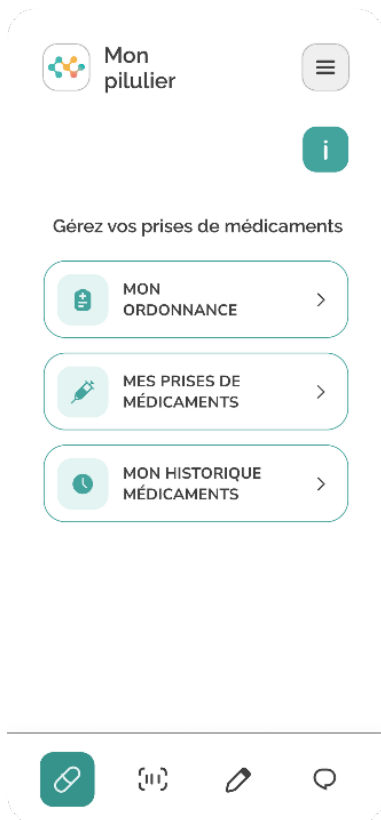

Cette fonction vous permet d'enregistrer précisément vos prises de médicaments, vos heures de lever et de coucher.


Mon ordonnance

Saisissez les médicaments figurant sur votre ordonnance, en indiquant le nombre de comprimés et les horaires de prise.

1. Rendez-vous dans l'onglet « Mon ordonnance ».
2. Cliquez sur « Ajouter un médicament ».
3. Entrez le nom du médicament.
4. Sélectionnez dans la liste le médicament correspondant et validez.
5. Indiquez la fréquence de vos prises par jour, fréquence régulière ou ponctuelle (médicament à la demande).
6. Indiquez le nombre de pilules par prise.
7. Ajustez les heures de prises et validez.
8. Répétez l'opération pour vos autres médicaments. Ils sont aichés dans la partie « Mes prises de médicaments ».

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

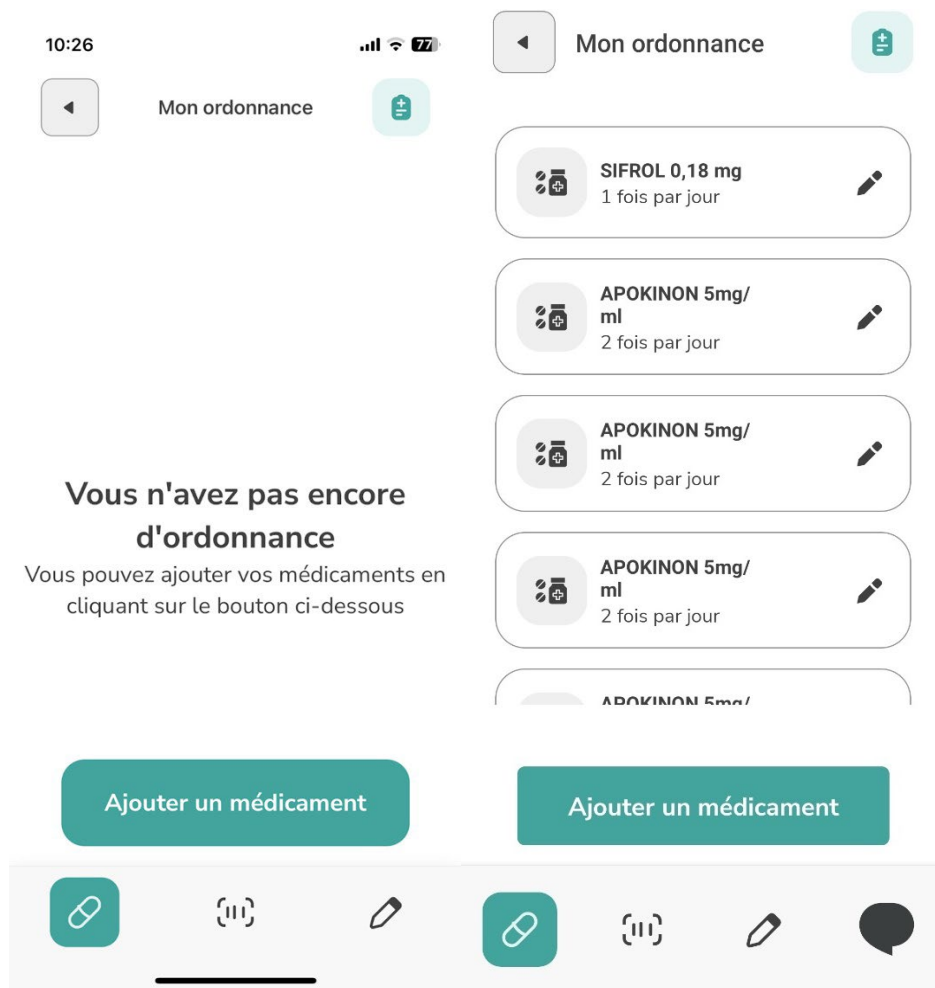

Mes prises de médicaments

DigiPark vous envoie des rappels de prise de médicaments et vous pouvez consulter les prises à venir ou modifier les horaires de prise.

À chaque prise de médicament, rendez-vous dans l'onglet pilulier, et cliquez sur le bouton « Prises de médicaments ».


- Si le médicament a été pris à l'heure, appuyer sur le bouton correspondant.
- Si le médicament a été pris en retard, cliquez sur le bouton correspondant et changez l'heure.

Chaque prise est enregistrée dans l'historique.

Vous avez la possibilité de modifier chaque prise.

Copyright © 2023 DigiPark


Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

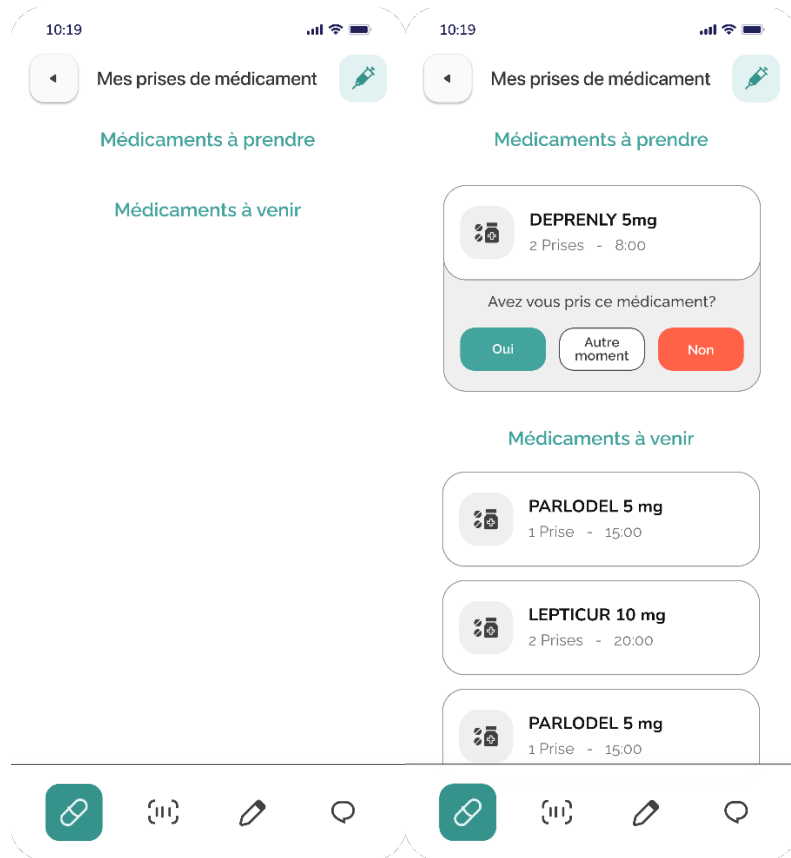

Mon historique de médicaments


Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

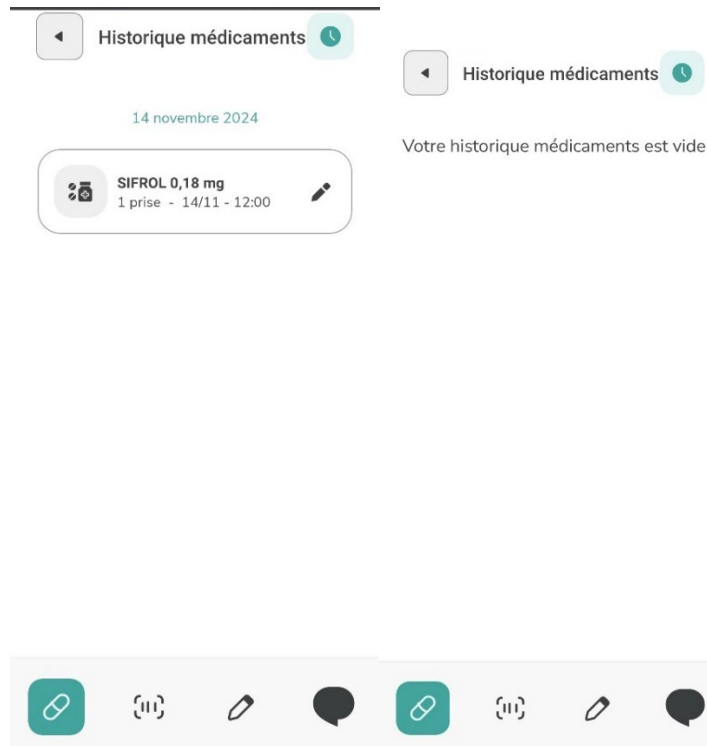

L'historique de médicaments vous permet de revoir vos prises de médicaments quotidiennes, pour chaque médicament, ainsi que le nombre de pilules et l'heure de prise.

Mes symptômes

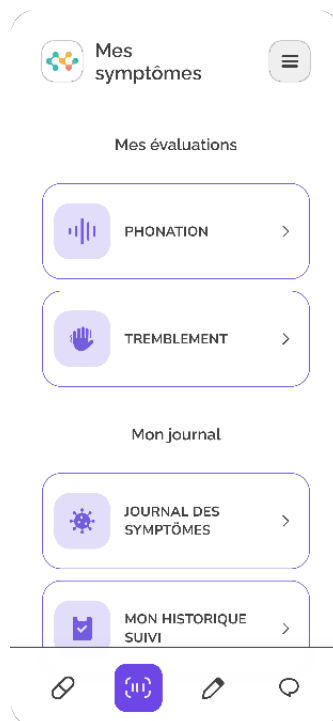


Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Phonation

Le test de phonation permet d'évaluer la stabilité de votre voix en quelques secondes. Lorsque l'enregistrement commence, prononcer la syllabe "aaa", pendant le temps de la mesure, de la manière la plus stable possible. Veillez à réaliser cette mesure dans un lieu calme afin de ne pas fausser le résultat. Si vous réalisez ce test en ayant des symptômes forts, veuillez les ajouter à votre suivi grâce à la fonctionnalité "Mes symptômes".

Comment ça marche

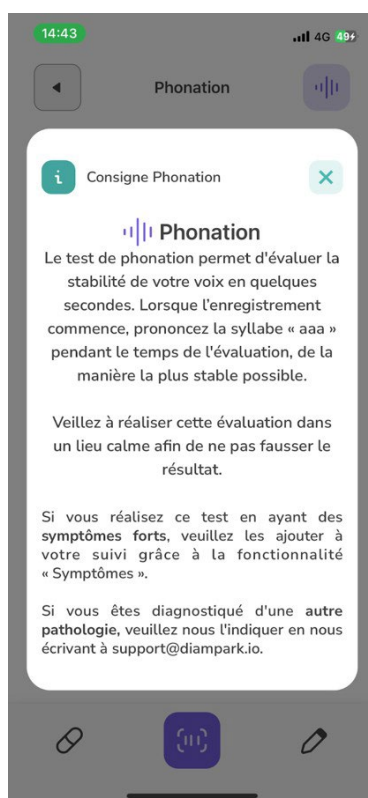


Comment ça marche ?

Rendez-vous dans l'onglet Mes symptômes :

1. Cliquez sur le bouton « Phonation ».
2. Cliquez sur « Commencer ».
3. Indiquez votre niveau ressenti du moment.
4. Dites « AAA » au moment où l'écran affiche « début de l'enregistrement ».

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

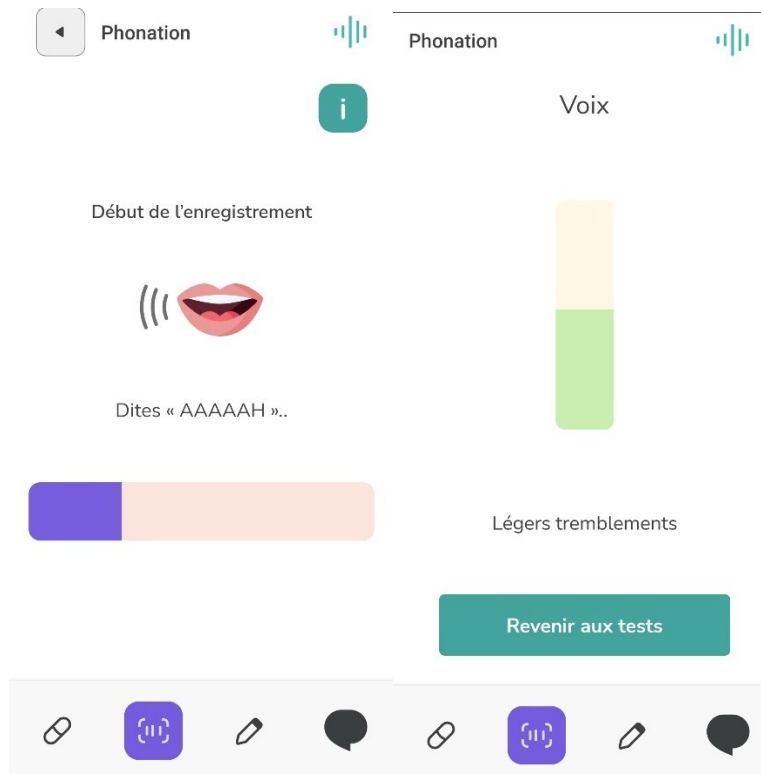

Avertissement:

Il est possible que des données inexactes ou manquantes soient enregistrées, ce qui pourrait conduire à des rapports médicaux incorrects ou incomplets. Bien que des tests soient régulièrement effectués dans l'application pour modérer ce risque, nous sommes conscients qu'aucun système n'est infaillible. Si vous, en tant que patient, estimez qu'une fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu ou que vous constatez des erreurs dans vos données, n'hésitez pas à nous écrire à support@diampark.io pour nous en informer. Votre feedback est essentiel pour nous permettre d'améliorer continuellement l'application.

Tremblements

Ce test vise à évaluer les tremblements au niveau des bras, en utilisant les capteurs du téléphone. Lorsque l'on vous l'indique, prenez votre téléphone dans votre main gauche et tendez le bras jusqu'à ce que la jauge soit pleine. Une fois la mesure prise, répétez l'opération avec votre bras droit.

Veillez à réaliser cette mesure dans un lieu stable afin de ne pas fausser le résultat. Si vous réalisez ce test en ayant des symptômes forts, veuillez les ajouter à votre suivi grâce à la fonctionnalité "symptômes".


L'outil Tremblement permet d'évaluer l'importance des tremblements de chacune de vos mains en quelques secondes.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Comment ça marche?

1. Rendez-vous dans l'onglet symptômes et appuyez sur le bouton « Tremblement ».
2. Cliquez sur « Commencer ».
3. Indiquez votre niveau ressenti du moment.
4. Prenez votre téléphone dans votre main gauche et tendez le bras.
5. L'application enregistre les tremblements.
6. Au signal, changez de bras et répétez l'opération.
7. L'application vous donne une information sur l'intensité de vos tremblements.

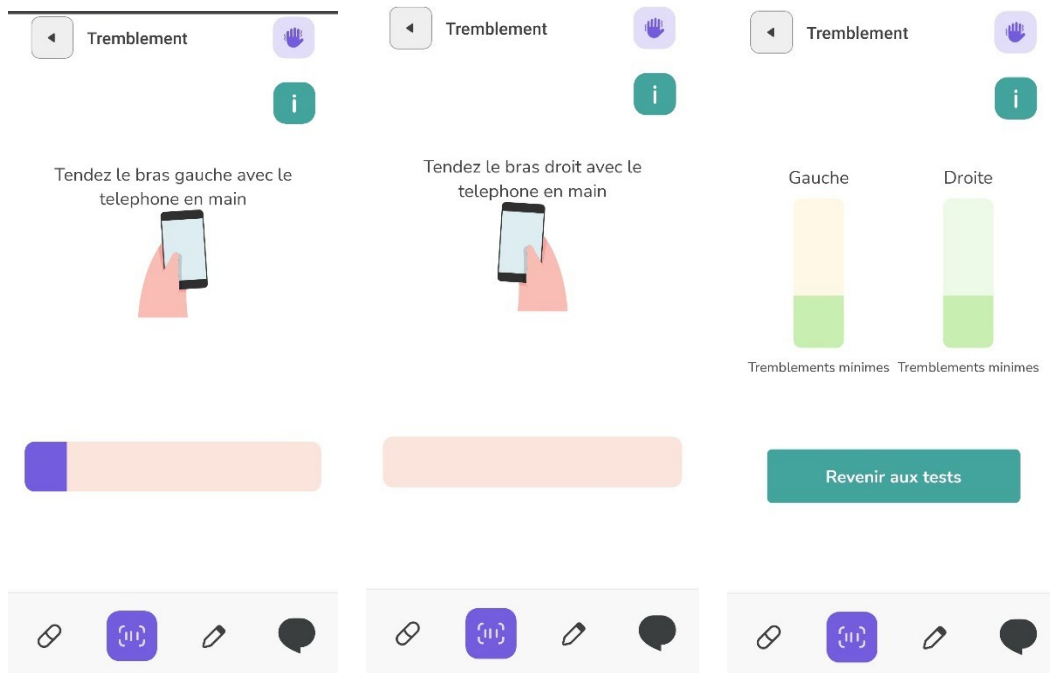

Avertissement:


Il est possible que des données inexactes ou manquantes soient enregistrées, ce qui pourrait conduire à des rapports médicaux incorrects ou incomplets. Bien que des tests soient régulièrement effectués dans l'application pour modérer ce risque, nous sommes conscients qu'aucun système n'est infallible. Si vous, en tant que patient, estimez qu'une fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu ou que vous constatez des erreurs dans vos données, n'hésitez pas à nous écrire à support@diampark.io pour nous en informer. Votre feedback est essentiel pour permettre d'améliorer en continue l'application.

Mon journal des symptômes

DigiPark permet de recueillir des données afin de mieux connaître la maladie pour pouvoir mieux la combattre. L'un des aspects essentiels de notre application réside dans la gestion de l'évolution des symptômes des patients. Pour ce faire, l'appareil enregistre les données pertinentes et rend compte de la progression des symptômes au fil du temps, offrant ainsi une vision détaillée de la santé neurologique des patients.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

◀ Journal des symptômes 

Quel symptôme avez-vous ressenti ?


Tremblements

Mes derniers symptômes

Tremblements

Mouvements involontaires
(dyskinésies)

Liste de tous les symptômes

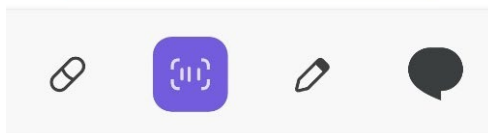

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Il est possible de déclarer d'autres symptômes au besoin, issus de l'échelle UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) servant de mesure pour quantifier la progression de la maladie de Parkinson. Elle est composite et est en réalité organisée en six sections utilisables séparément.

<i>Catégorie</i>	<i>Symptôme</i>	<i>Description</i>
Expérience non motrice de la vie quotidienne	Troubles cognitifs : Ralentissement cognitif, altération du raisonnement, perte de mémoire, déficit de l'attention et de l'orientation	Avez vous eu des problèmes pour vous rappeler des choses, pour suivre une conversation, pour fixer votre attention, pour avoir des pensées claires ou pour trouver votre chemin dans la maison ou en ville ?
	Hallucinations et psychose	Avez vous vu, entendu, senti ou ressenti des choses qui n'existaient pas réellement ?
	Humeur dépressive	Vous êtes-vous senti(e) sans ressort, triste, désespéré(e) ou incapable d'apprécier les choses ? Si oui, ce sentiment durait-il plus d'un jour à la fois ? Rendait-il difficile pour vous le fait de mener vos activités habituelles et d'être avec les autres ?
	État anxieux	Vous êtes-vous senti(e) nerveux, inquiet ou tendu(e) ? Si oui, ce sentiment durait-il plus d'un jour à la fois ? Est ce que cela a constitué pour vous une difficulté pour suivre vos activités habituelles ou pour être avec d'autres personnes ?
	Apathie (indifférence)	Vous êtes vous senti(e) indifférent à faire des activités ou à être avec des gens ?
	Signes de syndrome de dysrégulation dopaminergique	Avez-vous ressenti(e) des fortes pulsions inhabituelles que vous avez eu du mal à contrôler ? Vous sentez-vous poussé(e) à faire ou à penser à des choses et éprouvez-vous de la difficulté à les arrêter ?
	Problèmes de sommeil	Avez-vous rencontré des problèmes pour vous endormir la nuit ou pour rester endormi pendant la nuit ? Prenez en compte la façon dont vous vous êtes senti(e) reposé(e) après vous être réveillé(e) ?
Somnolence	Avez-vous rencontré des problèmes pour rester éveillé(e) pendant la journée ?	

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Expérience non motrice de la vie quotidienne	Douleurs, crampes, fourmillement, courbatures	Avez-vous eu des sensations inconfortables dans votre corps telles que des douleurs, courbatures, fourmillements ou crampes ?
	Problèmes urinaires	Avez-vous eu des difficultés à contrôler vos urines ? Par exemple, besoin urgent d'uriner, besoin d'uriner trop souvent ou accidents urinaires.
	Problèmes de constipation	Avez-vous eu des problèmes de constipation entraînant des difficultés pour aller à la selle ?
	Sensation de vertiges, tête vide, évanouissement au lever	Avez-vous eu une sensation d'évanouissement, de vertige, de brouillard lorsque vous vous levez d'une position assise ou couchée ?
Expérience non motrice de la vie quotidienne	Fatigue	Vous êtes-vous senti(e) inhabituellement fatigué(e) ? Ce sentiment ne fait pas partie du fait d'avoir sommeil ou d'être triste

<i>Catégorie</i>	<i>Symptôme</i>	<i>Description</i>
Aspects moteurs des expériences de la vie quotidienne	Trouble de la parole et de l'élocution	Avez-vous eu des problèmes avec votre élocution ?
	Salivation et le fait de baver	Avez-vous eu trop de salives pendant que vous étiez éveillé(e) ou quand vous dormiez ?
	Mastication et troubles de la déglutition	Avez-vous eu habituellement des problèmes en avalant des comprimés ou en prenant votre repas ? Avez-vous eu besoin de couper ou d'écraser vos comprimés, ou que vos repas soient écrasés, hachés ou mixés pour éviter de vous étouffer ?
	Difficultés à s'alimenter	Au cours de la semaine précédente, avez-vous habituellement eu des problèmes à manipuler votre nourriture et à utiliser des couverts ? Par exemple, avez-vous eu des problèmes à manger des aliments qu'on mange avec les doigts ou à utiliser des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des baguettes ?
	Difficultés à l'habillage	Avez-vous eu habituellement des problèmes pour vous habiller ? Par exemple, êtes-vous lent(e) ou avez-vous besoin d'aide pour vous boutonner, pour utiliser des fermetures éclair, pour mettre ou enlever vos vêtements ou vos bijoux ?
Difficultés à se laver, se raser, se brosser les dents (hygiène)	Avez-vous été habituellement lent ou avez-vous eu besoin d'aide pour vous laver, prendre un bain, vous raser, vous brosser les dents, vous peigner ou avec tout autre soin d'hygiène personnelle ?	

	Difficultés à l'écriture	Avez-vous des problèmes à lire votre écriture ?
	Problèmes dans les activités et passe-temps	Avez-vous habituellement rencontré des problèmes dans vos passe-temps favoris ou dans d'autres choses que vous aimez faire ?
	Difficultés à se tourner dans son lit	Avez-vous eu habituellement des problèmes pour vous tourner dans le lit ?
	Difficultés à se faire comprendre	On me demande souvent de répéter ce que je dis
	Cauchemars, hallucinations, rêves perturbants	Je dors mal et je me sens fatigué le matin
	Mouvements anormaux involontaires	Je me réveille plusieurs fois par nuit
	Tremblements	Avez-vous eu habituellement des tremblements ?
	Difficultés à sortir du lit, d'une voiture ou d'un siège profond	Avez-vous eu habituellement des problèmes pour sortir du lit, d'un siège de voiture ou d'un siège profond ?
	Difficultés à marcher	Avez-vous eu des problèmes d'équilibre et de marche ?
	Blocage pendant la marche	Quand vous marchez, vous arrêtez-vous soudainement ou vous bloquez vous comme si vos pieds restaient collés au sol ?

<i>Catégorie</i>	<i>Symptôme</i>	<i>Description</i>
Évaluation globale	Off	Je suis off
	On	Je suis on

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Autres symptômes spécifiques de la maladie de Parkinson	Mouvements involontaires (dyskinésies)	Mouvements involontaires (dyskinésies)
	Cauchemars et mouvements involontaires (REM Sleep behavior disorders)	S'il vous arrive pendant votre sommeil de crier, de vous agiter, donner des coups de poings ou de pieds, avoir des cauchemars.
	Trouble de l'odorat (anosmie)	Trouble de l'odorat (anosmie)

Mes symptômes

Des fonctionnalités tierces sont également disponibles :

Qualité de vie

Accès au Questionnaire :

Pour accéder au questionnaire de qualité de vie PDQ-8, rendez-vous dans la rubrique "Symptômes" de l'application.

Dans la rubrique "Symptômes", vous verrez la partie intitulée "Journal".





Lancement du Questionnaire :









Cliquez sur "Qualité de vie" pour ouvrir l'introduction du questionnaire. Vous serez accueilli par un message vous encourageant à "Évaluer et améliorer votre qualité de vie liée à la maladie de Parkinson en remplissant le questionnaire PDQ-8". Pour commencer, appuyez sur le bouton "Commencer".





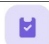

Remplissage du Questionnaire :

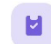Le questionnaire comprend 8 questions officielles du PDQ-8. Pour chaque question, vous devrez sélectionner une réponse basée sur une échelle de score allant de 0 à 4.

<p>← Qualité de vie </p> <p>Question 1/8</p> <p>Avez-vous eu des difficultés à vous déplacer en public ?</p> <p><input type="radio"/> 0 - Jamais</p> <p><input type="radio"/> 1 - Parfois</p> <p><input type="radio"/> 2 - Occasionnellement</p> <p><input type="radio"/> 3 - Souvent</p> <p><input type="radio"/> 4 - Toujours ou ne peut pas faire du tout</p> <p>Précédent Suivant</p>	<p>← Qualité de vie </p> <p>Question 2/8</p> <p>Avez-vous eu des difficultés à vous habiller ?</p> <p><input type="radio"/> 0 - Jamais</p> <p><input type="radio"/> 1 - Parfois</p> <p><input type="radio"/> 2 - Occasionnellement</p> <p><input type="radio"/> 3 - Souvent</p> <p><input type="radio"/> 4 - Toujours ou ne peut pas faire du tout</p> <p>Précédent Suivant</p>	<p>← Qualité de vie </p> <p>Question 3/8</p> <p>Vous êtes-vous senti déprimé(e) ?</p> <p><input type="radio"/> 0 - Jamais</p> <p><input type="radio"/> 1 - Parfois</p> <p><input type="radio"/> 2 - Occasionnellement</p> <p><input type="radio"/> 3 - Souvent</p> <p><input type="radio"/> 4 - Toujours ou ne peut pas faire du tout</p> <p>Précédent Suivant</p>	<p>← Qualité de vie </p> <p>Question 4/8</p> <p>Avez-vous rencontré des problèmes dans vos relations personnelles proches ?</p> <p><input type="radio"/> 0 - Jamais</p> <p><input type="radio"/> 1 - Parfois</p> <p><input type="radio"/> 2 - Occasionnellement</p> <p><input type="radio"/> 3 - Souvent</p> <p><input type="radio"/> 4 - Toujours ou ne peut pas faire du tout</p> <p>Précédent Suivant</p>
---	---	--	--

   			
<p>← Qualité de vie </p> <p>Question 5/8</p> <p>Avez-vous eu des problèmes de concentration, par exemple en lisant ou en regardant la télévision ?</p> <p><input type="radio"/> 0 - Jamais</p> <p><input type="radio"/> 1 - Parfois</p> <p><input type="radio"/> 2 - Occasionnellement</p> <p><input type="radio"/> 3 - Souvent</p> <p><input type="radio"/> 4 - Toujours ou ne peut pas faire du tout</p> <p>Précédent Suivant</p>	<p>← Qualité de vie </p> <p>Question 6/8</p> <p>Vous êtes-vous senti(e) incapable de communiquer correctement avec les gens ?</p> <p><input type="radio"/> 0 - Jamais</p> <p><input type="radio"/> 1 - Parfois</p> <p><input type="radio"/> 2 - Occasionnellement</p> <p><input type="radio"/> 3 - Souvent</p> <p><input type="radio"/> 4 - Toujours ou ne peut pas faire du tout</p> <p>Précédent Suivant</p>	<p>← Qualité de vie </p> <p>Question 7/8</p> <p>Avez-vous eu des crampes musculaires ou des spasmes douloureux ?</p> <p><input type="radio"/> 0 - Jamais</p> <p><input type="radio"/> 1 - Parfois</p> <p><input type="radio"/> 2 - Occasionnellement</p> <p><input type="radio"/> 3 - Souvent</p> <p><input type="radio"/> 4 - Toujours ou ne peut pas faire du tout</p> <p>Précédent Suivant</p>	<p>← Qualité de vie </p> <p>Question 8/8</p> <p>Vous êtes-vous senti(e) gêné(e) en public à cause de la maladie de Parkinson ?</p> <p><input type="radio"/> 0 - Jamais</p> <p><input type="radio"/> 1 - Parfois</p> <p><input type="radio"/> 2 - Occasionnellement</p> <p><input type="radio"/> 3 - Souvent</p> <p><input type="radio"/> 4 - Toujours ou ne peut pas faire du tout</p> <p>Précédent Suivant</p>


   			
--	--	--	--

Finalisation :

Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, l'exercice est terminé. Vous aurez la possibilité de consulter vos réponses, de les enregistrer ou de revenir en arrière pour apporter des modifications si nécessaire.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

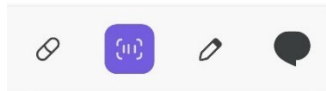

Mes activités


La fonctionnalité « Mes ACTIVITES » donne accès aux vidéos d'Anthony, à votre historique, à votre calendrier des rendez-vous et de lister vos activités quotidiennes. Elle donne également accès aux exercices dans la rubrique « Mes Exercices », qu'un utilisateur peut accomplir seul entre deux séances avec le kiné et l'orthophoniste (Offre Premium).

Mes activités



Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

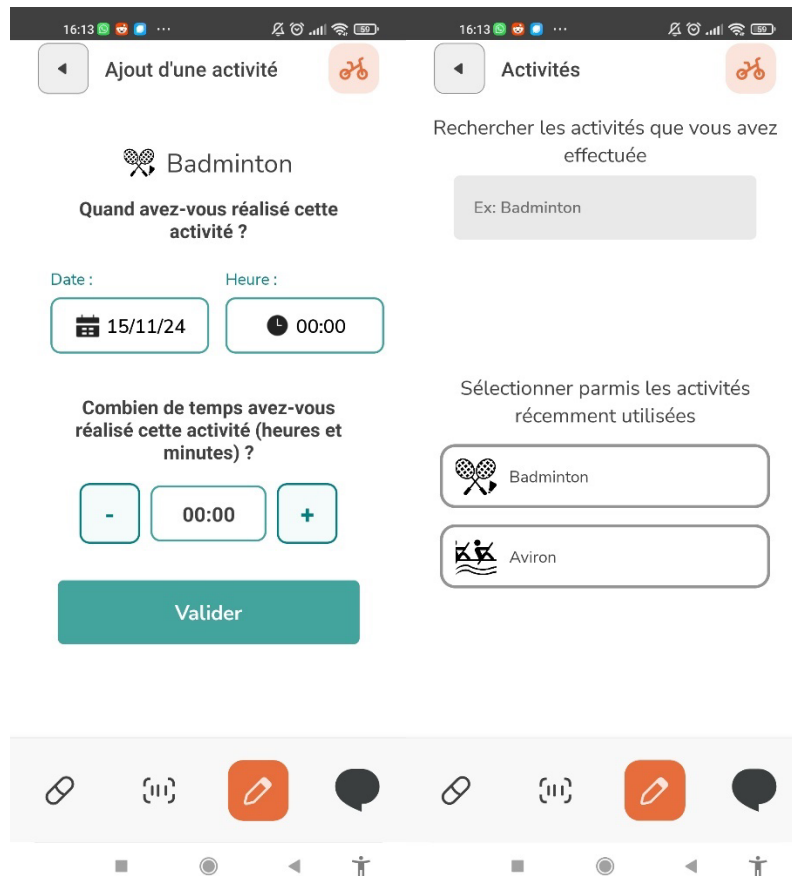


Dans ce module, il est possible d'ajouter des activités de loisir et du sport. Indiquez la date et l'heure à laquelle vous avez pratiqué ces activités et pendant combien de temps.

Ensuite vous pourrez retrouver les différentes activités que vous pratiquez en raccourci dans le module.

Mon historique de suivi

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

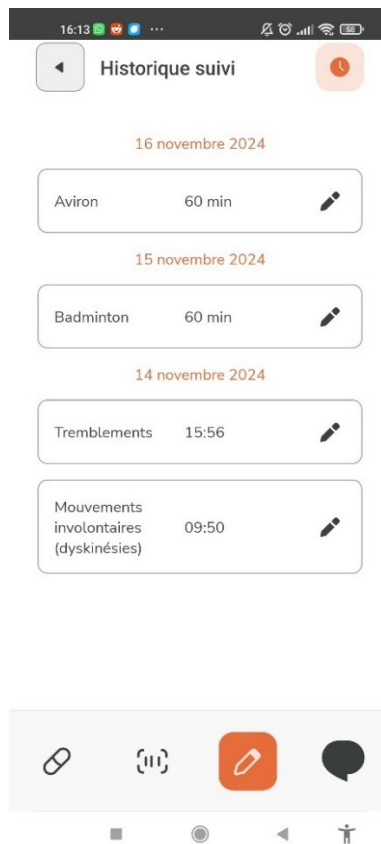

L'historique de suivi permet d'avoir un aperçu de toutes les activités pratiquées. En cas d'erreur, il est également possible de modifier les paramètres de chaque activité.

Calendrier des rendez vous

Fonctionnalité des Rendez-vous

Pour enregistrer un rendez-vous avec les soignants associés à Massage Parkinson, rendez-vous dans la section "Activités" de l'application.

Fonctionnalité "Rendez-vous soignant" :

Recherchez et cliquez sur le bouton "Rendez-vous soignant" pour accéder à la fonctionnalité d'enregistrement des rendez-vous.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Sélection du professionnel :


Une liste de professionnels vous sera présentée, incluant : neurologues, infirmiers, orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, assistants du service social, pédicures, podologues, diététiciennes, orthoptistes, psychomotriciens. Sélectionnez le professionnel avec lequel vous avez un rendez-vous.

Enregistrement de la date et de l'heure :

Indiquez ensuite la date et l'heure de votre rendez-vous. Après avoir rempli ces informations, elles seront automatiquement enregistrées dans le calendrier des rendez-vous de l'application. Ensuite, il suffit de valider.

Gestion des rendez-vous :


Une fois un rendez-vous enregistré, vous avez la possibilité de l'éditer, le supprimer ou le valider selon vos besoins.

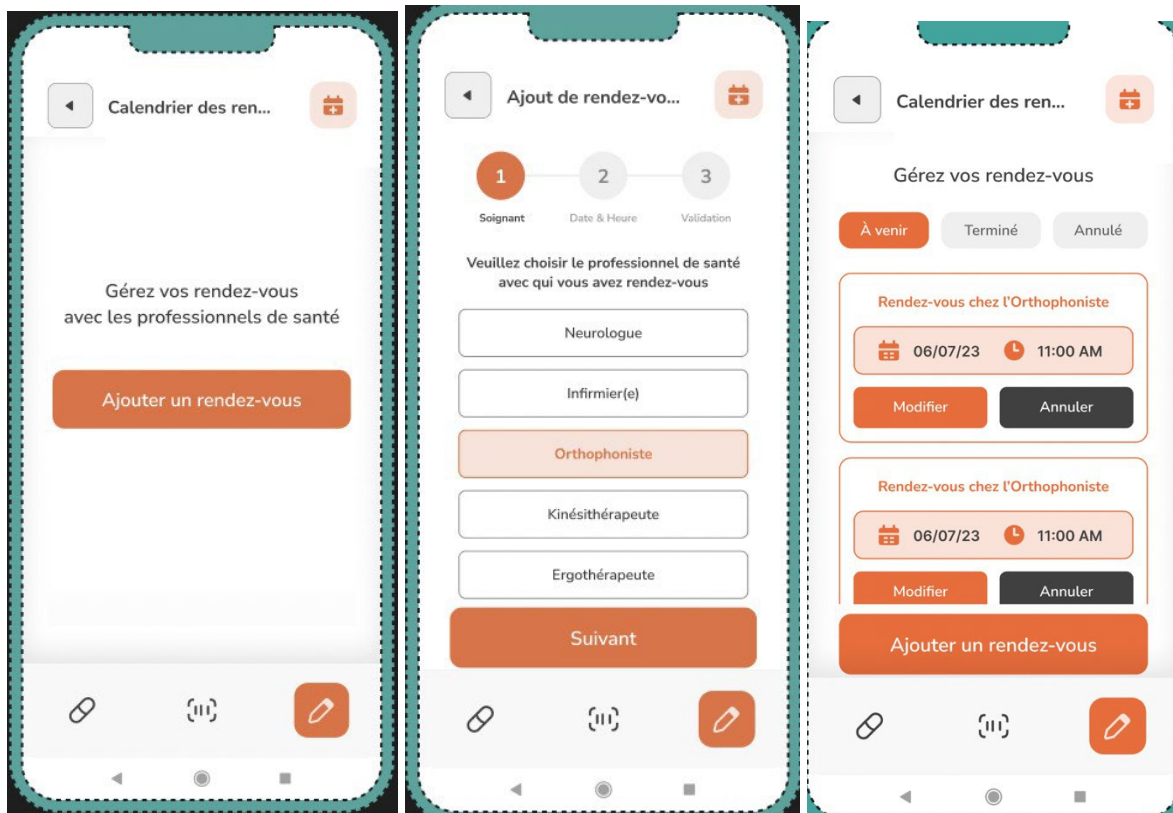

Les vidéos d'Anthony

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

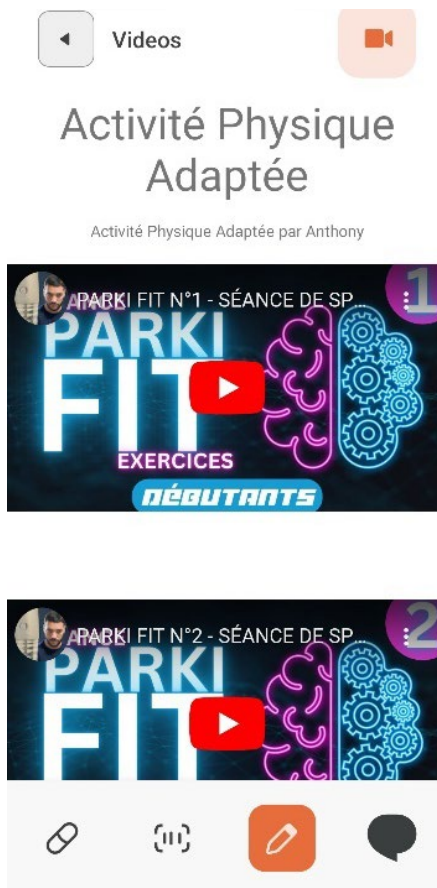

Ce module est un répertoire de vidéos démontrant des exercices d'éducation thérapeutiques. Ces exercices sont réalisés par un patient atteint de la maladie de parkinson.

Mes exercices de rééducation (Offre Premium)

Dans la section "Activités", la rubrique intitulée "Mes exercices de rééducation" inclut dans l'offre PREMIUM, comprend :


- les modules Tabata orthophonie et kinésithérapie
- les exercices des articulations,
- la calligraphie
- le tapping.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Articulation (Offre Premium)

ARTICULATION Le patient prononce une liste de mots et l'application affiche ce qu'elle entend. Le patient travaille ainsi la précision de son articulation.

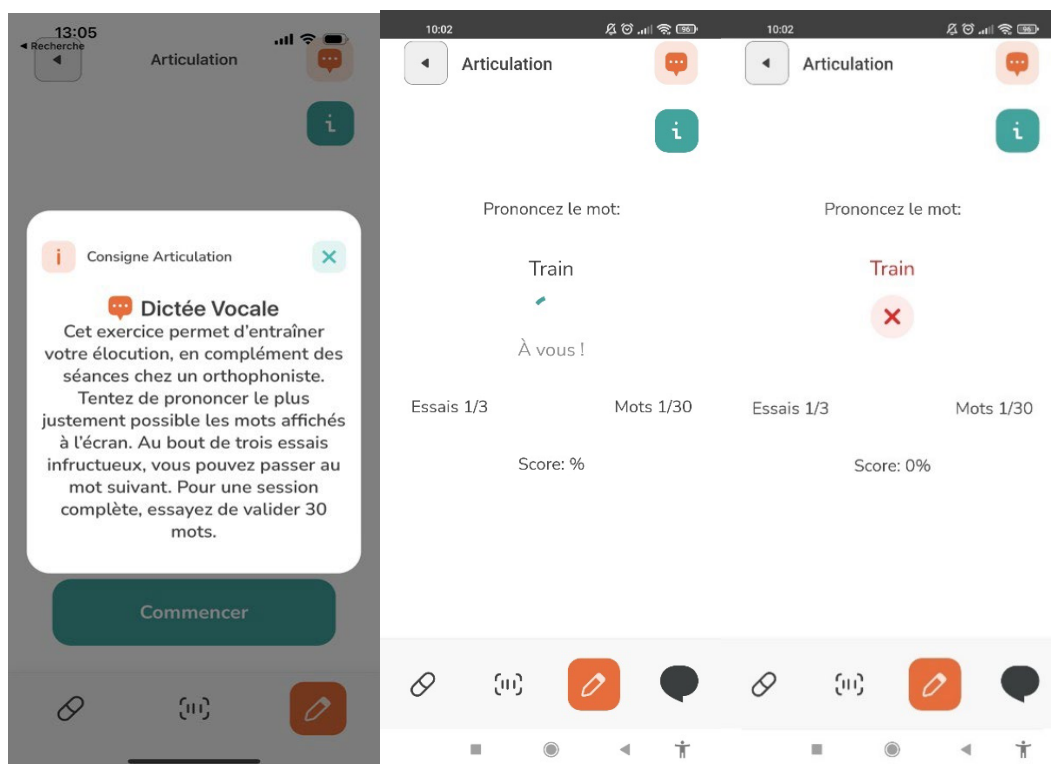

Le patient prononce une liste de mots et l'application affiche ce qu'elle entend. Le patient travaille ainsi la précision de son articulation.

Étapes à suivre :

1. Appuyez sur le bouton « Articulation ».
2. Lisez les instructions puis cliquez sur le bouton « Commencer ».
3. Indiquez votre niveau ressenti du moment.
4. Répétez les mots aichés à voix haute.
5. Lorsque la prononciation est bonne, le mot s'inscrit en vert.
6. Lorsque le mot n'est pas reconnu, le mot compris par le téléphone s'affiche en rouge.
7. Au bout de 3 essais, vous pouvez passer au mot suivant.
8. Répétez le plus de mots possible.

Avertissement:

L'application pourrait ne pas évaluer correctement la capacité d'articulation de l'utilisateur. Bien que des tests soient régulièrement effectués dans l'application pour modérer ce risque, nous sommes

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

conscients qu'aucun système n'est infaillible. Si vous, en tant que patient, estimez qu'une fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu ou que vous constatez des erreurs dans vos données, n'hésitez pas à nous écrire à support@diampark.io pour nous en informer. Votre feedback est essentiel pour nous permettre d'améliorer continuellement l'application.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Tabata orthophonie (Offre Premium)

Les exercices d'orthophonie sont un ensemble de modules appelés Tabata, disponibles dans l'application DigiPark. Ces modules visent à aider les patients atteints de la maladie de Parkinson à améliorer leur capacité à articuler les mots et à contrôler leur voix.



Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Les différents modules comprennent l'apnée du sommeil, la déglutition, l'équilibre vocal, la langue, ainsi que la mobilité des mains et des doigts.

Chaque module Tabata est composé de plusieurs exercices, avec des durées et des temps de repos spécifiques. Les exercices sont adaptés à différents niveaux de difficulté et peuvent être personnalisés en fonction des capacités de chaque patient. L'ensemble de ces exercices d'orthophonie a pour objectif d'entraîner la communication des patients atteints de la maladie de Parkinson.

Digipark vous demande ainsi les activités que vous avez réalisées. Vous pouvez alors taper le nom de l'activité sur la barre de recherche puis sélectionner le jour et l'heure.




Tabata kinésithérapie (Offre Premium)

Les exercices de kinésithérapie sont un ensemble de modules appelés Tabata, disponibles dans l'application DigiPark. Ces modules visent à aider les patients atteints de la maladie de Parkinson à améliorer leur force musculaire, leur coordination, leur équilibre et à gérer leurs tremblements.

Chaque module Tabata kinésithérapie est composé de plusieurs exercices, avec des durées et des temps de repos spécifiques. Les exercices sont adaptés à différents niveaux de difficulté et peuvent être personnalisés en fonction des capacités de chaque patient.


Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

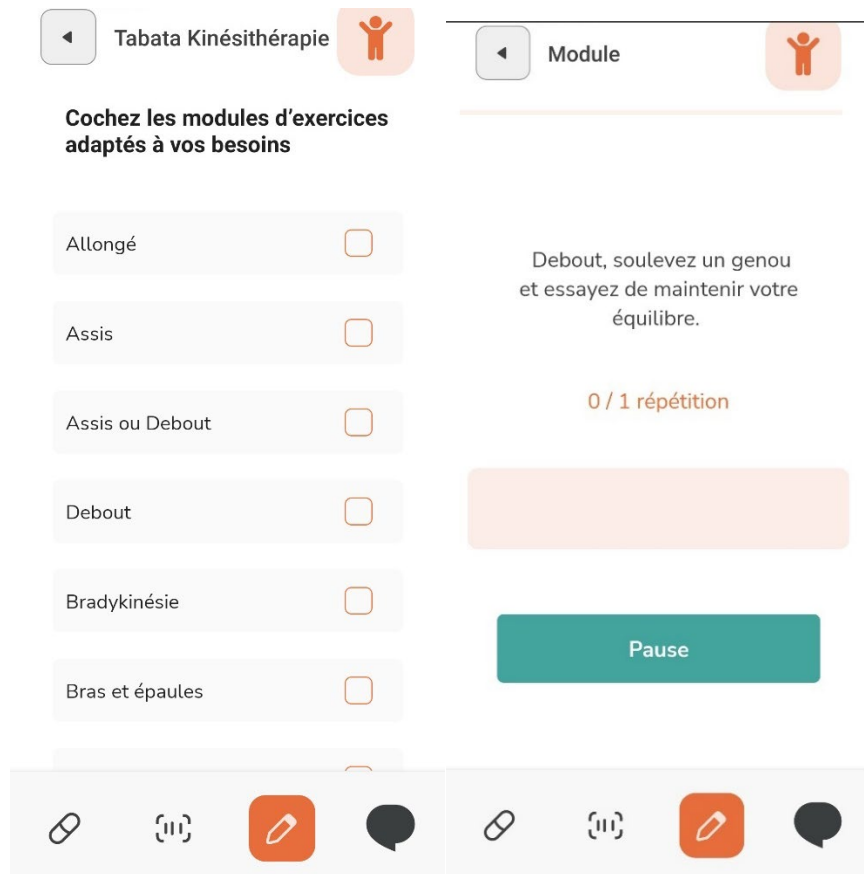

Calligraphie (Offre Premium)


Ce module revoit vers l'application LazyDog Calligraphie, une application pour apprendre et pratiquer différentes écritures manuscrites.

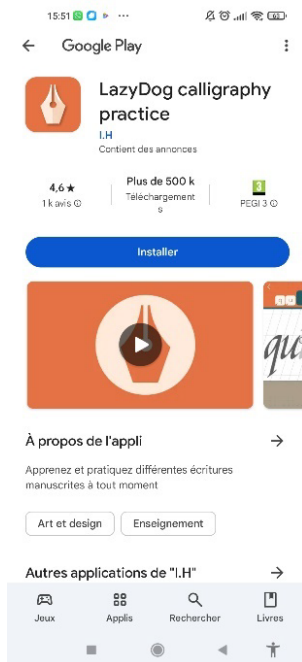

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Tapping (Offre Premium)

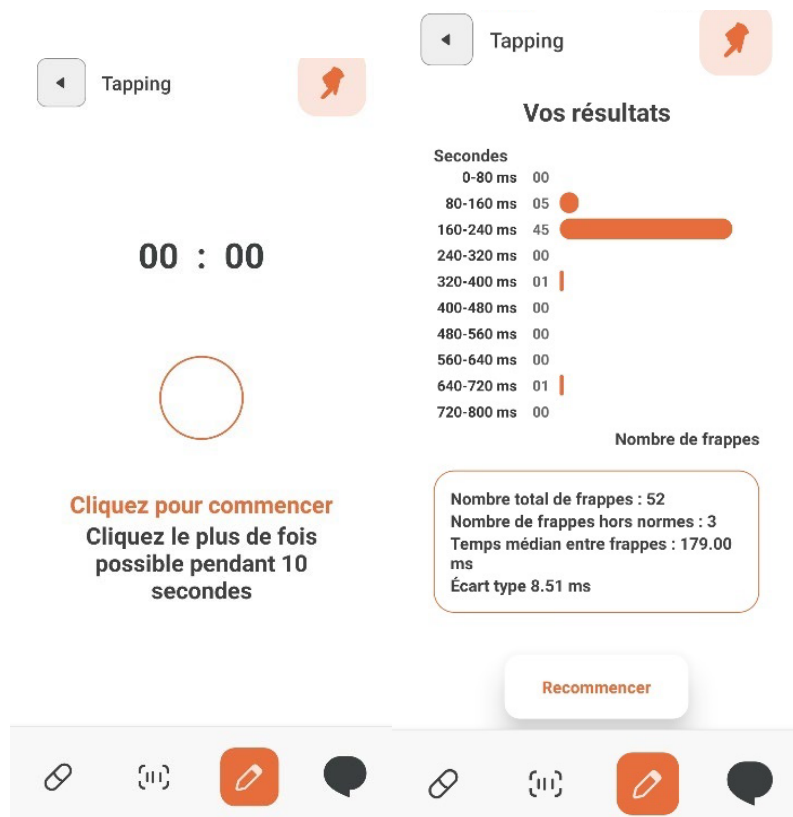


L'exercice tapping permet de compter le nombre de taping et leur régularité dans un laps de temps de 10 secondes. Il calcule le nombre de frappe, le nombre de frappe hors normes, le temps médian entre les frappes et l'écart type.

Mon rapport d'activités

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

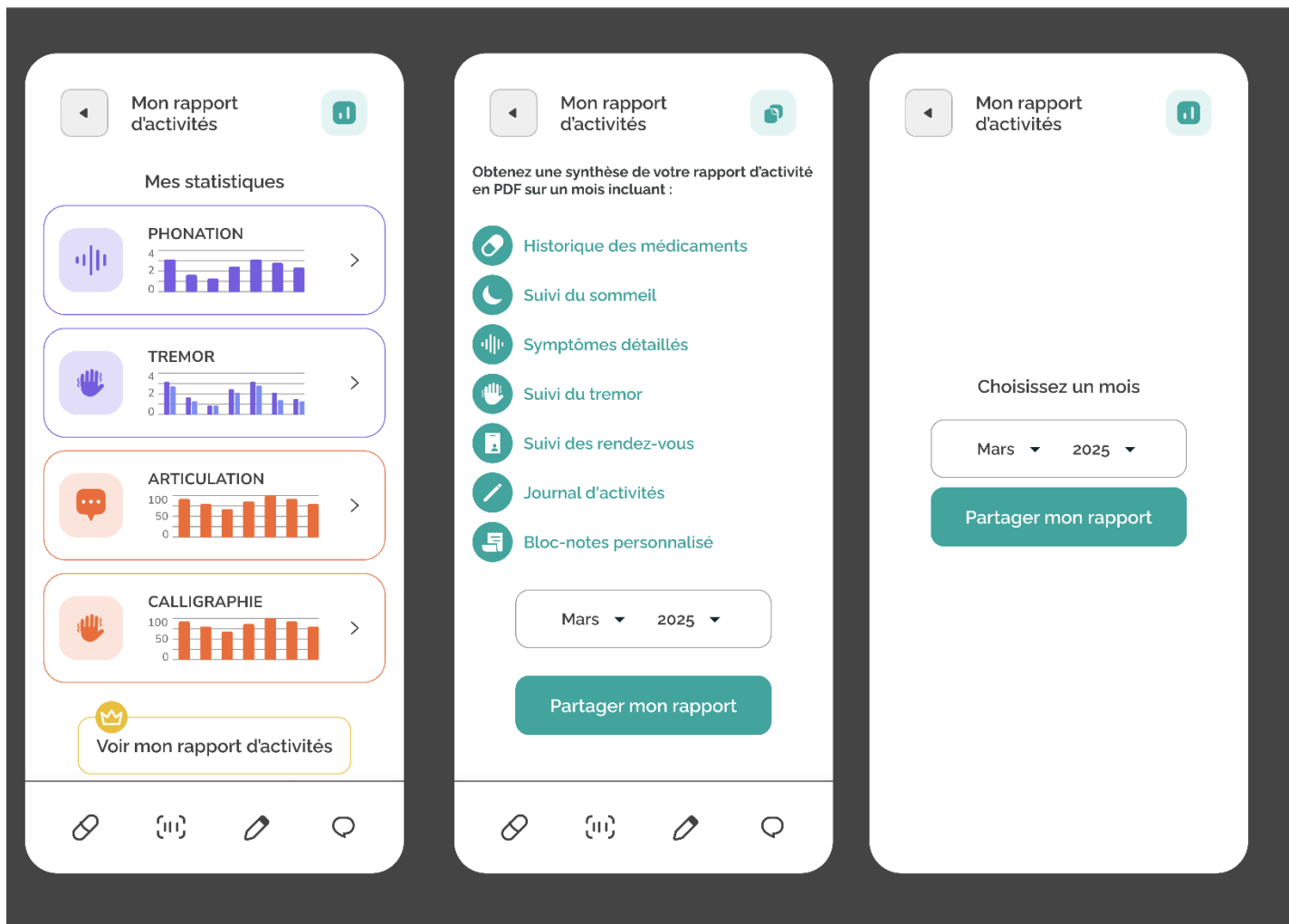

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Statistiques : consultez les résultats des évaluations du tremblement de la main, des évaluations de la voix et des résultats des exercices d'articulation.

Rapport d'activités en PDF : téléchargez votre rapport d'activités en PDF et partagez le avec votre professionnel de santé ou vos proches.

Rapport d'activités en PDF (Offre Premium)

DigiPark offre une synthèse de votre rapport d'activités en PDF à télécharger pour aider les patients à partager les informations importantes sur leur état de santé. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de sélectionner un mois et de télécharger un rapport mensuel complet sur son état de santé. Le rapport peut être partagé avec le professionnel de santé qui suit le patient pour l'aider à mieux comprendre son état de santé.

Pour accéder à la fonctionnalité de rapport d'activités, l'utilisateur doit se connecter à son compte DigiPark et sélectionner l'option "Rapport d'activités" dans le menu principal. À partir de là, il peut sélectionner le mois pour lequel il souhaite générer un rapport, puis télécharger le rapport complet en format PDF.

Avertissement :

Il est important de noter que les rapports médicaux générés par DigiPark ne doivent pas être utilisés pour remplacer les conseils et les recommandations d'un professionnel de santé, mais plutôt comme un outil supplémentaire pour aider les patients à mieux comprendre leur état de santé et à améliorer leur communication avec leurs proches, aidants ou professionnels de santé.

Mes statistiques

DigiPark permet de suivre l'évolution des symptômes de la maladie de Parkinson grâce à une fonctionnalité de statistiques. L'utilisateur peut visualiser les résultats des tests moteurs de tremblement, de phonation et d'articulation en fonction de la plage de dates choisie (jour, semaine, mois ou année).

Pour accéder aux statistiques, sélectionnez l'onglet "Mon rapport d'activités" dans le menu principal de l'application. Les résultats s'affichent sous forme de graphiques clairs et détaillés dans la rubrique « Mes statistiques ». Les statistiques sont un outil utile pour les patients et les professionnels de santé pour suivre l'évolution de la maladie de Parkinson.

Avertissement :


Il est possible que les données des utilisateurs ne soient pas stockées ou récupérées pour analyse, pouvant ainsi entraîner des rapports médicaux incomplets ou inexacts. Bien que des tests soient régulièrement effectués dans l'application pour modérer ce risque, nous sommes conscients qu'aucun système n'est infaillible. Si vous, en tant que patient, estimez qu'une fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu ou que vous constatez des erreurs dans vos données, n'hésitez pas à nous écrire à support@diampark.io

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

pour nous en informer. Votre feedback est essentiel pour nous permettre d'améliorer continuellement l'application.

Parky Assist (Offre Premium)

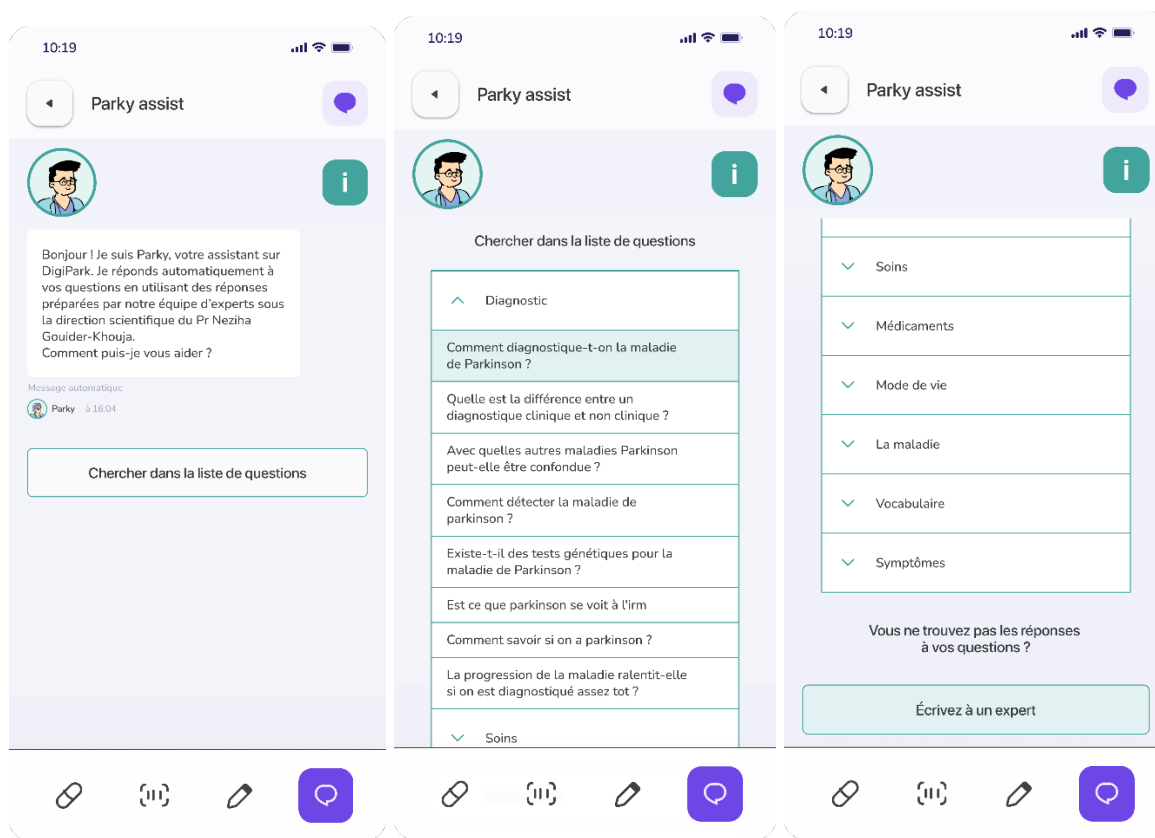

Avertissement:

La messagerie vise à fournir des informations pratiques et des orientations générales basées sur les informations que vous fournissez et ne constitue pas, ni ne remplace, une consultation médicale. Nous vous encourageons vivement à consulter votre médecin ou un autre professionnel de santé qualifié pour toute question ou problème de santé spécifique, notamment pour toute évaluation approfondie, surveillance, diagnostic ou traitement.

Menu

L'onglet Menu est situé en haut à droite du menu avec un triple tiret.

Langues

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark



Dans la section “Langues de l’application” dans Menu, vous pouvez sélectionner la langue française, anglaise, portugaise, espagnole, finlandaise, allemande, italienne, ukrainienne, arabe standard moderne, néerlandais.

Consignes

Consignes

Pour assurer la bonne utilisation de l'application DigiPark, nous recommandons d'utiliser l'application dans un endroit calme et confortable, de préférence à la maison. Évitez les environnements froids, bruyants et les situations stressantes lors de la réalisation des évaluations et des exercices. Il est important d'effectuer les tests vous-même afin de garantir l'authenticité des résultats. En suivant ces recommandations, vous contribuez à l'optimisation de votre expérience utilisateur.

Articulation

Cet exercice permet d'entraîner votre élocution, en complément des séances chez un orthophoniste. Tentez de prononcer le plus justement possible les mots affichés à l'écran. Au bout de trois essais infructueux, vous pouvez passer au mot suivant. Pour une session complète, essayez de valider 30 mots.

Tremblement

Le test de Tremblement permet d'évaluer l'importance des tremblements au niveau des bras, en utilisant les capteurs du téléphone. Lorsque l'on vous l'indiquera, prenez votre téléphone dans votre main gauche et tendez le bras jusqu'à ce que la jauge soit pleine. Une fois l'évaluation effectuée, répétez l'opération avec votre bras droit. Veillez à réaliser cette évaluation dans un lieu stable afin de ne pas fausser le résultat.

Si vous réalisez ce test en ayant des symptômes forts, veuillez les ajouter à votre suivi grâce à la fonctionnalité « Symptômes ». Si vous êtes diagnostiqué d'une autre pathologie, veuillez nous l'indiquer en nous écrivant à support@diampark.io

Phonation

Le test de phonation permet d'évaluer la stabilité de votre voix en quelques secondes. Lorsque l'enregistrement commence, prononcez la syllabe « aaa », pendant le temps de l'évaluation, de la manière la plus stable possible. Veillez à réaliser cette évaluation dans un lieu calme afin de ne pas fausser le résultat.

Si vous réalisez ce test en ayant des symptômes forts, veuillez les ajouter à votre suivi grâce à la fonctionnalité « Symptômes ». Si vous êtes diagnostiqué d'une autre pathologie, veuillez nous l'indiquer en nous écrivant à support@diampark.io

Pilulier

Le pilulier vous permet d'enregistrer précisément vos prises de médicaments, ainsi que vos heures de lever et de coucher.

Support


Si vous faites face à un problème technique ou si vous souhaitez partager vos retours avec nous, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support à l'adresse suivante : support@digipark.io

Cette partie rappelle les consignes de chaque exercice et fonctionnalité de l'application. Dans cette page, vous trouverez un récapitulatif des principales instructions de l'application. Pour votre information, veuillez les consulter ci-dessous :

Informations

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

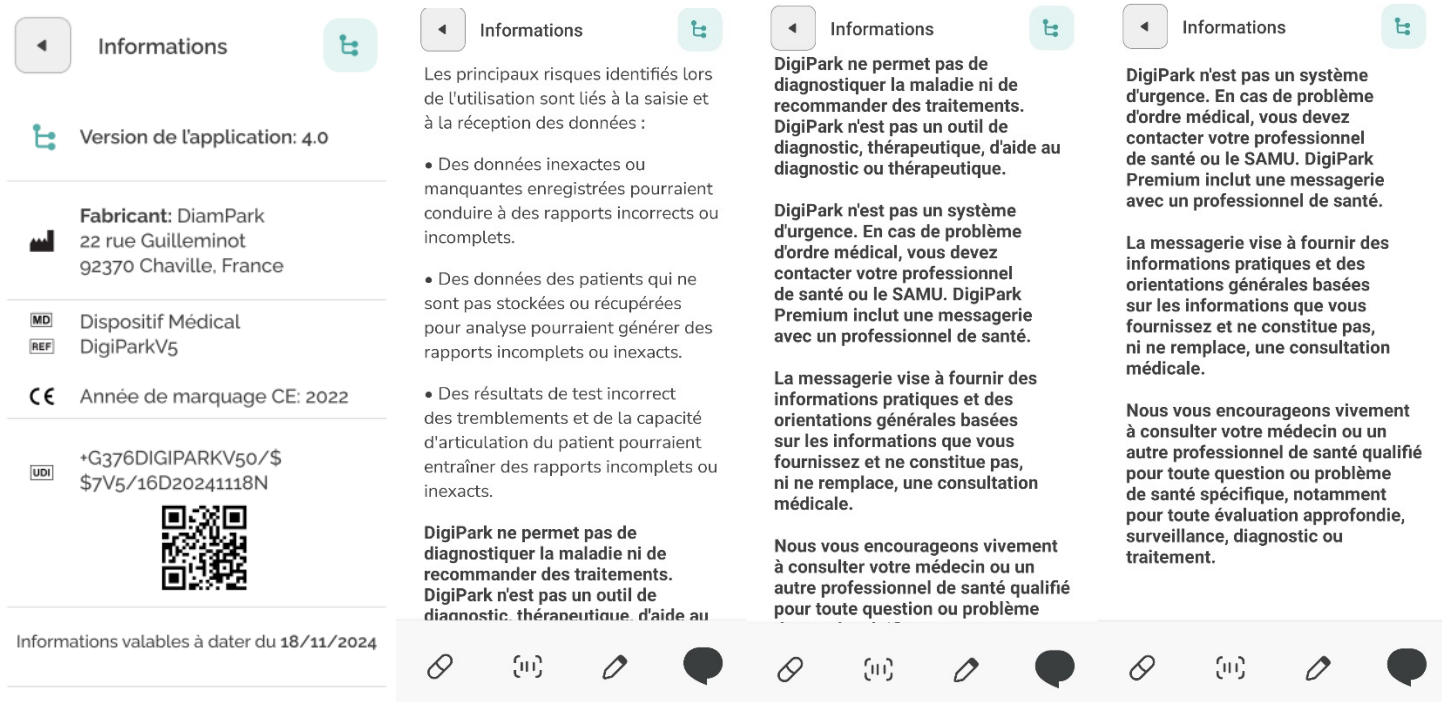

La section Informations vous rappelle la version de l'application, mais aussi les informations du Fabricant, le marquage CE du dispositif et les informations d'identification.

Mentions

DiamPark vous rappelle ici les mentions légales :

Fabriqué par DiamPark, DigiPark est une application de santé numérique réglementée destinée aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et qui porte, au titre de la réglementation relative aux dispositifs médicaux (MDR 2017/745), le marquage CE. DigiPark inclut notamment un rappel de prise des médicaments indiqués dans cette pathologie, un journal des symptômes, et des exercices de rééducation. Lisez attentivement la notice d'utilisation <https://diampark.io/e-ifu>. Demandez conseil à votre professionnel de santé.

Les données de santé partagées dans l'application sont utilisées dans le strict respect de la réglementation applicable. En savoir plus sur l'utilisation de vos données et de vos droits dans notre politique de confidentialité <https://diampark.io/confidentiality-policy>. Les données sont conservées sur un serveur sécurisé HDS. DiamPark s'engage à ne jamais partager vos données avec un tiers.

Consentement

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

← **Consentements** ✓

En tant que responsable de traitement, DiamPark traite vos données personnelles, y compris vos données de santé, pour vous offrir un parcours et des services personnalisés.





DiamPark cherche à améliorer ses services et à mesurer les activités afin de proposer la meilleure expérience utilisateur possible. A ce titre, nous réalisons des recherches scientifiques pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients. De plus, nous analysons vos données dans le cadre de la surveillance post-commercialisation pour respecter nos obligations en tant que fabricant de dispositif médical.

Certifié conforme par Dipeeo®

J'accepte de partager mes données de santé
[Voir la politique de confidentialité](#)

J'accepte l'utilisation de mes données à des fins de recherche
[Voir le portail de transparence](#)

Valider

A tout moment, vous pouvez modifier votre consentement de partager vos données de santé dans l'application.

Politique de confidentialité

Notre Politique de confidentialité vise à vous informer sur la manière et les raisons pour lesquelles nous traitons vos données personnelles dans le cadre des services que nous vous fournissons. Elle est disponible directement depuis l'application et sur notre site web ici : <https://diampark.io/confidentiality-policy>

Conditions Générales d'Utilisation

Les CGU précisent les modalités d'accès et d'utilisation de l'application DIGIPARK. L'utilisation de l'application implique l'acceptation de ces CGU, qui resteront valables pendant toute la durée d'utilisation de l'application. Elles sont disponibles depuis l'application et sur notre site web ici : <https://diampark.io/cgu-digipark>

Guide utilisateur

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

La notice d'information électronique actuelle ainsi que les archives sont disponibles et téléchargeables à tout moment dans l'application « Guide utilisateur » et sur notre site web ici : <https://diampark.io/e-ifu>

Conditions Générales de Vente

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) définissent les modalités et conditions de vente des services proposés par Digipark via son application mobile disponible sur Google Play et l'App Store. Elles complètent les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) et sont acceptées sans réserve par l'utilisateur lors de l'achat de services. Elle sont disponibles depuis l'application et sur notre site web ici : <https://diampark.io/cgv-digipark>

Suppression du compte

Vous pouvez supprimer votre compte à tout moment. DiamPark vous propose deux options de suppression.

◀ Supprimer mon compte 🗑️

Vous pouvez à tout moment supprimer votre compte. Il s'agit d'une action irréversible: une fois supprimé, vous ne pourrez plus récupérer votre compte.

DigiPark vous propose deux options de suppression de compte. Veuillez en choisir une:

Garder vos données pseudonymisées qui contribuent aux recherches scientifiques sur le Parkinson.

Supprimer votre compte avec votre identifiant, mot de passe et données pseudonymisées.

Supprimer mon compte


Annuler

🔗 {||} ✎ 🗨️

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Contact

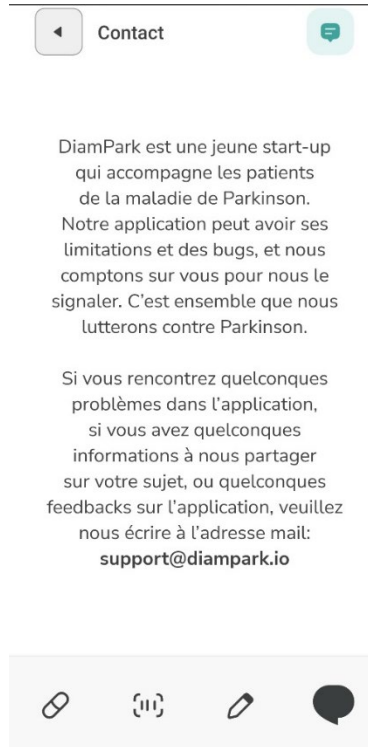

Paramètres supplémentaires

Les paramètres supplémentaire ont pour but d'ajuster les autorisations que vous donnez à l'application ainsi que d'avoir une vue sur l'utilisation des données, leur stockage et le cout de l'application en énergie.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark



DigiPark Premium

✕

DigiPark Premium

Accédez à la version complète de l'app



- ✓ Parky assist : Une messagerie en illimité, un professionnel de santé répond à vos questions.
- ✓ Votre rapport d'activités PDF complet
- ✓ Vos exercices de rééducation

Obtenez une période d'essai de 7 jours gratuits sur votre abonnement !

Annuel - 2 mois offerts
Recommandé

Soit 199,99€/an, au lieu de 239,99€/an

Mensuel
19,99€/mois

C'est ainsi que fonctionnent les 7 jours d'essai

- ✓ Parky assist : Une messagerie en illimité, un professionnel de santé répond à vos questions.
- ✓ Votre rapport d'activités PDF complet
- ✓ Vos exercices de rééducation

Obtenez une période d'essai de 7 jours gratuits sur votre abonnement !

Annuel - 2 mois offerts
Recommandé

Soit 199,99€/an, au lieu de 239,99€/an

Mensuel
19,99€/mois

C'est ainsi que fonctionnent les 7 jours d'essai

À partir d'aujourd'hui

Vous obtenez votre rapport d'activité, vos exercices de rééducation et l'accès à Parky assist

Après 7 jours

Votre abonnement payant commence

Après l'essai gratuit de sept jours, cet abonnement se renouvèle automatiquement (199,99€/an ou 19,99€/mois), sauf si il est annulé au moins 24 heures avant la fin de la période d'essai. Le renouvellement sera facturé à votre compte Google dans les 24 heures précédant la fin. Vous pouvez gérer vos abonnements en vous rendant dans les paramètres de votre compte Play store ou App store après l'achat.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Version v4.1

Date d'édition	2022-10-31
Date de mise à jour	2025-03-17
Date de publication	2025-03-25
Langue	Version française

Ce manuel d'utilisation est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark