

Digipark

Notice d'utilisation

Application Mobile Digipark : Guide complet pour l'utilisation de l'outil digital de gestion de la maladie de Parkinson.



Guide utilisateur - DigiPark V5 - Patients - v4.2

Veillez lire attentivement l'intégralité du guide utilisateur avant d'utiliser DigiPark, un dispositif médical de classe I marqué CE selon le règlement MDR 2017/745.

Table des matières

.....	1
Guide utilisateur - DigiPark V5 - Patients - v4.2.....	2
PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RÉGLEMENTAIRES	6
Mentions	6
Principales mesures de diminution de risque	7
Avis de non-responsabilité :.....	7
Avertissements.....	7
Symboles	9
Utilisation prévue.....	10
Indications	10
Description	10
Utilisateurs concernés	11
Patients.....	11
Environnement prévu / paramètres et contexte d'utilisation.....	11
Contre-indications d'utilisation.....	12
Principe de fonctionnement et mode d'action.....	13
Principe de fonctionnement	13
Mode d'action.....	13
Pré-requis.....	14
Compatibilité.....	14
Contre-indications environnementales	15
Conformité	15
Instructions de fonctionnement	16
Première utilisation.....	16
Avant chaque utilisation	16
A chaque utilisation	17
Principales étapes.....	17
Support	17
Principaux messages d'erreur	18
Informations de contact.....	18
PARTIE II : FONCTIONNALITÉS DE DIGIPARK.....	20
Page de connexion	20
Mise en route (Onboarding).....	20
Page d'accueil (Homepage).....	22

Copyright © 2026 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Menu	24
Pilulier digital.....	24
Ordonnance.....	25
Aujourd'hui.....	26
Historique.....	26
Suivi symptômes.....	27
Évaluations	27
Journal & + Symptomes.....	34
Sommeil.....	38
Activités	39
Journal	40
Kinésithérapie Tabata	41
Orthophonie Tabata.....	43
Motiv'Park	44
Calendrier	45
Messagerie.....	46
Profil	47
Identité & Administratif	48
Données Cliniques	49
Environnement médical.....	50
Aidants	52
Paramètres	53
Notifications.....	54
Personnalisation (graphique)	55
Apparence (affichage)	56
Sécurité	57
Données et stockage	57
Relancer la mise en route (onboarding).....	58
Supprimer le compte.....	58
Codes & Abonnements.....	59
Activation d'un code :	59
S'abonner :	60
DigiPark Watch (Connexions)	61
Rapport de synthèse	62
Règlementaire & Informations	63
Accord partage des données :	63
Conditions Générales d'Utilisation.....	64
Conditions Générales de Ventes.....	64
Politique de Confidentialité.....	65
Notice d'Utilisation / Guide Utilisateur	65

Copyright © 2026 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Mentions	65
Accès Plateforme web DigiPark	65
Version v4.2	66

Copyright © 2026 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Consignes de sécurité importantes



Veillez lire attentivement l'intégralité de ce guide utilisateur avant toute utilisation de DigiPark, dispositif médical de classe I, car elle contient des informations importantes.

Vous devez toujours utiliser le dispositif DigiPark en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice.

- Conservez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin ultérieurement.
- Pour toute assistance technique, vous pouvez nous contacter à tout moment via le support applicatif : support@diampark.io.

PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RÉGLEMENTAIRES

Mentions

- Nom du dispositif médical : DigiPark
- Version: v5
- Référence : DigiParkV5
- Nom du fabricant : DiamPark
- Adresse: 22 RUE GUILLEMINOT, 92370 CHAVILLE, France
- SIRET: 88379964500014
- UDI-DI: +G376DIGIPARKV50+
- Date de marquage classe I : 31/10/2022
- Le dispositif DigiPark est marqué CE de classe I selon le règlement MDR 2017/745 et à ce titre autorisé comme dispositif médical.

À propos de ce guide utilisateur

Les instructions d'utilisation (IFU) font partie intégrante du dispositif médical DigiPark. Il détaille les informations générales et réglementaires et son utilisation.

Note : Les captures d'écran présentées dans l'IFU ne sont que des exemples, elles ne sont pas exhaustives et peuvent différer légèrement des vues disponibles dans l'interface utilisateur.



La version électronique du mode d'emploi est disponible en ligne sur le site web de DiamPark <https://diampark.io/e-ifu> ainsi que sur l'application DigiPark. Elles doivent être lues. Vous pourrez également trouver toutes les versions précédentes de nos produits et services. Les versions électroniques du manuel d'utilisation peuvent être lues au format .pdf et téléchargées via Adobe Reader. Une version imprimée peut être demandée en version papier, cela sans frais supplémentaires, en envoyant simplement un e-mail à support@diampark.io avec votre adresse complète (réponse sous 7 jours ouvrés).

Public visé : Cet IFU est destiné aux patients qui utilisent DigiPark.

Principaux risques identifiés pour l'utilisation

Les principaux risques identifiés sont liés à la saisie et à la réception des données, ce qui peut avoir pour conséquence :

- Des données inexactes ou manquantes enregistrées, ce qui pourrait conduire à des rapports médicaux incorrects ou incomplets.
- Des données des utilisateurs qui ne soient pas stockées ou récupérées pour analyse, pouvant ainsi entraîner des rapports médicaux incomplets ou inexacts.
- Une évaluation incorrecte des tremblements et de la capacité d'articulation de l'utilisateur pouvant ainsi entraîner des rapports médicaux incomplets ou inexacts.

Principales mesures de diminution de risque

Pour modérer ces risques, plusieurs mesures ont été mises en place :

Si quelque chose vous semble anormal, nous vous encourageons à consulter notre équipe support support@diampark.io (veuillez-vous référer au paragraphe « Informations de contact »).

Nous avons également prévu une page dédiée contenant les instructions détaillées pour l'évaluation afin de guider au mieux les utilisateurs.

De plus, des tests sont régulièrement effectués en interne pour s'assurer du bon fonctionnement de l'application.

Avis de non-responsabilité :

DigiPark ne permet pas de diagnostiquer la maladie ni de recommander des traitements. DigiPark n'est pas un outil de diagnostic, thérapeutique, d'aide au diagnostic ou thérapeutique. DigiPark n'est pas un système d'urgence. En cas de problème d'ordre médical, vous devez contacter votre professionnel de santé ou le SAMU. DigiPark Premium inclut une messagerie « premium » avec le support. La messagerie vise à fournir des informations pratiques et des orientations générales basées sur les informations que vous fournissez et ne constitue pas, ni ne remplace, une consultation médicale. Nous vous encourageons vivement à consulter votre médecin ou un professionnel de santé qualifié pour toute question ou problème de santé spécifique, notamment pour toute évaluation approfondie, surveillance, diagnostic, traitement ou pour toute question de nature médicale.

L'accès « aidant » n'est pas destiné à la surveillance médicale, à l'interprétation des données ou à la prise de décision clinique. L'accès aidant via la plateforme Web permet de communiquer avec son patient via une messagerie. Cette messagerie ne constitue pas un outil de télésurveillance ni un système d'alerte médicale. Elle permet uniquement un échange pratique entre l'aidant et le patient, sans finalité clinique.

Avertissements



Avertissement relatif à la cybersécurité

- Veuillez toujours à n'ouvrir que des sites web via une connexion SSL/TLS sécurisée. Dans ce cas, l'adresse internet commence par "https". Les connexions qui commencent uniquement par "http" présentent un risque pour la sécurité.
- Assurez-vous d'utiliser la dernière version de votre navigateur web et mettez régulièrement à jour votre système d'exploitation.
- Gardez vos mots de passe à jour. Utilisez un mot de passe distinct pour chaque application et n'utilisez pas les mots de passe précédents.
- Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les courriels provenant d'expéditeurs inconnus, car ils pourraient vous diriger vers un site web contenant des logiciels malveillants.



Avertissement concernant les effets secondaires

Copyright © 2026 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

- Si vous remarquez des effets secondaires ou des réactions indésirables lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez de l'utiliser et contactez votre médecin.
- Si vous remarquez un changement notable dans les performances de notre appareil, contactez DiamPark.
- Tout incident grave lié à l'appareil doit être signalé à DiamPark et à l'autorité compétente du lieu où se trouve l'utilisateur (veuillez vous référer au paragraphe « Comment signaler un incident ? »)



Avertissement concernant l'utilisation

DigiPark est destiné à être utilisé à domicile, et ne doit pas être utilisé en marchant ou en conduisant ou dans un environnement bruyant. Vous assumez l'entière responsabilité et les risques liés au non-respect de ces instructions. Utilisez DigiPark dans des conditions appropriées (veuillez vous référer au paragraphe « Environnement prévu »).



Avertissement relatif à l'accès aidant et accompagnant paramédical

L'accès aidant n'est pas destiné à un usage clinique, n'intègre aucune analyse médicale automatisée et ne doit pas être utilisé pour surveiller l'évolution d'une maladie ou ajuster un traitement.

L'accès professionnel de santé permet de visualiser les données cliniques déclaratives et les scores d'évaluation (biomarqueurs) du patient. Ces informations constituent une aide au suivi de la maladie et enrichissent le dialogue lors des consultations. Cependant, le logiciel n'intègre aucune analyse médicale diagnostique ou prédictive automatisée, ne génère pas d'alertes d'urgence en temps réel, et ne remplace en aucun cas l'examen clinique standardisé qui demeure indispensable pour poser un diagnostic ou ajuster un traitement de manière autonome.



Avertissement concernant les données personnelles

Le traitement des données personnelles relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans (Chapitre II - Article 7 - Règlement (UE) 2016/679). Si l'utilisateur est âgé de moins de 18 ans, il doit lire attentivement tous les documents d'information avec son parent ou tuteur afin de s'assurer que l'utilisateur et le parent ou tuteur les comprennent.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être visibles sur/au sein du dispositif ou dans la documentation :

Symbole / Texte	Signification
	Les instructions d'utilisation doivent être lues et sont disponibles sous forme électronique (e -IFU).
	Se référer au manuel utilisateur
	Nom et adresse du fabricant
	Date de fabrication
	Avertissement
	Identifiant unique de l'appareil (UDI)
	Marquage CE
	Dispositif médical

Utilisation prévue

Indications

DigiPark est un dispositif médical numérique conçu pour accompagner les patients atteints de la maladie de Parkinson, et destiné à collecter, analyser et archiver des données de santé et de la vie réelle.

DigiPark est une application compagnon destinée aux patients adultes ayant reçu un diagnostic de maladie de Parkinson par un professionnel de santé qualifié. Elle permet au patient de gérer de façon holistique leur état de santé et qualité de vie par le biais d'un suivi continu de données de santé et de la vie réelle.

DigiPark peut être utilisé, s'il le patient le souhaite, par un aidant ou un professionnel de santé (comme un kinésithérapeute ou un orthophoniste) que le patient invite depuis l'application. L'aidant a accès à une visualisation non clinique des informations pour faciliter l'accompagnement du proche dans son organisation quotidienne, sans permettre de décision médicale. Le professionnel de santé invité accède, quant à lui, aux données cliniques brutes et aux résultats d'évaluations saisis par le patient. Ces données agissent comme un outil d'aide au suivi clinique, sans fournir de diagnostic automatisé. L'accès aidant se limite à la lecture des informations déclarées. Aucune fonctionnalité d'interprétation, d'analyse ou d'alerte n'est fournie.

Description

En particulier, DigiPark vise à suivre et mesurer l'intensité des symptômes et leur qualité de vie, de faciliter le suivi des prises de médicaments, la gestion de leurs rendez-vous médicaux, de suivre leurs ateliers sportifs et de remises en forme, et propose des exercices de phonation, d'articulation et de motricité adaptés.

L'application est organisée autour des fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalités “Compagnon” :

Menu pilulier : Pilulier pour mieux gérer la prise des médicaments, en déclenchant des rappels des horaires de prise des médicaments prescrits. Il offre des options pour consulter leur ordonnance, enregistrer les prises de médicaments, et visualiser l'historique. Enregistrement des périodes de sommeil et d'éveil et des activités quotidiennes.

Menu symptômes : Mesure de l'intensité des tremblements à partir de données recueillies par une smartwatch ou un smartphone, et de l'intensité de la dysarthrie à partir de données recueillies par un smartphone. Il offre la possibilité de tenir un journal quotidien des symptômes ainsi que d'évaluer et d'améliorer leur qualité de vie liée à la maladie de Parkinson en remplissant le questionnaire PDQ-8.

Menu activités : Exercices pour travailler l'articulation et la motricité, à pratiquer chez soi, ainsi qu'un suivi des activités et des rendez-vous médicaux. Il permet aussi de déclarer d'autres activités et des rendez-vous médicaux. Exercices de rééducation permettant aux patients d'exercer leur motricité

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

manuelle et leurs capacités d'élocution et de langage (exercices d'orthophonie).

Pour le patient, la solution offre la possibilité de télécharger un **rapport d'activité** et partageable. Pour l'aidant, la solution offre la possibilité de visualiser les fonctionnalités « compagnon » via une plateforme web.

Pour les professionnels de santé invités par le patient, DigiPark offre une visualisation en lecture seule des données (historique des symptômes, suivi de l'observance, évaluations cliniques). Ces données ont une finalité d'aide au suivi médical, mais l'application n'effectue aucun traitement analytique automatisé sur celles-ci ni aucune modification.

Bénéfices

DigiPark permet au patient d'enregistrer des informations déclaratives, de programmer des rappels, de consulter un journal personnel, de réaliser des tests indicatifs et d'accéder à des modules d'exercices de phonation, d'articulation et de motricité adaptés.

Utilisateurs concernés

DigiPark est conçu pour les patients adultes atteints de la maladie de Parkinson [et les aidants](#).

Patients

- Adulte âgé de 18 ans à 99 ans
- Diagnostic : Patients diagnostiqués avec la maladie de Parkinson par un professionnel de santé qualifié.
- Culture numérique : Patients capables d'utiliser un smartphone et un dispositif portable.

Aidants

- Personnes de confiance désignées par le patient, pouvant accéder par invitation à certaines données déclarées pour l'aider dans son suivi non clinique.

Professionnels de santé :

- professionnel de santé (par exemple : neurologues, médecins traitant, kinésithérapeutes, orthophonistes, infirmiers, ergothérapeutes) pouvant accéder, uniquement sur invitation explicite du patient, à une visualisation non clinique des informations déclarées.

Environnement prévu / paramètres et contexte d'utilisation

DigiPark est conçu pour être utilisé à **domicile** : les patients peuvent utiliser DigiPark dans le confort de leur domicile, ce qui facilite le suivi quotidien de leurs symptômes et de leur traitement médicamenteux.

Les professionnels de santé peuvent s'appuyer sur les données cliniques recueillies par DigiPark pour enrichir leur suivi de la maladie. Toutefois, ces données déclaratives et ces scores ne doivent pas constituer la source unique pour ajuster un traitement médicamenteux critique sans qu'un examen clinique complémentaire ne soit réalisé. DigiPark ne constitue pas un dispositif de télésurveillance

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

d'urgence.

Sensibilité au bruit : la fonction de suivi des symptômes de DigiPark repose sur la saisie de l'utilisateur ; il est donc préférable de l'utiliser dans des environnements calmes pour garantir un enregistrement précis des symptômes. Les bruits extérieurs peuvent distraire le patient ou l'empêcher d'interagir de manière optimale avec l'application.

Restrictions de mouvement : certaines fonctionnalités, telles que l'observance thérapeutique, peuvent être utilisées de manière universelle. Toutefois, le suivi des symptômes ou les exercices de rééducation ne doivent pas être effectués lors de certaines activités comme la conduite, car cela peut compromettre la sécurité de l'utilisateur.

Contre-indications d'utilisation

État de la maladie de Parkinson :

- Patients dont le diagnostic de la maladie de Parkinson n'a pas été confirmé par un neurologue.

Capacités cognitives et physiques :

- Patients présentant des troubles cognitifs importants qui les empêchent de comprendre le logiciel DigiPark ou d'interagir avec lui.
- Patients présentant des déficiences visuelles qui rendent les interactions à l'écran difficiles ou des allergies connues aux matériaux contenus dans le dispositif portable qui pourraient entraîner des réactions cutanées.

Affections cutanées :

- Patients souffrant de problèmes cutanés spécifiques qu'un contact prolongé avec les matériaux du produit portable pourrait exacerber.

Sensibilité électromagnétique :

- Patients connus pour leur sensibilité ou leurs réactions indésirables aux champs électromagnétiques, compte tenu de la nature électronique du produit portable.

Principe de fonctionnement et mode d'action

Principe de fonctionnement

DigiPark est composé de :

- **L'application mobile**
- **Serveur**
- **Documentation** comprenant les instructions d'utilisation, les documents juridiques et consentements digitalisés
- **Plateforme Web** permettant à l'aidant ou au professionnel de santé invité par le patient d'accéder à une vue simplifiée et non clinique des informations déclarées du patient et d'échanger avec le patient via une messagerie sécurisée uniquement pour des usages pratiques, sans aucune finalité médicale.

DigiPark peut être utilisé en combinaison avec un **une montre connectée** (smartwatch).

Mode d'action

	Étape d'utilisation	Type d'action
1	Installation de l'application et authentification du patient	Action réalisée par le patient
2	Enregistrement de son ordonnance et chaque prise médicamenteuse Déclaration, mesure de ses symptômes et évaluation de leurs intensités Gestion de ses rendez-vous Déclaration de ses ateliers sportifs et de remise en forme Déclaration de ses hospitalisations	Action réalisée par le patient
3	Réalisation des exercices de motricité et de langage	Action réalisée par le patient
4	Téléchargement et partage du rapport des données du patient Option aidant / paramédical : ajout d'un ou plusieurs aidants ou paramédicaux pour les inviter à consulter les données.	Action réalisée par le patient

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

5	Option aidant / paramédical : authentification de l'aidant/des aidants sur la plateforme web	Action réalisée par l'aidant ou professionnel de santé invité
6	Option aidant / paramédical : ajout du patient sur la plateforme web	Action réalisée par l'aidant ou professionnel de santé invité
7	Option aidant / paramédical : - visualisation des données cliniques brutes issues des modules compagnon, - Communication via une messagerie dédiée aux échanges pratiques entre patient et les aidants / accompagnants, - Partage entre les aidants/accompagnants du calendrier des absences (cas de plusieurs aidants / accompagnants paramédicaux)	Action réalisée par l'aidant ou professionnel de santé invité

Pré-requis

Compatibilité

Caractéristiques du réseau informatique

- Conditions minimales : connexion internet avec une latence inférieure à 150 ms et une bande passante supérieure à 100 kbps
- Recommandations : connexion internet avec une latence inférieure à 50ms et une bande passante supérieure à 1 Mbps
- Pare-feu (firewall) activé : domaines DigiPark.fr et diampark.io sur le port 443

Pour information : toutes les communications entre les applications / serveurs de DiamPark sont sécurisées en SSL/TLS port 443

Système d'exploitation (OS)

- Sur Android : OS version 7.0 ou supérieure.
- Sur iOS : OS version 14 ou supérieure.

Les systèmes d'exploitation suivants ne sont pas compatibles : Windows phone mobile et Blackberry

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

OS.

Appareils mobiles

Tous les appareils suivants sont compatibles : tous les smartphones qui supportent le BLE (Bluetooth Low Energy), avec une connectivité internet, un système d'exploitation compatible, avec une puissance de traitement et de mémoire suffisante.

Malheureusement, les appareils suivants ne peuvent pas être utilisés : ordinateurs, tablettes, téléviseurs intelligents, consoles de jeux, lecteurs de musique portables.

Produit portable en combinaison avec le dispositif médical

Modèle Smartwatch disponible sur le Store.

Qualifications & formation

Bien qu'aucune formation spécialisée ne soit exigée, les utilisateurs doivent être familiarisés avec le fonctionnement de base des appareils numériques et la navigation dans les applications.

Les patients diagnostiqués avec la maladie de Parkinson doivent posséder des connaissances de base dans l'utilisation des smartphones et des dispositifs portables

Contre-indications environnementales

- Températures ou taux d'humidité extrêmes en dehors de la plage recommandée pour les smartphones et les appareils portables ou les montres connectées, susceptibles d'affecter les performances ou la durée de vie des capteurs de mouvement.
- Utilisation du dispositif pour réaliser les tests de tremblement dans des environnements en mouvement, par exemple à l'intérieur d'un véhicule en mouvement.
- Utilisation du dispositif pour réaliser les tests de phonation dans des environnements bruyants ou perturbateurs.

Conformité



Le dispositif DigiPark est marqué CE de classe I selon le MDR 2017/745 et à ce titre autorisé comme dispositif médical.

DiamPark se conforme aux exigences des réglementations et normes applicables. En tant que fabricant de dispositifs médicaux, nous respectons et appliquons des normes très strictes dans le cadre de nos activités, depuis la conception et le développement jusqu'à la livraison de nos produits et services.

Nous garantissons également la sécurité de vos données, en conformité avec les lois et réglementations françaises et européennes. Nous sommes en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD), afin de garantir aux patients et aux professionnels de santé de conserver et d'exercer tous leurs droits sur les données personnelles. Toutes les données sont

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

stockées données hébergées auprès d'un hébergeur certifié HDS conformément à l'article L.1111-8 du Code de la santé publique avec un accès sécurisé.

Instructions de fonctionnement

Première utilisation

Authentification utilisateurs patients

Téléchargement de l'application : commencez par télécharger l'application DigiPark sur votre appareil mobile. Elle peut être téléchargée directement sur le Store.

Processus de connexion et d'inscription : si vous êtes un nouvel utilisateur, cliquez sur "Créer un nouveau compte". Entrez votre adresse email et choisissez un mot de passe sécurisé. Suivez les instructions à l'écran pour compléter le processus d'inscription.

Note : Nous utilisons le système d'authentification Auth0, un système robuste et sécurisé pour l'authentification des utilisateurs sur l'application DigiPark. Auth0 aide à assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à leur compte et aux fonctionnalités associées.

Étapes de Vérification

Activation du compte : Après avoir soumis vos informations, vous recevrez un email de confirmation à l'adresse que vous avez fournie. Cliquez sur le lien dans ce mail pour vérifier votre compte et activer votre accès à l'application. Cette étape de vérification est cruciale pour assurer la sécurité de votre compte et pour vérifier que l'adresse email que vous avez fourni est valide et vous appartient.

Récolte des consentements et documents nécessaires à l'utilisation du compte : avant le démarrage de l'utilisation de l'application, il est nécessaire que l'utilisateur accepte les Conditions Générales d'Utilisation, la politique de confidentialité et les consentements. Un refus sur l'un de documents obligatoires bloque l'accès à la solution DigiPark.

L'exercice des droits utilisateurs et retrait des consentements est possible à posteriori au sein de l'application. A noter qu'un retrait d'un consentement obligatoire / document obligatoire engendre une déconnexion de l'utilisateur, ce dernier devra à nouveau donner ses consentements s'il souhaite utiliser de nouveau DigiPark.

Avant chaque utilisation

Avant chaque utilisation de DigiPark, vérifiez les informations suivantes :

- Vérifiez que vous avez téléchargé la dernière version de l'application sur votre (vos) smartphones/montres compatibles.
- Vérifiez que vous pouvez accéder à votre compte avec votre login et votre mot de passe
- Vérifiez que le matériel est suffisamment chargé : smartphone(s)/montres connectées
- Vérifiez que l'environnement est calme, et permet d'avoir une bonne connexion Wi-Fi et qu'il n'y a pas d'interférence Bluetooth.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

A chaque utilisation

Processus de Connexion :

- Si vous avez déjà un compte, cliquez sur "Connexion" et entrez votre adresse email et votre mot de passe pour accéder à votre compte.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, suivez les instructions pour le réinitialiser

Principales étapes

	Paragraphe du manuel utilisateur
Processus de connexion, d'inscription, d'activation du compte et collecte des consentements et documents nécessaires	Instructions de fonctionnement
Gestion des médicaments et rappels des prises	Pilulier
Evaluation des symptômes	Symptômes
Exercices de rééducations et suivi des activités	Activités
Visualiser l'évolution des symptômes et des activités et partager son rapport	Menu

Support

Vous pouvez nous contacter si vous avez des informations ou des feedbacks sur l'application à nous partager, en nous écrivant dans la section "Contact" du menu, ou directement à l'adresse mail : support@diampark.io

Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion, de l'inscription ou de l'utilisation de l'application DigiPark, nous sommes là pour vous aider à l'adresse support@diampark.io. Lorsque vous nous contactez pour un problème technique, plusieurs informations doivent nous être communiquées afin de pouvoir résoudre votre problème le plus rapidement possible :

- Le nom / marque du dispositif
- Le modèle de votre tablette/téléphone/montre
- La version de votre tablette/téléphone
- La version de l'application mobile (depuis le playstore ou sur votre tablette/téléphone)
- Comment reproduire le problème

Joignez des captures d'écran, des photos ou des vidéos si possible.

Décrivez le problème de manière très précise, n'hésitez pas à agrémenter votre message de captures d'écran afin que nous puissions mieux visualiser la situation.

DigiPark est une jeune start-up qui accompagne les patients atteints de la maladie de Parkinson. Nous

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

comptons sur vous pour nous signaler tout dysfonctionnement. C'est ensemble que nous lutterons contre Parkinson.

Principaux messages d'erreur

Titre	Message d'erreur / Ce que vous voyez	Cause racine / Qu'est- ce qui est en cause ?	Comment résoudre ce problème ?
Connexion non valide avec l'application	Email or password invalid	Format invalide pour l'email et/ou le mot de passe. L'email ne correspond pas au mot de passe. Le mot de passe ne correspond pas à l'email. Il y a un espace avant et/ou après l'email. Utilisateur inexistant	Essayez de réécrire votre email et/ou votre mot de passe en vous assurant qu'ils sont dans le bon format, sans fautes d'orthographe Contactez support@diampark.io pour créer un nouvel accès.
Une page de l'application ne charge pas	Erreur interne de serveur Copier l'erreur	Le serveur distant rencontre une panne Le téléphone n'est pas connecté à internet	Vérifiez votre connexion internet, le cas échéant contactez le support en copiant votre erreur

Informations de contact

Comment exercer vos droits ?

Pour toute question relative au traitement des données par l'entreprise responsable de l'expérience, veuillez contacter le Délégué de Protection des Données de DiamPark via l'adresse mail : support@diampark.io

Pour toute question, demande ou déclaration concernant vos données personnelles, veuillez-vous référer à la politique de confidentialité de DiamPark. Elle est disponible en ligne sur l'application DigiPark. Si vous souhaitez exercer tout ou partie de vos droits utilisateurs veuillez contacter le Délégué de Protection des Données via l'adresse mail : support@diampark.io ou à l'adresse postale du Délégué de Protection des Données :

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

DiamPark

A l'attention du Délégué de Protection des Données

22, rue Guillemainot,

92370 CHAVILLE,

France

Comment signaler un incident ?

MATERIAL SAFETY : LA SÉCURITÉ DU MATÉRIEL : Tout incident ou risque d'incident grave (défini selon l'article L5212-2 du Code de la Santé Publique) détecté lors de l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant à l'adresse électronique suivante : support@diampark.io

Vous devez déclarer tout événement à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel vous êtes établi :

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_vigilance_contact_points.pdf

Comment contacter le fabricant ?

DiamPark peut être contacté aux coordonnées indiquées ci-dessous :

	DIAMPARK 22 RUE GUILLEMINOT, 92370 CHAVILLE, FRANCE E-mail : support@diampark.io Site internet : https://diampark.io/
---	---

	Date d'obtention du marquage CE : 2022-10-31
---	---

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

PARTIE II : FONCTIONNALITÉS DE DIGIPARK

La deuxième partie de ce guide d'utilisation vis à vous familiariser avec les fonctionnalités de l'application DigiPark.

Page de connexion

Après avoir téléchargé l'application sur le store, son lancement amène à la page de connexion. Lors de la première connexion, le patient peut choisir « Créer un compte » et être redirigé sur la page dédiée à la création du compte patient.

- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un compte (nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et mot de passe)

Les connexions suivantes le patient accède à son compte utilisateur en choisissant « Connexion » qui le redirige vers la page de connexion sécurisée.

- Renseignez votre adresse mail et votre mot de passe
- Un code unique de sécurité est envoyé par sms pour confirmer et sécuriser la connexion
- Rentrez le code pour valider la connexion et accéder à l'application
-



Mise en route (Onboarding)

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Lors de la première utilisation de l'application, une double section de mise en route démarre automatiquement (cette session d'onboarding peut être recommencée depuis les paramètres ; menu > paramètres > relancer la mise en route).

La première partie de l'onboarding fournit les informations sur les fonctionnalités de l'application DigiPark, les avertissements et informations réglementaires.


L'étape 3/4 permet de valider les consentements éclairés (modification ultérieure possible via le menu > Accord partage de données).

Avant l'utilisation de l'application, l'utilisateur doit :

- Accepter les Conditions Générales d'Utilisation ;
- Prendre connaissance de la Politique de Confidentialité ;
- Configurer ses consentements de partage de données.

Certains traitements de données sont indispensables au fonctionnement du dispositif médical.


L'étape 4/4 permet de choisir le pseudonyme utilisateur et le mode d'affichage Simplifié (par défaut) ou Complet (modifiable ultérieurement via le menu > paramètres > personnalisation).

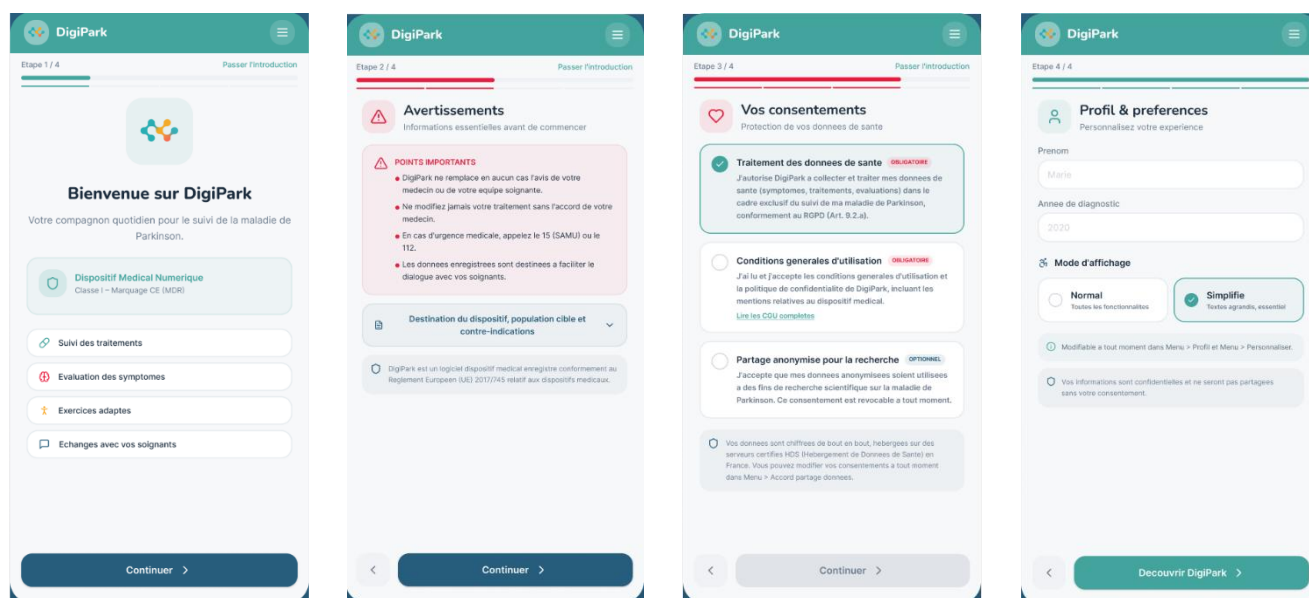

La seconde partie de l'onboarding correspond à une visite guidée de l'application (cette session peut être passée et recommencée depuis les paramètres ; menu > paramètres > relancer la mise en route). Cette visite guidée présente la page d'accueil, les fonctionnalités principales, le menus de navigation, les actions rapides et les fonctionnalités premium.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

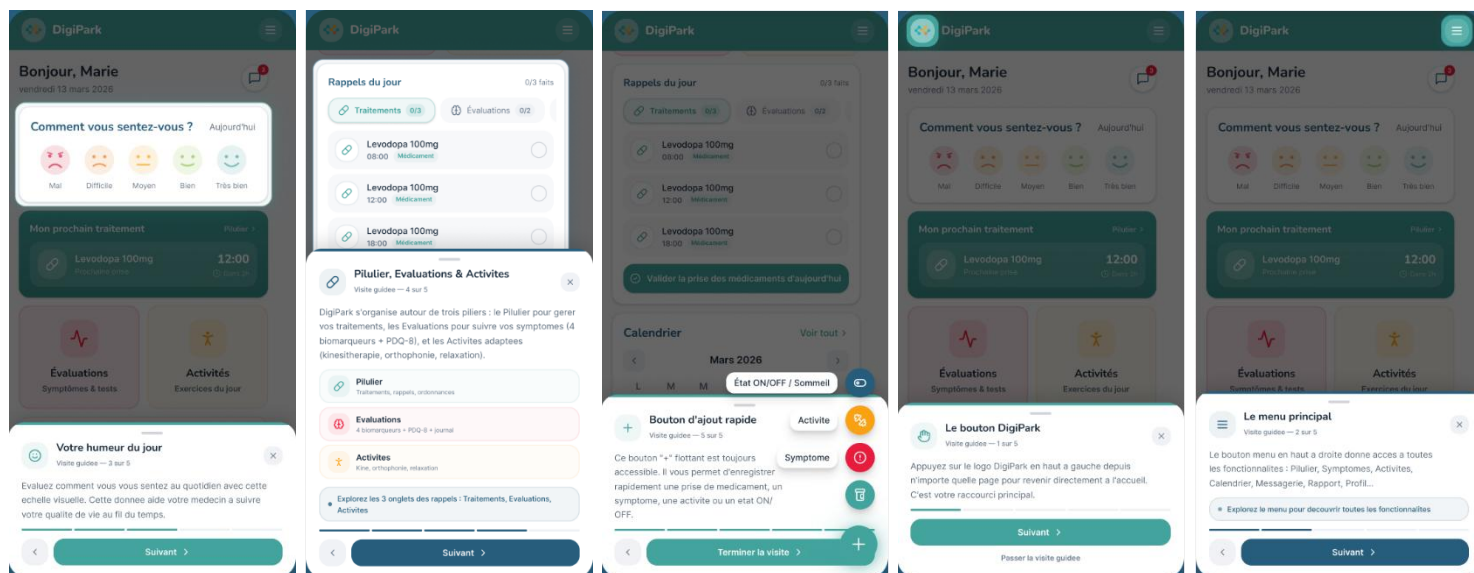


Page d'accueil (Homepage)

La page d'accueil est l'espace de pilotage de l'application DigiPark. Cette page centrale présente de manière claire et intuitive les principales fonctionnalités de l'application.

En haut gauche se trouve le « **logo DigiPark** »  qui correspond à un bouton ramenant à la page d'accueil depuis toutes les écrans de l'application

La page d'accueil permet *[pour le mode visuel simplifié]*

- d'accéder à l'échelle d'évaluation de l'humeur (EVA dont le suivi sera retrouvé dans le rapport de synthèse)
- d'accéder rapidement au rappel du prochain traitement à prendre
 - de visualiser rapidement les rappels du jour (pilulier, évaluations, activités)
 - d'avoir un accès rapide aux fonctionnalités de DigiPark (Suivi des symptômes, Activités)
 - d'observer instantanément le calendrier

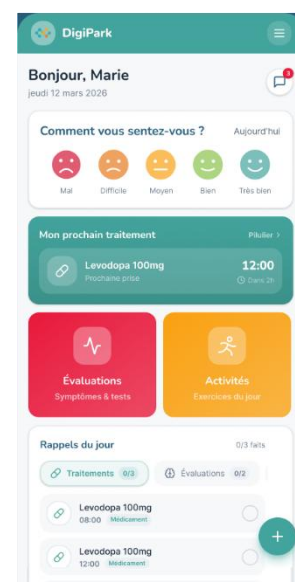


Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark


La page d'accueil permet [pour le mode visuel complet]

- d'accéder à l'échelle d'évaluation de l'humeur (EVA, dont le suivi sera retrouvé dans le rapport de synthèse)
- d'accéder rapidement au rappel du prochain traitement à prendre
- de consulter les rappels du jour
- de visualiser le programme personnalisé et le niveau d'atteinte des objectifs
- d'avoir un accès rapide aux fonctionnalités de DigiPark (Suivi des symptômes, Activités)
- de visualiser le graphique de la synthèse quotidienne
- d'accéder à la connexion avec la smartwatch [optionnel]
- de visualiser les notifications de la messagerie et accéder à la fonction [fonctionnalité premium]
- de consulter instantanément le récapitulatif de la journée
- de visualiser clairement le calendrier

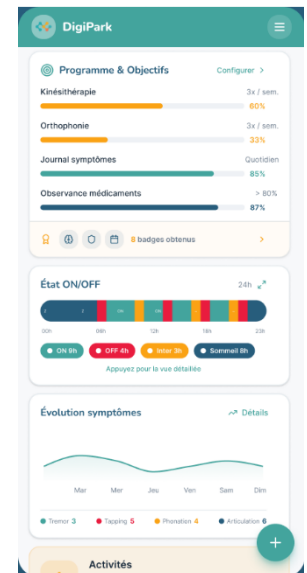

Un bouton d'action rapide « + » permet :

- d'ajouter une prise médicamenteuse ;
- d'ajouter un symptôme manuellement au journal ;
- d'ajouter une activité manuellement au journal ;
- de signaler un état ON/OFF ;

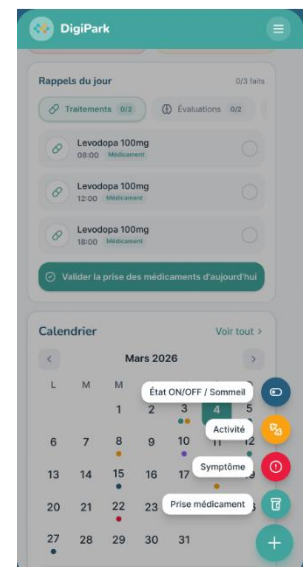

Copyright © 2023 DigiPark


Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Menu

Le menu de l'application est accessible via un bouton «  » qui se situe en haut à droite de l'écran.

Le menu permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités, profil, paramètres et informations réglementaires de DigiPark.

En bas du menu se retrouve le **code utilisateur unique** ainsi que le moyen de **déconnexion**.

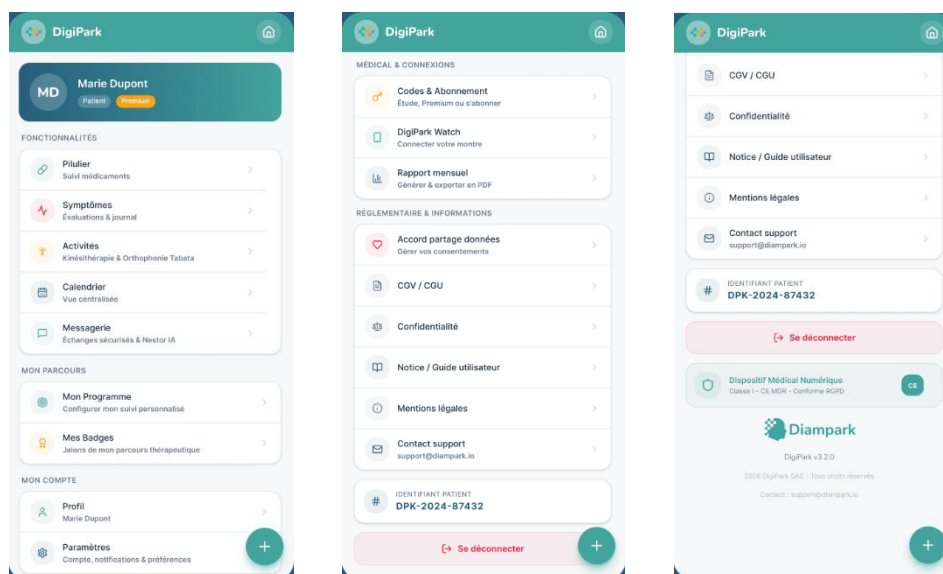

Pilulier digital

Le Pilulier digital a pour objectif de vous accompagner au quotidien pour faciliter le suivi de votre traitement médicamenteux. Il s'articule autour de 3 onglets vous permettant de : renseigner vos prescriptions en cours, valider vos prises chaque jour, et consulter l'historique de votre observance. Les données recueillies alimentent automatiquement votre rapport de synthèse (accessible via **Menu > Rapport**).




Avertissement : L'application est un outil d'accompagnement. Elle ne se substitue en aucun cas à l'avis de votre médecin, ni à votre ordonnance papier qui demeure l'unique document médical de référence. Bien que nous appliquions les normes les plus strictes pour la sécurité et la sauvegarde de vos données de santé, des aléas techniques (ex: coupure réseau, panne de téléphone) peuvent survenir. En cas de doute sur une prise médicamenteuse, référez-vous toujours à votre ordonnance originale.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Si vous constatez un dysfonctionnement de l'application ou une anomalie dans l'affichage de vos données, contactez immédiatement notre support technique à l'adresse support@diampark.io. Votre retour nous aide à garantir la sécurité et l'amélioration continue de l'application.

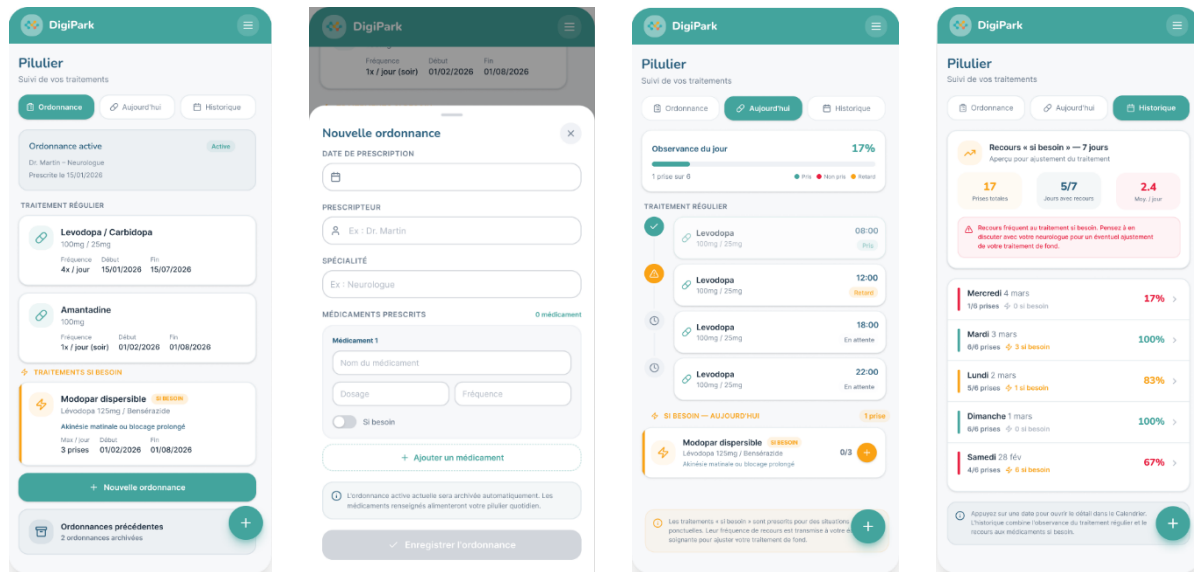

Ordonnance

Cet onglet est le cœur de votre Pilulier digital. Il vous permet de configurer vos prescriptions afin de recevoir des notifications de rappel (alarmes) au bon moment.

Présentation de l'écran :

- **En haut de page** : Un encart indique le nom de votre médecin prescripteur et la date de l'ordonnance active. Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur l'icône « Stylo ».
- **Le détail de l'ordonnance** : Il est divisé en deux parties : le « **Traitement régulier** » (pris à heures fixes) et le traitement « **Si Besoin** » (pris en cas de nécessité, comme les périodes de "blocage").
- **Chaque médicament indique** : le nom de la molécule, le dosage, la quantité prescrite, ainsi que la fréquence et les heures de prise.
- **En bas de page** : Vous retrouverez l'historique de vos anciennes ordonnances (date, médecin, nombre de médicaments).

Ajouter une ordonnance :

1. Cliquez sur le bouton « **+ Nouvelle ordonnance** ».
2. Sélectionnez la **date de début** de votre prescription.
3. Renseignez le nom de votre médecin prescripteur et sa spécialité.
4. Cliquez sur « **+ Ajouter un médicament** ».
5. Dans le champ de recherche, tapez le nom du médicament. Sélectionnez la molécule

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

correspondante dans la liste proposée (*Attention : vérifiez scrupuleusement le nom et le dosage*).

6. Indiquez la **quantité** à prendre par prise (ex: 1 gélule).
7. Choisissez le **type de prise** :
 - « **Heure fixe** » : précisez l'heure exacte.
 - « **Intervalle** » : indiquez l'heure de la première prise et l'espacement en heures (ex: toutes les 4h).
 - « **Si besoin** » : cochez cette option si le médicament n'a pas d'heure fixe.*Cas particulier « Pompe »* : Si vous sélectionnez un médicament administré par pompe continue, l'application activera automatiquement un mode dédié. Vous pourrez alors renseigner vos débits et vos plages horaires.
8. Pour ajouter d'autres médicaments, répétez l'opération en cliquant sur « **+ Ajouter un médicament** ». *Pour supprimer une erreur, utilisez l'icône **Corbeille** en haut à droite de la case du médicament.*
9. **Vérification cruciale** : Prenez le temps de comparer les données saisies avec votre ordonnance papier.
10. Cliquez sur « **Enregistrer l'ordonnance** » pour valider. *Note : Vos rappels sont désormais programmés et vous recevrez une notification sur votre téléphone à chaque heure de prise.*

Aujourd'hui

Cet section permet au patient de suivre la bonne conduite de son traitement médicamenteux. Plusieurs indications sont disponibles :

- **Score du jour** : En haut de l'écran, un pourcentage reflète votre observance (le suivi) pour la journée en cours. Un score de 100 % signifie que vous avez validé toutes vos prises régulières programmées.
- **Traitement régulier** : La liste de vos médicaments du jour s'affiche par ordre chronologique. Pour chaque médicament, vous voyez son état actuel : *Pris*, *En retard*, ou *Oublié*. C'est ici que vous validez chaque prise au moment où vous l'effectuez.
- **Traitement « Si besoin »** : Située en bas de page, cette section regroupe vos médicaments d'appoint. Pour enregistrer une prise "Si besoin", appuyez sur le bouton « **+** » (ou l'icône de validation « **v** »). L'heure de la prise s'enregistrera automatiquement.

Historique

Cet écran vous offre une vue d'ensemble de votre suivi, jour par jour.

- **Vue globale** : Vous y trouvez votre score d'observance quotidien en pourcentage, le ratio des médicaments pris par rapport aux médicaments prescrits, ainsi que le nombre de médicaments « Si besoin » consommés.
- **Vue détaillée** : En sélectionnant une journée spécifique, vous accédez au détail des médicaments pris, avec l'heure exacte de validation (ou l'indication d'oubli).

Correction des données : En cas d'erreur de saisie de votre part, il vous est possible de modifier manuellement chaque entrée passée (ajustement de la quantité, de la date ou de l'heure).

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark


Suivi symptômes

Cette fonction permet d'effectuer des tests grâce à des biomarqueurs digitaux et échelles pour évaluer un symptôme. Dans cette section, il est aussi possible de remplir, manuellement, un journal des symptômes pour vous permettre de fournir des informations précises sans crainte d'en oublier le jour de la consultation. Les données recueillies lors de vos tests sont compilées dans le rapport de synthèse (Menu > Rapport).

 **Avertissement :** *L'application est un outil d'accompagnement. Elle ne se substitue en aucun cas à l'avis de votre médecin, ni à votre ordonnance papier qui demeure l'unique document médical de référence. Bien que nous appliquions les normes les plus strictes pour la sécurité et la sauvegarde de vos données de santé, des aléas techniques (ex: coupure réseau, panne de téléphone) peuvent survenir. En cas de doute sur une prise médicamenteuse, référez-vous toujours à votre ordonnance originale. Si vous constatez un dysfonctionnement de l'application ou une anomalie dans l'affichage de vos données, contactez immédiatement notre support technique à l'adresse support@diampark.io. Votre retour nous aide à garantir la sécurité et l'amélioration continue de l'application.*

Évaluations

Cet onglet contient la liste (avec accès) de l'ensemble des biomarqueurs digitaux et échelles d'évaluation.

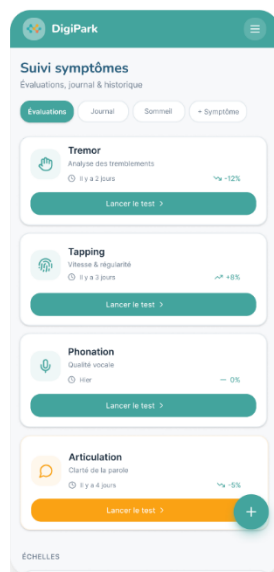

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Biomarqueur : Tremblements (Tremor)

L'outil Tremblement permet d'évaluer l'importance des tremblements de chacune de vos mains / bras en quelques secondes.

Ce test vise à évaluer les tremblements au niveau des bras, en utilisant les capteurs du téléphone. Lorsque l'on vous l'indique, prenez votre téléphone dans votre main gauche et tendez le bras jusqu'à ce que la jauge soit pleine. Une fois la mesure prise, répétez l'opération avec votre bras droit.

Veillez à réaliser cette mesure dans un lieu stable afin de ne pas fausser le résultat. Si vous réalisez ce test en ayant des symptômes forts, veuillez les ajouter à votre suivi grâce à l'onglet '+ symptôme'.



Avertissement : L'application est un outil d'accompagnement. Elle ne se substitue en aucun cas à l'avis de votre médecin, ni à votre ordonnance papier qui demeure l'unique document médical de référence. Bien que nous appliquions les normes les plus strictes pour la sécurité et la sauvegarde de vos données de santé, des aléas techniques (ex: coupure réseau, panne de téléphone) peuvent survenir. En cas de doute sur une prise médicamenteuse, référez-vous toujours à votre ordonnance originale.

Si vous constatez un dysfonctionnement de l'application ou une anomalie dans l'affichage de vos données, contactez immédiatement notre support technique à l'adresse support@diampark.io. Votre retour nous aide à garantir la sécurité et l'amélioration continue de l'application.

Comment ça marche?

1. Rendez-vous dans l'onglet « Evaluations » et appuyez sur le bouton « Tremor ».
2. Cliquez sur « Commencer ».
3. Indiquez votre niveau ressenti du moment (de 0 à 4) puis cliquez sur « Commencer le test ».
4. Prenez votre téléphone dans votre main gauche et tendez le bras et cliquez sur « Commencer ».
5. L'application enregistre les tremblements.
6. Au signal, changez de bras et répétez l'opération.
7. L'application vous donne une information sur l'intensité de vos tremblements. Le suivi de cette mesure sera disponible dans le [Rapport de synthèse]



Biomarqueur : Tapping

L'outil **Tapping** (en référence au Test du Doigt Parkinson) permet d'évaluer l'importance du ralentissement des mouvements volontaires.

L'objectif de ce test est d'observer la vitesse, l'amplitude et la régularité des mouvements.

Lorsque l'on vous l'indique, posez votre téléphone, écran vers le haut et tapotez sur le cercle qui s'affiche à l'écran.

Veillez à réaliser cette mesure dans un lieu stable afin de ne pas fausser le résultat. Si vous réalisez ce test en ayant des symptômes forts, veuillez les ajouter à votre suivi grâce à l'onglet "+ symptôme".

 **Avertissement :** *L'application est un outil d'accompagnement. Elle ne se substitue en*

Copyright © 2023 DigiPark


Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

aucun cas à l'avis de votre médecin, ni à votre ordonnance papier qui demeure l'unique document médical de référence. Bien que nous appliquions les normes les plus strictes pour la sécurité et la sauvegarde de vos données de santé, des aléas techniques (ex: coupure réseau, panne de téléphone) peuvent survenir. En cas de doute sur une prise médicamenteuse, référez-vous toujours à votre ordonnance originale.

Si vous constatez un dysfonctionnement de l'application ou une anomalie dans l'affichage de vos données, contactez immédiatement notre support technique à l'adresse support@diampark.io. Votre retour nous aide à garantir la sécurité et l'amélioration continue de l'application.

Comment ça marche?

1. Rendez-vous dans l'onglet « Evaluations » et appuyez sur le bouton « Tapping ».
2. Cliquez sur « Commencer ».
3. Indiquez votre niveau ressenti du moment (de 0 à 4) puis cliquez sur « Commencer le test ».
4. Posez votre téléphone à plat, écran vers le haut, prenez connaissance des instructions et cliquez sur « Commencer ».
5. Le test commence dès le premier tapotement.
6. L'application vous donne le résultat (nombre de frappes sur la durée). Le suivi de cette mesure sera disponible dans le [Rapport de synthèse]

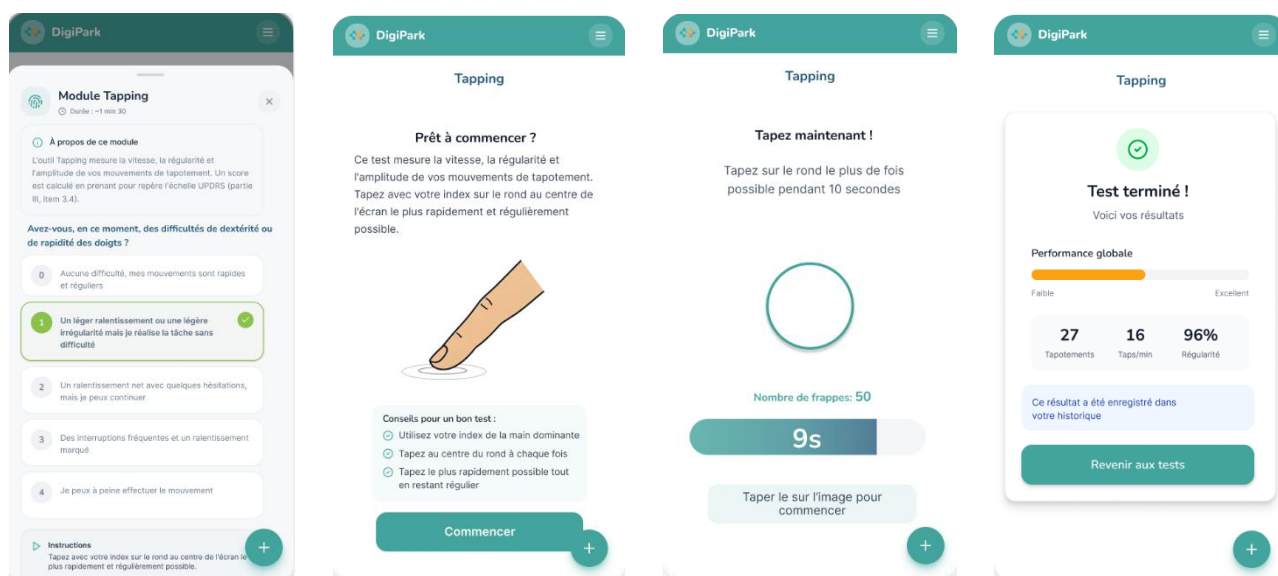

Biomarqueur : Phonation

Le test de **phonation** permet d'évaluer la stabilité de votre voix en quelques secondes. Lorsque

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

l'enregistrement commence, prononcer la syllabe "aaa", pendant le temps de la mesure, de la manière la plus stable possible.

Veillez à réaliser cette mesure dans un lieu stable afin de ne pas fausser le résultat. Si vous réalisez ce test en ayant des symptômes forts, veuillez les ajouter à votre suivi grâce à l'onglet "+ symptôme".




Avertissement : L'application est un outil d'accompagnement. Elle ne se substitue en aucun cas à l'avis de votre médecin, ni à votre ordonnance papier qui demeure l'unique document médical de référence. Bien que nous appliquions les normes les plus strictes pour la sécurité et la sauvegarde de vos données de santé, des aléas techniques (ex: coupure réseau, panne de téléphone) peuvent survenir. En cas de doute sur une prise médicamenteuse, référez-vous toujours à votre ordonnance originale.

Si vous constatez un dysfonctionnement de l'application ou une anomalie dans l'affichage de vos données, contactez immédiatement notre support technique à l'adresse support@diampark.io. Votre retour nous aide à garantir la sécurité et l'amélioration continue de l'application.

Comment ça marche ?

Rendez-vous dans l'onglet Mes symptômes :

1. Cliquez sur le bouton « Phonation ».
2. Indiquez votre niveau ressenti du moment (de 0 à 4) puis cliquez sur « Commencer le test ».
3. Cliquez sur « Commencer » et dites « AAA » au moment où l'écran affiche « enregistrement en cours ».
7. A la fin du rebours, le résultat du test s'affiche automatiquement. Le suivi de cette mesure sera disponible dans le [Rapport de synthèse]

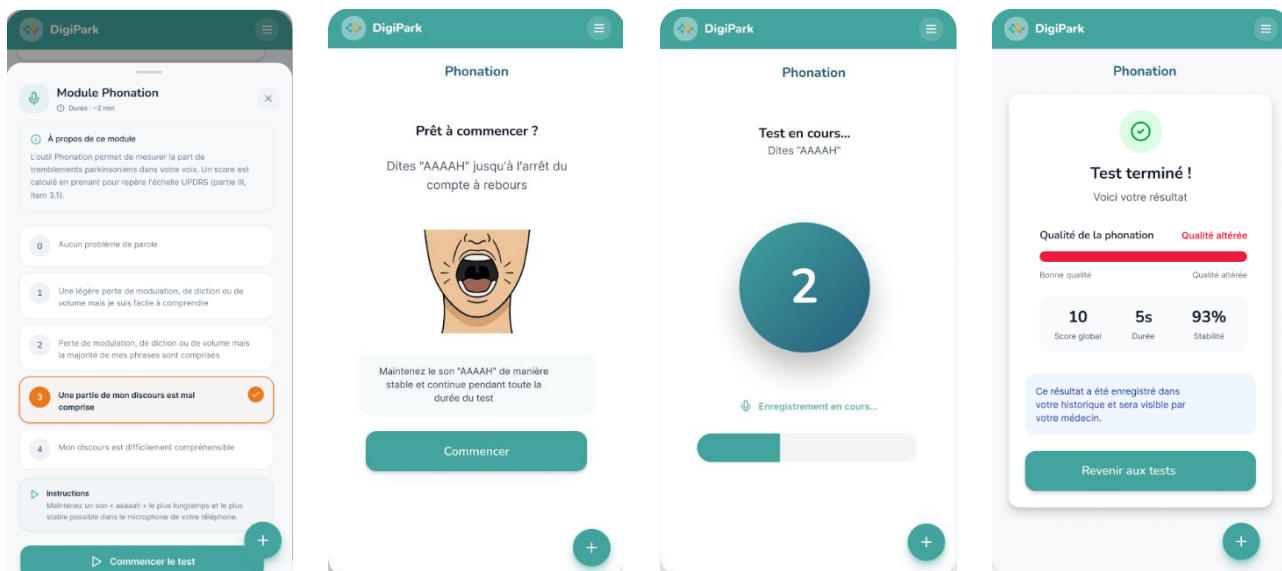

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Biomarqueur : Articulation


Le module **Articulation** est un mode de test ET une activité de rééducation. Le patient prononce une liste de mots et l'application affiche ce qu'elle entend. Le patient test et travaille ainsi la précision de son articulation.

Le patient prononce une liste de mots et l'application affiche ce qu'elle entend. Le patient travaille ainsi la précision de son articulation.

 **Avertissement :** *L'application est un outil d'accompagnement. Elle ne se substitue en aucun cas à l'avis de votre médecin, ni à votre ordonnance papier qui demeure l'unique document médical de référence. Bien que nous appliquions les normes les plus strictes pour la sécurité et la sauvegarde de vos données de santé, des aléas techniques (ex: coupure réseau, panne de téléphone) peuvent survenir. En cas de doute sur une prise médicamenteuse, référez-vous toujours à votre ordonnance originale. Si vous constatez un dysfonctionnement de l'application ou une anomalie dans l'affichage de vos données, contactez immédiatement notre support technique à l'adresse support@diampark.io. Votre retour nous aide à garantir la sécurité et l'amélioration continue de l'application.*

Comment ça marche ?

1. Appuyez sur le bouton « Articulation ».
2. Indiquez votre niveau ressenti du moment (de 0 à 4) puis cliquez sur « Commencer le test ».
3. Répétez les mots affichés à voix haute.
4. Lorsque la prononciation est bonne, le mot s'inscrit en vert et passe au suivant automatiquement.
5. Lorsque le mot n'est pas reconnu, le mot compris par le téléphone s'affiche en rouge.
6. Au bout de 3 essais, vous pouvez passer au mot suivant.
7. Répétez le plus de mots possible.
8. A la fin du module, le résultat s'affiche automatiquement. Le suivi de cette mesure sera disponible dans le [Rapport de synthèse]

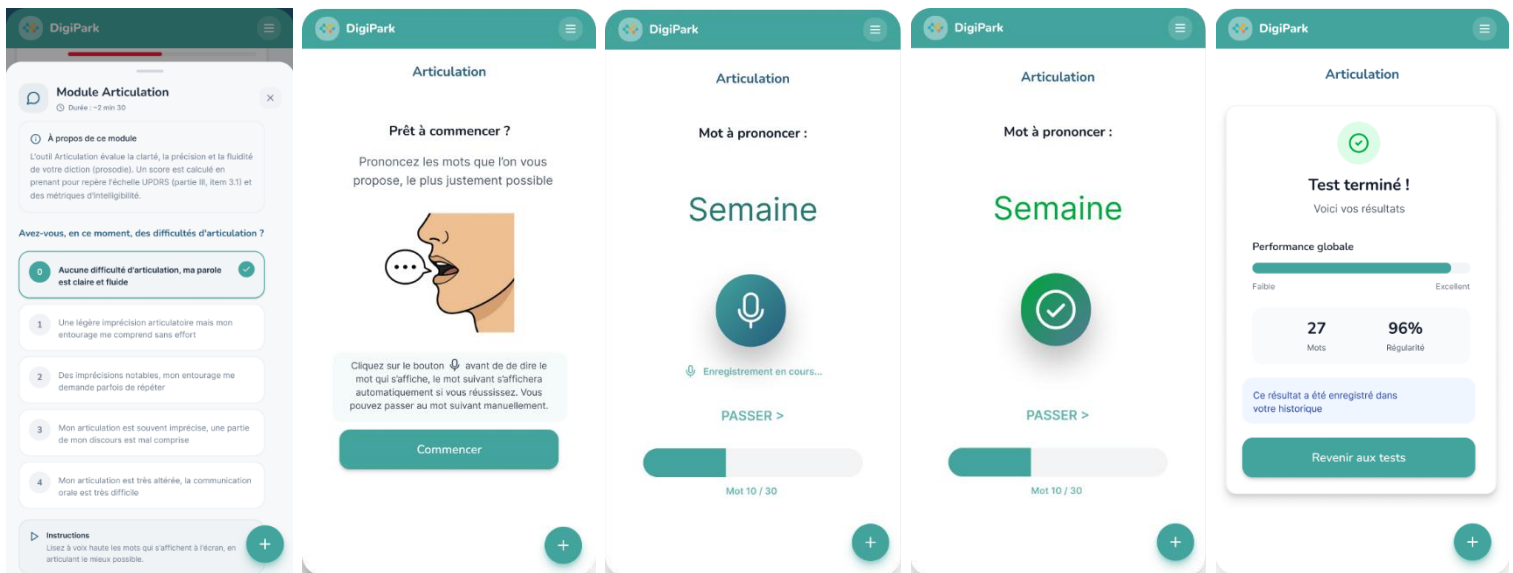

Echelle : PDQ-8 (Qualité de vie)

Ce module est un auto-questionnaire. La PDQ-8 est la version abrégée, représentative de la PDQ-39. Cette échelle permet d'évaluer l'impact de la maladie sur la qualité de vie.

Le questionnaire comprend 8 questions officielles du PDQ-8. Pour chaque question, vous devrez sélectionner une réponse basée sur une échelle de score allant de 0 à 4.


Le patient répond aux questions et l'application donne le score en fin de questionnaire et enregistre le résultat pour établir un suivi visible dans le rapport.

Comment ça marche ?

1. Appuyez sur le bouton « Remplir le questionnaire ».
2. Prenez connaissance des instructions et répondez aux 8 questions.
3. Lorsque vous avez répondu à toutes les questions vous pouvez valider vos réponses en cliquant sur « Voir mon score ».
4. Le suivi de cette mesure sera disponible dans le [Rapport de synthèse]

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

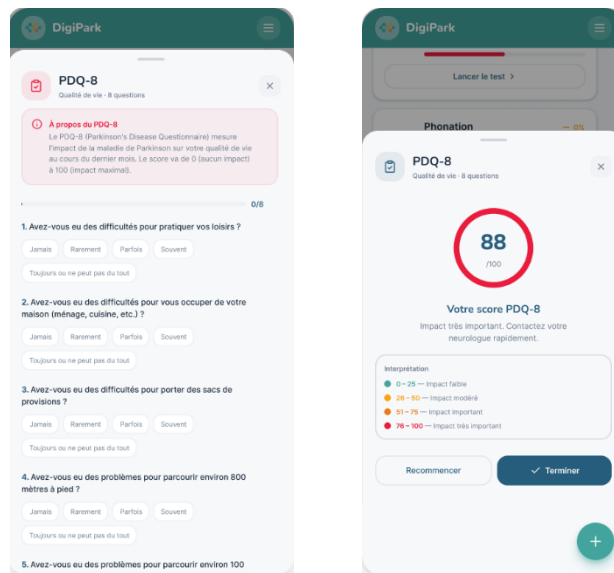

Journal & + Symptomes

DigiPark permet de recueillir des données afin de mieux connaître la maladie pour pouvoir mieux la combattre.

Cet onglet permet de consulter de manière simple et factuelle, le suivi et l'évolution des symptômes (renseignés manuellement et/ou captés via la montre connectée optionnelle). Ainsi, l'historisation des informations permet de compléter les informations qui sont compilées dans le Rapport de synthèse.

Le patient peut se référer à ce journal pour parler de ses symptômes avec ses soignants et neurologue.

L'un des aspects essentiels de notre application réside dans la gestion de l'évolution des symptômes des patients. Pour ce faire, l'appareil enregistre les données pertinentes et rend compte de la progression des symptômes au fil du temps, offrant ainsi une vision détaillée de la santé neurologique des patients.

Il est possible de déclarer d'autres symptômes au besoin, issus de l'échelle UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) servant de mesure pour quantifier la progression de la maladie de Parkinson. Elle est composite et est en réalité organisée en six sections utilisables séparément.

Catégorie	Symptôme	Description
-----------	----------	-------------

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Expérience non motrice de la vie quotidienne	Troubles cognitifs : Ralentissement cognitif, altération du raisonnement, perte de mémoire, déficit de l'attention et de l'orientation	Avez vous eu des problèmes pour vous rappeler des choses, pour suivre une conversation, pour fixer votre attention, pour avoir des pensées claires ou pour trouver votre chemin dans la maison ou en ville ?
	Hallucinations et psychose	Avez vous vu, entendu, senti ou ressenti des choses qui n'existaient pas réellement ?
	Humeur dépressive	Vous êtes-vous senti(e) sans ressort, triste, désespéré(e) ou incapable d'apprécier les choses ? Si oui, ce sentiment durait-il plus d'un jour à la fois ? Rendait-il difficile pour vous le fait de mener vos activités habituelles et d'être avec les autres ?
	État anxieux	Vous êtes-vous senti(e) nerveux, inquiet ou tendu(e) ? Si oui, ce sentiment durait-il plus d'un jour à la fois ? Est ce que cela a constitué pour vous une difficulté pour suivre vos activités habituelles ou pour être avec d'autres personnes ?
	Apathie (indifférence)	Vous êtes vous senti(e) indifférent à faire des activités ou à être avec des gens ?
	Signes de syndrome de dysrégulation dopaminergique	Avez-vous ressenti(e) des fortes pulsions inhabituelles que vous avez eu du mal à contrôler ? Vous sentez-vous poussé(e) à faire ou à penser à des choses et éprouvez-vous de la difficulté à les arrêter ?
	Problèmes de sommeil	Avez-vous rencontré des problèmes pour vous endormir la nuit ou pour rester endormi pendant la nuit ? Prenez en compte la façon dont vous vous êtes senti(e) reposé(e) après vous être réveillé(e) ?
	Somnolence	Avez-vous rencontré des problèmes pour rester éveillé(e) pendant la journée ?
Expérience non motrice de la vie quotidienne	Douleurs, crampes, fourmillement, courbatures	Avez-vous eu des sensations inconfortables dans votre corps telles que des douleurs, courbatures, fourmillements ou crampes ?
	Problèmes urinaires	Avez-vous eu des difficultés à contrôler vos urines ? Par exemple, besoin urgent d'uriner, besoin d'uriner trop souvent ou accidents urinaires.
	Problèmes de constipation	Avez-vous eu des problèmes de constipation entraînant des difficultés pour aller à la selle ?


	Sensation de vertiges, tête vide, évanouissement au lever	Avez-vous eu une sensation d'évanouissement, de vertige, de brouillard lorsque vous vous levez d'une position assise ou couchée ?
	Fatigue	Vous êtes-vous senti(e) inhabituellement fatigué(e) ? Ce sentiment ne fait pas partie du fait d'avoir sommeil ou d'être triste
<i>Catégorie</i>	<i>Symptôme</i>	<i>Description</i>
Aspects moteurs des expériences de la vie quotidienne	Trouble de la parole et de l'élocution	Avez-vous eu des problèmes avec votre élocution ?
	Salivation et le fait de baver	Avez-vous eu trop de salives pendant que vous étiez éveillé(e) ou quand vous dormiez ?
	Mastication et troubles de la déglutition	Avez-vous eu habituellement des problèmes en avalant des comprimés ou en prenant votre repas ? Avez-vous eu besoin de couper ou d'écraser vos comprimés, ou que vos repas soient écrasés, hachés ou mixés pour éviter de vous étouffer ?
	Difficultés à s'alimenter	Au cours de la semaine précédente, avez-vous habituellement eu des problèmes à manipuler votre nourriture et à utiliser des couverts ? Par exemple, avez-vous eu des problèmes à manger des aliments qu'on mange avec les doigts ou à utiliser des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des baguettes ?
	Difficultés à l'habillage	Avez-vous eu habituellement des problèmes pour vous habiller ? Par exemple, êtes-vous lent(e) ou avez-vous besoin d'aide pour vous boutonner, pour utiliser des fermetures éclair, pour mettre ou enlever vos vêtements ou vos bijoux ?
	Difficultés à se laver, se raser, se brosser les dents (hygiène)	Avez-vous été habituellement lent ou avez-vous eu besoin d'aide pour vous laver, prendre un bain, vous raser, vous brosser les dents, vous peigner ou avec tout autre soin d'hygiène personnelle ?
	Difficultés à l'écriture	Avez-vous des problèmes à lire votre écriture ?
	Problèmes dans les activités et passe-temps	Avez-vous habituellement rencontré des problèmes dans vos passe-temps favoris ou dans d'autres choses que vous aimez faire ?
	Difficultés à se tourner dans son lit	Avez-vous eu habituellement des problèmes pour vous tourner dans le lit ?
	Difficultés à se faire comprendre	On me demande souvent de répéter ce que je dis

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

	Cauchemars, hallucinations, rêves perturbants	Je dors mal et je me sens fatigué le matin
	Mouvements anormaux involontaires	Je me réveille plusieurs fois par nuit
	Tremblements	Avez-vous eu habituellement des tremblements ?
	Difficultés à sortir du lit, d'une voiture ou d'un siège profond	Avez-vous eu habituellement des problèmes pour sortir du lit, d'un siège de voiture ou d'un siège profond ?
	Difficultés à marcher	Avez-vous eu des problèmes d'équilibre et de marche ?
	Blocage pendant la marche	Quand vous marchez, vous arrêtez-vous soudainement ou vous bloquez vous comme si vos pieds restaient collés au sol ?

<i>Catégorie</i>	<i>Symptôme</i>	<i>Description</i>
Évaluation globale	Off	Je suis off
	On	Je suis on
Autres symptômes spécifiques de la maladie de Parkinson	Mouvements involontaires (dyskinésies)	Mouvements involontaires (dyskinésies)
	Cauchemars et mouvements Involontaires (REM Sleep behavior disorders)	S'il vous arrive pendant votre sommeil de crier, de vous agiter, donner des coups de poings ou de pieds, avoir des cauchemars.
	Trouble de l'odorat (anosmie)	Trouble de l'odorat (anosmie)

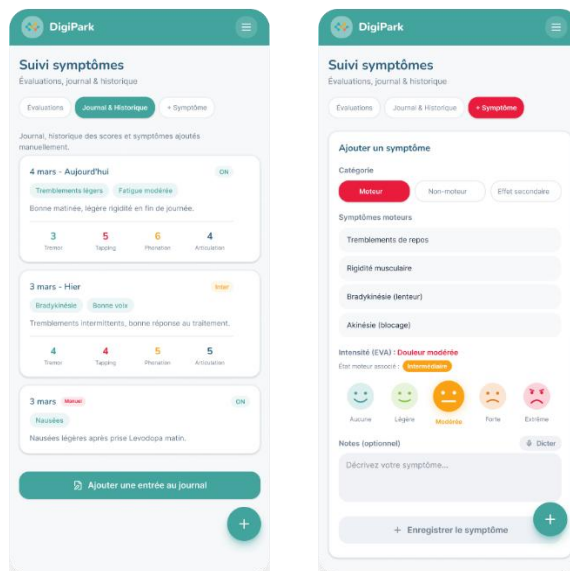


Sommeil

Cet onglet permet de renseigner des données sur le sommeil afin d'en obtenir un suivi et une analyse.

Le patient renseigne son heure habituelle de coucher et son heure habituelle de levée. Il peut modifier à tout moment ces informations. De plus, l'application ajustera automatiquement les informations de suivi du sommeil, en cas d'interaction et d'actions sur le smartphone.

L'historique est enregistré et disponible dans cet onglet, à la suite de la partie de paramétrage.

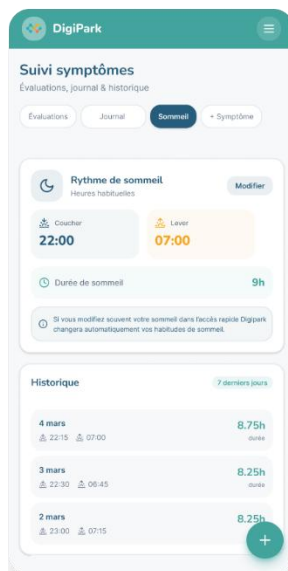

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Activités

 *Section « Premium » : seul quelques modules sont accessibles en « Free »*

Cette fonction permet de suivre des modules de rééducation (exercices guidés génériques d'entretiens) élaborés par et avec des professionnels de santé. Cette partie contient également le journal des activités qu'il est possible de compléter manuellement dans le cadre d'un suivi rigoureux de l'activité physique recommandée.


Le concept Tabata repose sur une structuration des exercices de manière à respecter une courte durée et une intensité importante.

La durée moyenne d'un module de rééducation incluse dans l'application est de 3 minutes. Vous pouvez enchaîner plusieurs modules si vous le souhaitez, avec le conseil avisé de votre médecin ou rééducateur.

Sur cet écran vous pouvez accéder aux sections : Journal, Kinésithérapie Tabata, Orthophonie Tabata

 *Avertissement : Les modules de rééducation ont été élaborés avec des professionnels de santé et la sélection des exercices guidés génériques d'entretien permet de limiter les risques. Toutefois, nous vous conseillons d'en parler avec votre médecin et/ou rééducateur (kinésithérapeute et orthophoniste) afin d'en valider l'exercice en toute sécurité en fonction de vos capacités.*

Ces exercices ne remplacent pas une prise en charge de kinésithérapie ou d'orthophonie. Bien que des tests soient régulièrement effectués dans l'application pour modérer les risques de dysfonctionnement, nous sommes conscients qu'aucun système n'est infaillible. Si vous, en tant que patient, estimez qu'une fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu, n'hésitez pas à nous écrire à support@diampark.io pour nous en informer. Votre feedback est essentiel pour nous permettre d'améliorer continuellement l'application.

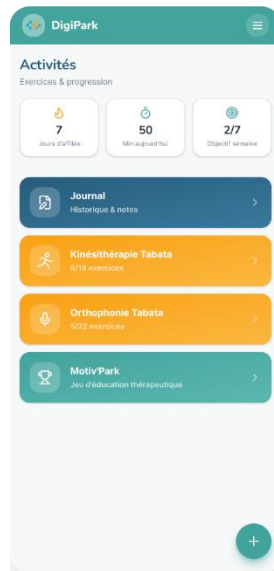

Journal

Cet onglet permet de visualiser rapidement l'historique des activités et modules de rééducations pratiquées sur une période de 1 mois (l'historique plus ancien est disponible dans le calendrier).

Vous pouvez accéder à la page « Ajouter une activité » à l'aide du bouton présent en haut du journal.


Les activités renseignées au journal seront compilées et intégrées au rapport de synthèse [*sous réserve d'un abonnement ou code premium*]

Comment ajouter une activité ?

1. Appuyez sur le bouton « Ajouter une activité ».
2. Choisissez parmi les activités proposées ou utiliser la barre de recherche pour trouver l'activité que vous avez pratiqué et cliquez.
3. Renseignez la date et la durée de l'activité. Vous pouvez utiliser les durées pré-remplies ou ajuster à l'aide au curseur disponible juste en dessous.
4. Vous pouvez ajouter une note (par exemple votre ressenti, les conditions d'exécution etc...) [optionnel]
5. Enfin, valider votre entrée en cliquant sur « Enregistrer l'activité »

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

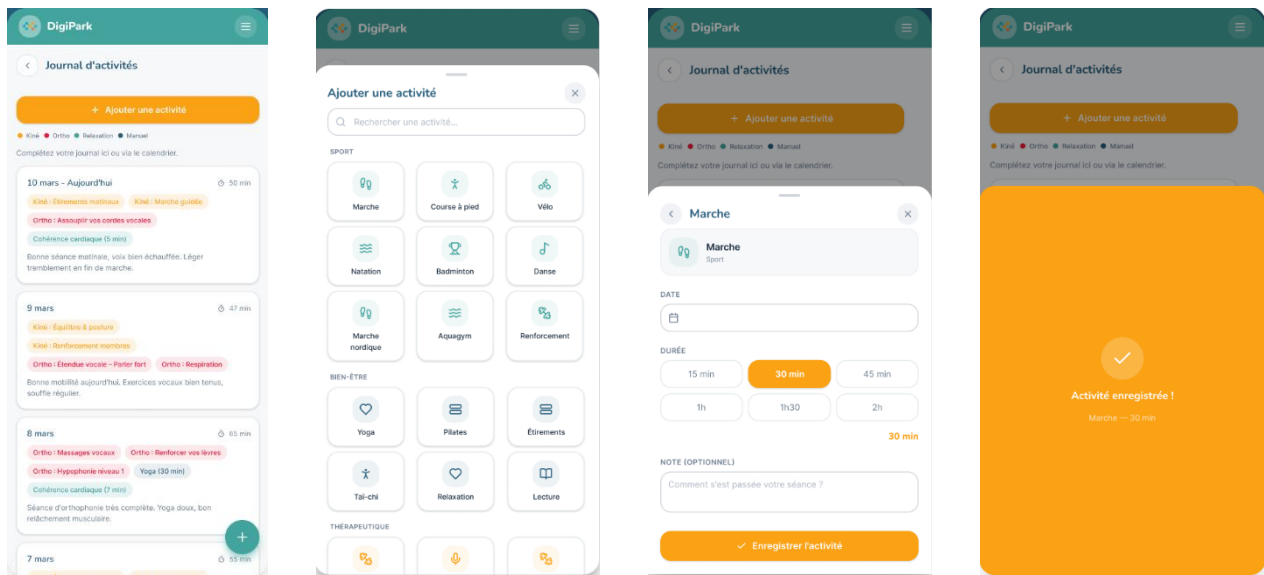

Kinésithérapie Tabata

Cet onglet contient l'ensemble des modules de kinésithérapie Tabata.

Vous pouvez sélectionner des favoris en cliquant sur bouton «  » présente après chaque titre de module (l'étoile orange signifie que le module est en favoris).
Des indications sur l'écran vous permettent de savoir quand un module a été réalisé pour la dernière fois.

Les exercices de kinésithérapie sont un ensemble de modules appelés Tabata, disponibles dans l'application DigiPark. Ces modules visent à aider les patients atteints de la maladie de Parkinson à améliorer leur force musculaire, leur coordination, leur équilibre et à gérer leurs tremblements.

Chaque module Tabata kinésithérapie est composé de plusieurs exercices, avec des durées et des temps de repos spécifiques. Les exercices sont adaptés à différents niveaux de difficulté et peuvent être personnalisés en fonction des capacités de chaque patient.

Comment réaliser une activité ?

1. Appuyez sur le bouton «  ».
2. Prenez connaissance des instructions, objectifs et précisions sur le module (matériel nécessaire, objectif, durée du module et nombre d'exercices)
3. Cliquez sur le bouton « C'est parti »



Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

4. Les consignes de l'exercice sont alors énoncées et inscrites à l'écran. Prenez en connaissance. La phase d'exécution démarre automatiquement avec un compte à rebours pour la réalisation, et ainsi de suite jusqu'à la fin du module.

A tout moment vous pouvez :

- Couper ou Activer le son à l'aide du bouton présent en haut à droite de l'écran. «  »
- Faire une pause en cliquant sur le bouton horizontal en bas de l'écran « Faire une Pause » puis reprendre en cliquant sur le même bouton affichant « Reprendre ».
- Revenir à la liste des modules d'exercices à l'aide du bouton fléché en haut à gauche.

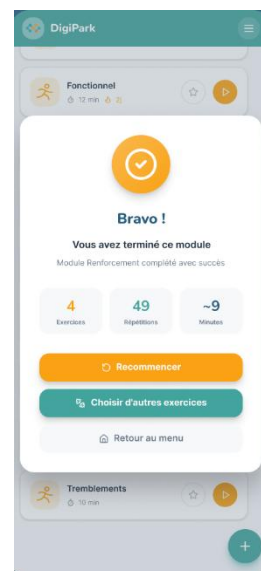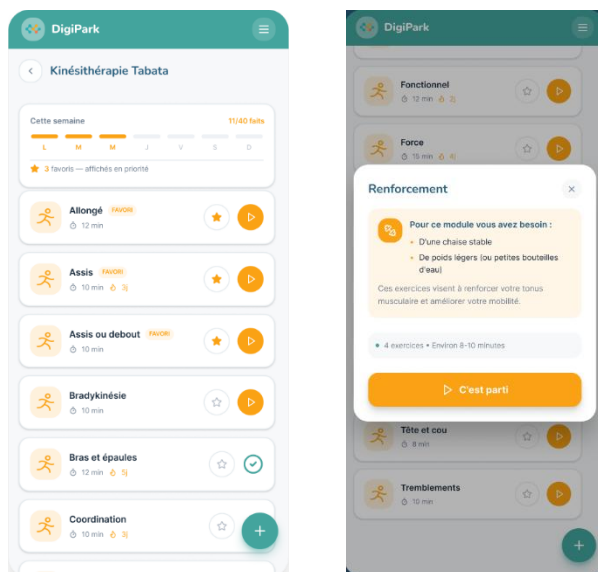

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Orthophonie Tabata

Cet onglet contient l'ensemble des modules de orthophonie Tabata.

Vous pouvez sélectionner des favoris en cliquant sur bouton «  » présente après chaque titre de module (l'étoile orange signifie que le module est en favoris).

Des indications sur l'écran vous permettent de savoir quand un module a été réalisé pour la dernière fois.

Les exercices d'orthophonie sont un ensemble de modules appelés Tabata, disponibles dans l'application DigiPark. Ces modules visent à aider les patients atteints de la maladie de Parkinson à améliorer leur capacité à articuler les mots et à contrôler leur voix.

Les différents modules comprennent l'apnée du sommeil, la déglutition, l'équilibre vocal, la langue, ainsi que la mobilité des mains et des doigts.

Chaque module Tabata est composé de plusieurs exercices, avec des durées et des temps de repos spécifiques. Les exercices sont adaptés à différents niveaux de difficulté et peuvent être personnalisés en fonction des capacités de chaque patient.

L'ensemble de ces exercices d'orthophonie a pour objectif d'entraîner la communication des patients atteints de la maladie de Parkinson.

Comment réaliser une activité ?

1. Appuyez sur le bouton «  ».
2. Prenez connaissance des instructions, objectifs et précisions sur le module (matériel nécessaire, objectif, durée du module et nombre d'exercices)
3. Cliquez sur le bouton « C'est parti »
4. Les consignes de l'exercice sont alors énoncées et inscrites à l'écran. Prenez en connaissance. La phase d'exécution démarre automatiquement avec un compte à rebours pour la réalisation, et ainsi de suite jusqu'à la fin du module.

A tout moment vous pouvez :

- Couper ou Activer le son à l'aide du bouton présent en haut à droite de l'écran. «  »
- Faire une pause en cliquant sur le bouton horizontal en bas de l'écran « Faire une Pause » puis reprendre en cliquant sur le même bouton affichant « Reprendre ».
- Revenir à la liste des modules d'exercices à l'aide du bouton fléché en haut à gauche.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark




Motiv'Park

Cet onglet affiche l'ensemble des informations relatives au sérieux game élaboré avec le Centre Expert Parkinson de la Pitié Salpêtrière en collaboration avec l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière de Paris.

Il s'agit d'un accès à ce jeu d'énigmes basé sur la maladie de parkinson et ses traitements dans une visée d'éducation thérapeutique du patient.

Il est conseillé de réaliser ce sérieux game sur un ordinateur, seul ou accompagné.

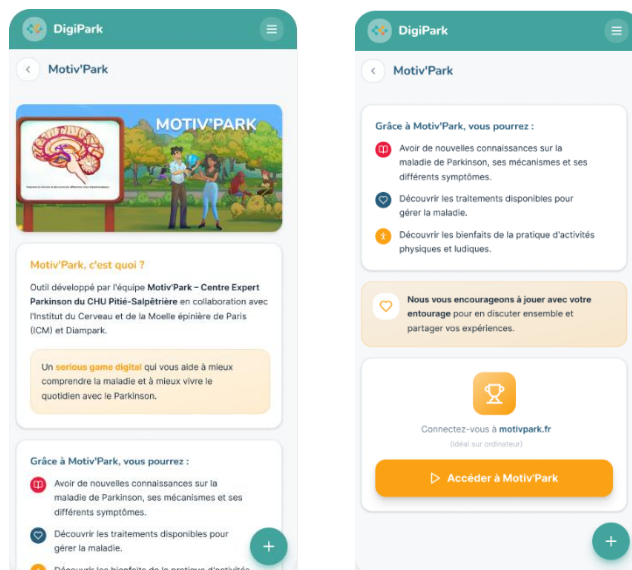

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Calendrier

Cette fonctionnalité permet de renseigner un nouveau rendez-vous ou en retrouver un passé ou prévu.


Pour faciliter et personnaliser la visualisation, il est possible de passer d'une vue *Mois* à une vue *Semaine*

Une légende du code couleur, en dessous du calendrier, permet de préciser la nature de l'évènement noté d'un point coloré sur le calendrier.

Lorsque l'on clique sur une date précise, elle s'affiche en vert DigiPark et les rendez-vous correspondants s'affichent en dessous de la légende le cas échéant sinon l'affichage « Aucun évènement ce jour » apparaît.


Comment ajouter un évènement?

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un évènement »
2. Choisissez parmi la liste qui s'affiche, la nature de l'évènement (Activité de rééducation, Rdv médical, Rdv Paramédical, Hospitalisation)
3. Pour chaque item, renseignez les précisions attendues (spécialité, motif etc...)
4. Précisez la date, l'heure et le lieu. Vous pouvez ajouter une information complémentaire dans la section note [optionnel]
5. Cliquez sur « Enregistrer »

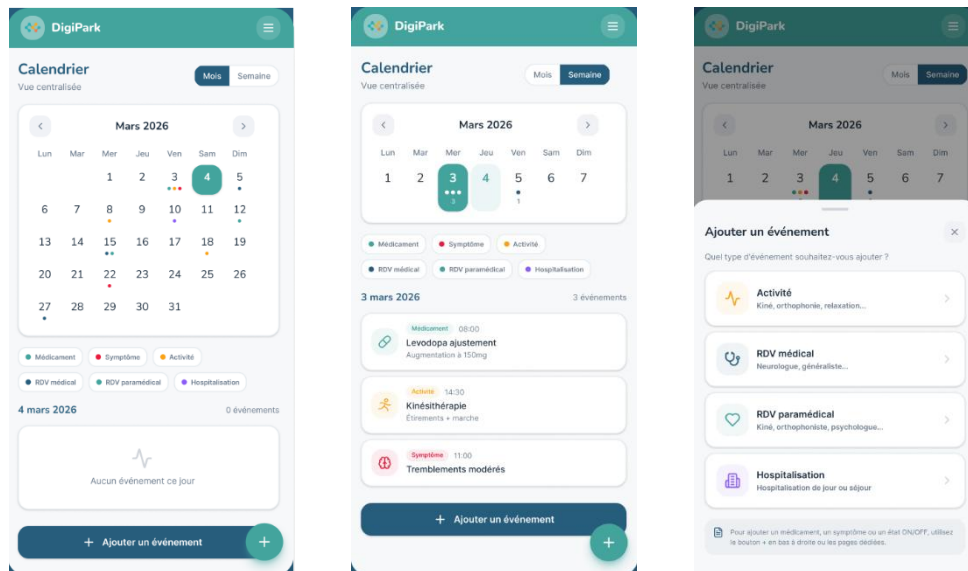

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

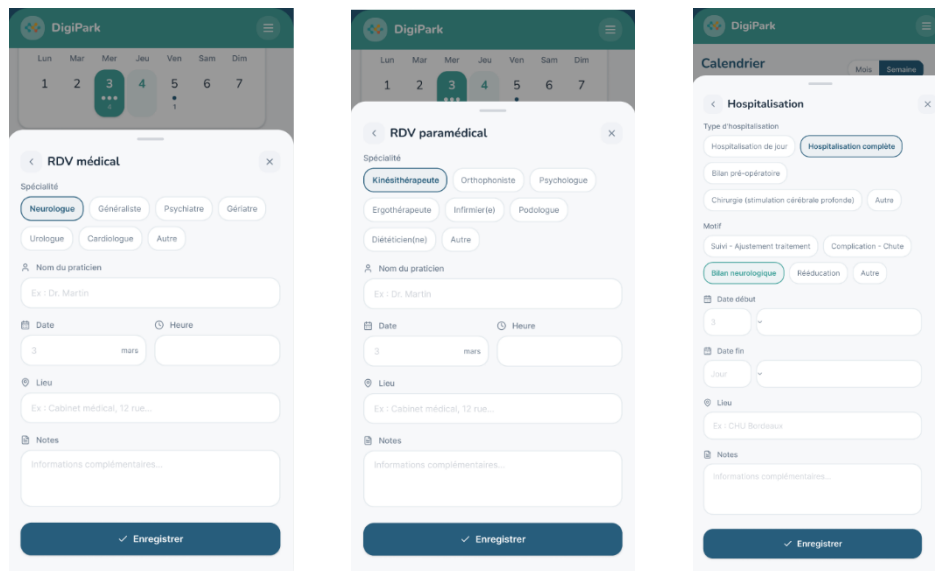

Messagerie

Fonctionnalité « Premium »

Cette fonction permet d'échanger sur un canal sécurisé, avec les professionnels de santé connectés au profil, ayant activé la messagerie, ainsi qu'avec l'équipe DigiPark [pendant les jours et heures ouvrées].

Il est possible d'accéder directement à la messagerie [*fonctionnalité premium*] via le bouton «  » depuis la page d'accueil, ou dans la section messagerie depuis le menu. (menu > messagerie).




Avertissement : La messagerie ne doit pas être utilisée :

- pour les urgences médicales
- pour demander une prise en charge

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

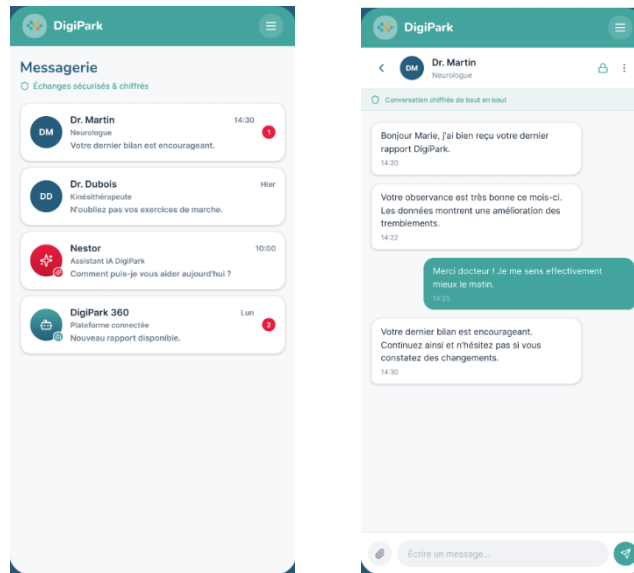

Avertissement : La messagerie vise à fournir des informations pratiques et des orientations générales basées sur les informations que vous fournissez et ne constitue pas, ni ne remplace, une consultation médicale. Nous vous encourageons vivement à consulter votre médecin ou un autre professionnel de santé qualifié pour toute question ou problème de santé spécifique, notamment pour toute évaluation approfondie, surveillance, diagnostic ou traitement.


Profil

Dans le cadre de l'utilisation de l'application DigiPark, la section profil est une étape importante. Nous conseillons vivement d'en remplir les champs dès les débuts avec l'application.

Dans cette section, le patient renseigne les éléments essentiels à la personnalisation de son expérience ; tout d'abord via les informations personnelles, puis par les connexions avec professionnels de santé et aidants qui l'accompagnent dans sa prise en charge.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

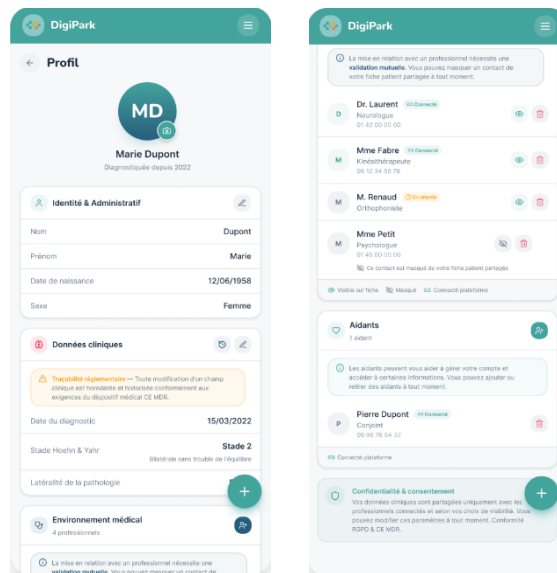

Avertissement : Les données de santé sont chiffrées de bout en bout et stockées conformément au RGPD et à la réglementation sur les dispositifs médicaux numériques (CE MDR 2017/745 (UE) classe I)

Les données cliniques sont partagées uniquement avec les professionnels connectés et selon les choix de l'utilisateur en termes de visibilité. Il est possible de modifier ces paramètres à tout moment (Conformité MDR 2017/745 (UE) CE Classe I RGPD)

Identité & Administratif

Cet encart permet de renseigner les nom et prénom de l'utilisateur, ainsi que sa date de naissance et son sexe.

1. Cliquer sur le bouton «  » en haut à droite de l'encart pour commencer la modification
2. Remplir les champs grisés et sélectionner le sexe
3. Valider et terminer la modification en cliquant sur le bouton «  » en haut à droite de l'encart ou annuler les modifications avec le bouton «  »

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Données Cliniques

Cet encart permet de renseigner les spécificités de votre pathologie ; date de diagnostic, stade Hoehn & Yahr et la latéralité de la pathologie (optionnel).

Nous vous conseillons de renseigner les champs optionnels avec les informations fournies par votre neurologue.

1. Cliquer sur le bouton «  » en haut à droite de l'encart pour commencer la modification
2. Remplir les champs grisés (date du diagnostic, Stade Hoehn & Yahr, Latéralité de la pathologie)
3. Valider et terminer la modification en cliquant sur le bouton «  » en haut à droite de l'encart ou annuler les modifications avec le bouton «  »

 **Avertissement : Traçabilité réglementaire - Toute modification d'un champs clinique est horodaté et historisé conformément aux exigences du dispositif médical CE MDR 2021/745 (UE)**

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Environnement médical

Cet encart permet au patient d'inviter un professionnel de santé à consulter, en lecture seule, certaines informations déclarées par le patient, uniquement comme support de dialogue. Les professionnels de santé pouvant être connectés sont : neurologues, médecin traitant, infirmière, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute, diététicienne, psychologue clinicien.

Avertissement : Les données de santé sont chiffrées de bout en bout et stockées conformément au RGPD et à la réglementation sur les dispositifs médicaux numériques (CE MDR 2017/745 (UE) classe I)

 *Les données cliniques sont partagées uniquement avec les professionnels connectés et selon les choix de l'utilisateur en termes de visibilité. Il est possible de modifier ces paramètres à tout moment (Conformité MDR 2017/745 (UE) CE Classe I RGPD)*

Pour ajouter un professionnel de santé :


1. Cliquer sur le bouton «  » en haut à droite de l'encart pour afficher la page pop-up.
2. Remplir les champs grisés (spécialité, nom du praticien, téléphone (optionnel))
3. Choisir le lien de connexion : soit par email professionnel, soit par identifiant unique DigiPark.
4. Compléter avec l'information correspondante.
5. Cliquer sur « Envoyer la demande »

 *Important : Une demande de connexion est alors envoyée au professionnel de santé. La liaison ne sera effective qu'après validation des deux parties.*

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

 **Avertissement :** Cet accès ne constitue pas un acte de soins et ne doit pas remplacer le suivi clinique du patient. Il ne permet pas d'analyse automatisée, ni de priorisation.

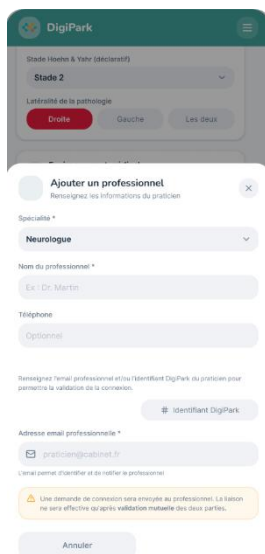


Pour supprimer un professionnel de santé :

1. Cliquer sur le bouton «  » à droite du nom du professionnel de santé.
2. Confirmer la suppression

 **Important :** La suppression d'un professionnel de santé avec lequel une connexion est établie, interrompt cette connexion.

Pour masquer/afficher un professionnel de santé de votre liste :

1. Cliquer sur le bouton «  » pour masquer ou «  » pour le rendre visible.

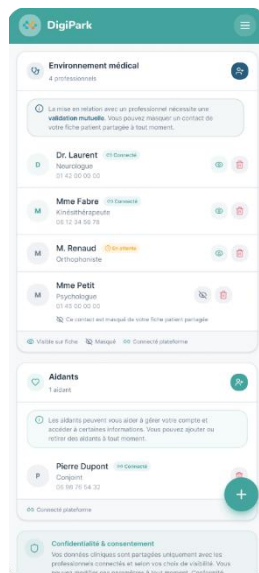

Aidants

Cet encart permet au patient de connecter un ou plusieurs aidants ou accompagnant de son choix (famille, amis etc...).

Les aidants connectés peuvent soutenir le patient dans son utilisation de DigiPark en accédant à un certain nombre de fonctionnalités sur la plateforme DigiPark 360 (édition du rapport) .


La gestion et la responsabilité des aidants repose sur le choix du patient.

Pour ajouter un aidant :

1. Cliquer sur le bouton «  » en haut à droite de l'encart pour afficher la page pop-up.
2. Remplir les champs grisés (nom, prénom, lien, téléphone, email)
3. Cliquer sur « Ajouter »

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

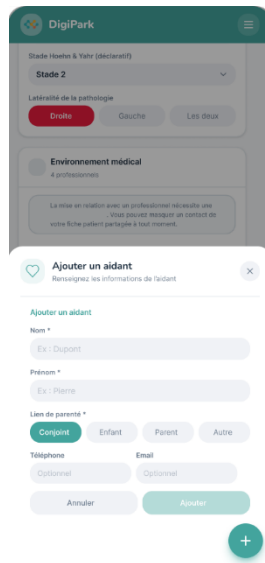

Pour supprimer un aidant :

1. Cliquer sur le bouton «  » à droite du nom de l'aidant.
2. Confirmer la suppression

Paramètres


Cette fonction permet de personnaliser l'expérience sur l'application DigiPark.

Les paramètres ont pour but d'ajuster les autorisations que vous donnez à l'application ainsi que d'avoir une vue sur l'utilisation des données, leur stockage et le coût de l'application en énergie.

Le patient peut agir sur les paramétrages suivants :

Copyright © 2023 DigiPark


Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

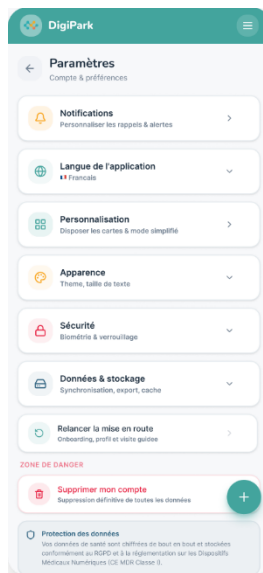

Notifications

Dans la section notifications, le patient peut personnaliser les alertes :

- Activer ou désactiver l'ensemble des notifications
- Types d'alertes : sonnerie, vibreur, silencieux
- Activer ou désactiver les notifications selon les fonctionnalités « Catégories » (pilulier, activités, évaluations, messagerie, rendez-vous...)

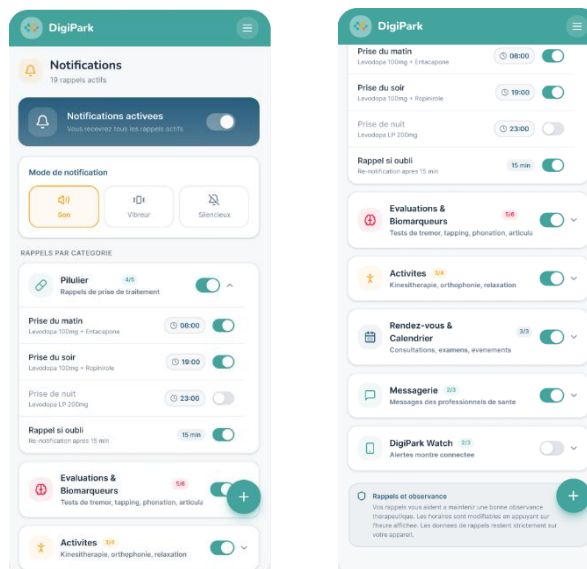


Langues

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Dans la section “Langues de l’application” dans Menu, vous pouvez sélectionner la langue française, anglaise, allemande, espagnole, portugaise, finlandaise, italienne, ukrainienne, arabe standard moderne, néerlandais

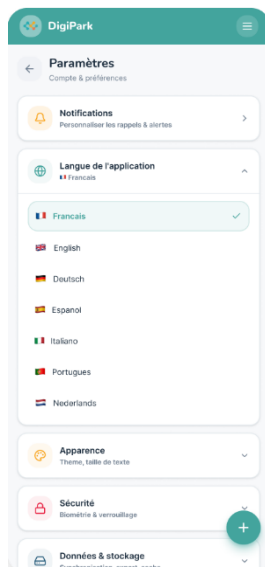

Personnalisation (graphique)

Dans la section « Personnalisation », le patient peut choisir entre 2 modes d’affichage de la page d’accueil (Ce choix est aussi disponible pendant la mise en route).

- **Mode simplifié** : la page d’accueil comportant les 6 encarts essentiels

- EVA de l’humeur
- rappel du prochain traitement (et accès au pilulier)
- bouton d’accès aux évaluations et biomarqueurs
- bouton d’accès aux activités
- rappels du jour (selon les objectifs personnalisés)
- calendrier

- **Mode complet** : Le patient peut ainsi personnaliser sa page d’accueil en sélectionnant parmi tous les widgets (ou encarts) et en les mettant dans l’ordre qui lui convient.

1. Effectuer l’action de personnalisation :


«  » signifie que le widget est visible. Cliquer dessus pour le rendre invisible sur la page d’accueil.

«  » signifie que le widget n’est pas visible. Cliquer dessus pour le rendre visible sur la page d’accueil.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

- « » Effectuer un appui long puis déplacer vers le haut ou le bas pour afficher les widgets dans l'ordre choisit, sur la page d'accueil.
2. Cliquer sur « Enregistrer et revenir à l'accueil » pour confirmer les modifications

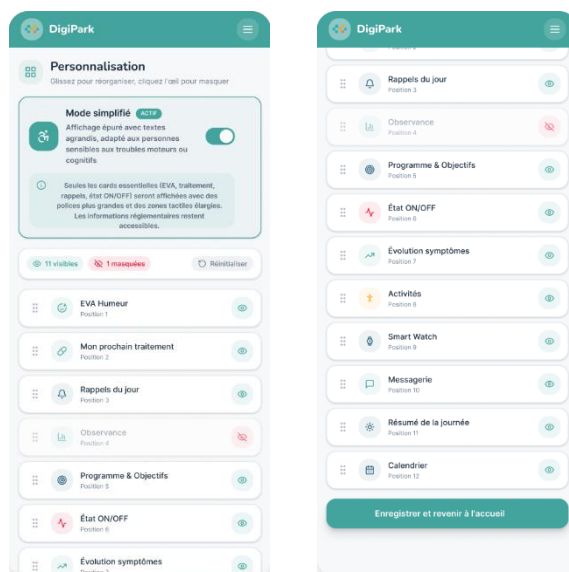

Apparence (affichage)


Dans cet encart, le patient peut modifier le thème d'affichage et la taille du texte.

Le patient peut également activer ou désactiver les animations visuelles (dans le cadre de la maladie de Parkinson, ces animations graphiques peuvent entraîner inconfort et gêner la compréhension et la lecture des textes)

Il peut aussi activer ou désactiver le retour haptique (sensation de vibration lors de l'appui sur les touches tactiles)

Copyright © 2023 DigiPark


Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

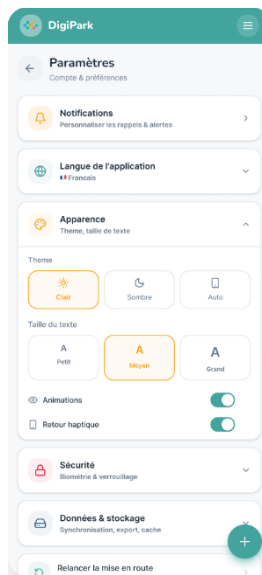

Sécurité

Dans cet encart le patient peut paramétrer les consignes de sécurité pour la connexion :

- Activer ou désactiver l'authentification biométrique (selon la technologie disponible sur son smartphone)
- Activer ou désactiver et paramétrer le verrouillage automatique de l'application.
- Modifier le mot de passe.

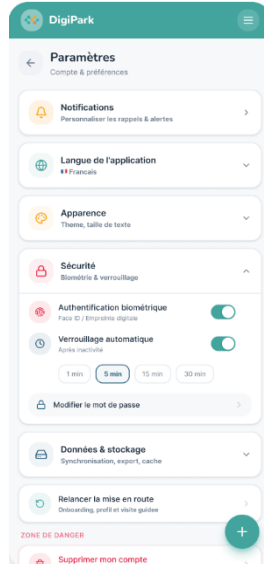


Données et stockage

Dans cet encart le patient peut paramétrer la synchronisation des données

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

- Activer ou désactiver le mode automatique
- Activer ou désactiver le partage de données uniquement en wifi
- Exporter ses données
- vider le cache

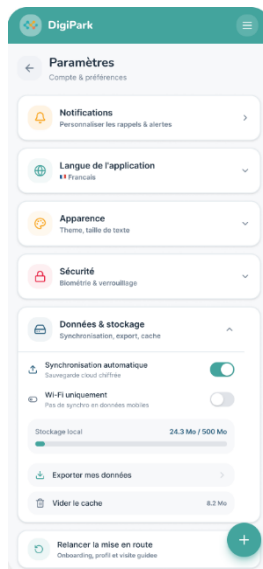

Relancer la mise en route (onboarding)

Dans cette section, le patient peut reprendre et recommencer les étapes de la mise en route (visite guidée).

Supprimer le compte

L'utilisateur peut à tout moment supprimer son compte. Il s'agit d'une action irréversible : une fois supprimée, il n'est pas possible de récupérer le compte.

Lors de la suppression du compte, vos données personnelles sont supprimées ou anonymisées selon les modalités décrites dans la politique de confidentialité.

DigiPark propose les deux options de suppression de compte, au choix :

- Garder les données pseudonymisées qui contribuent aux recherches scientifiques sur la maladie de parkinson
- Supprimer le compte avec l'identifiant, mot de passe et données pseudonymisées.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Codes & Abonnements

DigiPark est une application dont les fonctionnalités font l'objet soit d'un abonnement gratuit [free], soit d'un abonnement payant [premium].

Les fonctionnalités premium sont :


- Messagerie sécurisée
- Messagerie premium avec l'équipe de DigiPark
- Modules d'exercices de kinésithérapie Tabata
- Modules d'exercices d'orthophonie Tabata
- Rapport de synthèse complet [comportant les parties liées aux activités]
- Programmes personnalisés
- Futures fonctionnalités

Selon deux modalités d'abonnement, le patient peut accéder à l'activation de codes ou s'abonner dans la section « Codes & Abonnements ».

Activation d'un code :

L'application DigiPark peut être le support d'études cliniques impliquant des modules spécifiques et dédiés ou être proposée en version premium par un partenaire (Mutuelle, Prestataire de santé à Domicile ou Association) impliquant l'activation d'un Code.

1. Choisir le type de code à renseigner : dans le cadre d'une étude, choisir code étude / dans le cadre d'un code fourni par un partenaire, choisir code Premium.
2. Saisir le code fourni dans la case dédiée
3. Cliquer sur « Activer le code »

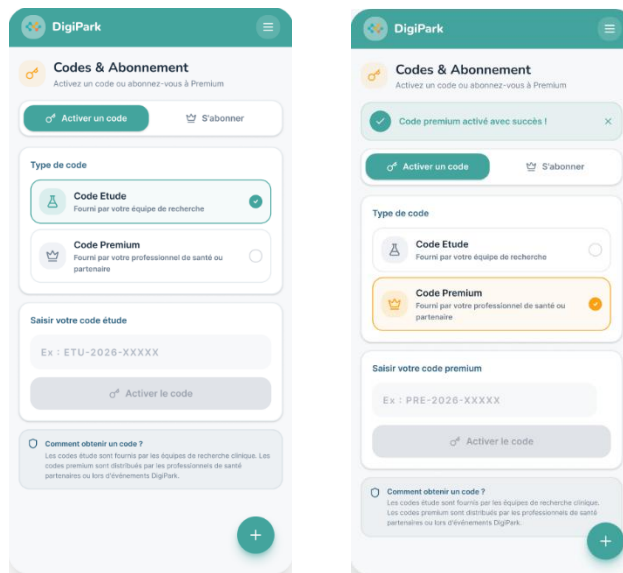


S'abonner :

Le patient peut s'abonner à DigiPark Premium dans cet onglet.

L'ensemble des fonctionnalités incluses dans DigiPark premium sont rappelées dans cet écran, ainsi que les tarifs d'abonnements.

Un tarif avantageux est proposer pour tout abonnement d'un an aux services premiums.

1. Choisir le type d'abonnement : mensuel ou annuel (à l'aide des prix affichés).
2. Cliquer sur « S'abonner »
3. Suivre les instructions pour le paiement sécurisé
4. Revenir sur l'application DigiPark

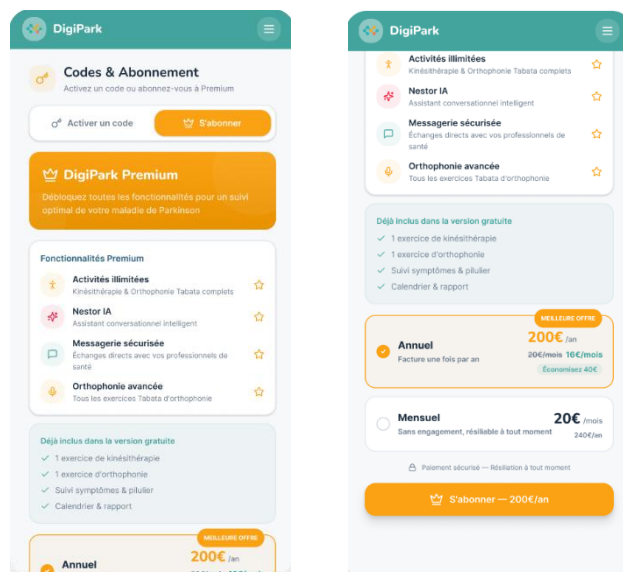

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

DigiPark Watch (Connexions)

La solution DigiPark offre la possibilité d'un suivi des symptômes de manière passive grâce à une montre connectée.

Ainsi, le relevé automatique et le suivi par nos algorithmes vous permet de ne pas changer vos habitudes et d'avoir d'avantages d'informations pour compléter votre suivi.

La connexion à une montre compatible permet, lorsque cette fonctionnalité est activée par le patient, d'importer ou d'afficher certaines informations de suivi.

Depuis le menu général, l'accès à la page « DigiPark Watch » permet de retrouver l'écran permettant la connexion de la montre connectée à l'application.


Cet accès est possible sur la page d'accueil en mode complet.



Important : La liste des smartwatches compatibles est régulièrement mise à jour sur le site www.diampark.io. Merci de vous y référer pour vérifier la compatibilité de votre smartwatches..

Comment ajouter une activité ?

1. Sélectionner la plateforme de votre montre connectée (après avoir vérifié la comptabilité)
2. L'écran de recherche s'affiche
3. Sélectionner votre montre si elle s'affiche à l'écran.
4. Valider la bonne connexion sur vos appareils
5. Commencer à suivre, de manière passive, vos symptômes.

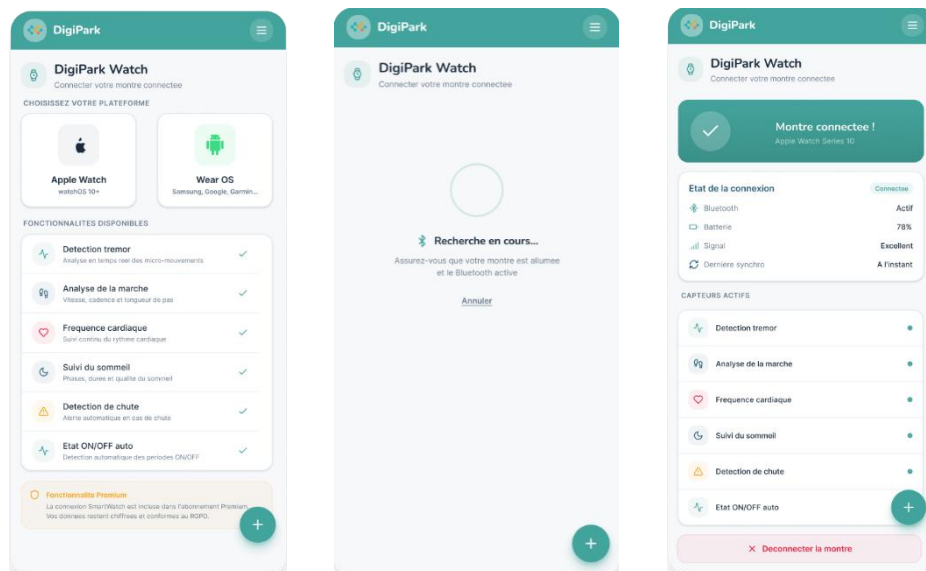

Rapport de synthèse

Le rapport de synthèse est un export de données déclarées et de mesures indicatives disponibles dans DigiPark. Il est destiné à aider le patient à garder une trace de ses informations et à faciliter la lecture de l'évolution de plusieurs paramètres mesurés.

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de sélectionner une période définie et de télécharger un rapport de synthèse au format PDF. Le rapport peut être partagé avec le professionnel de santé qui suit le patient pour l'aider à mieux comprendre l'évolution des symptômes de la maladie de parkinson. En consultant le rapport, l'utilisateur peut retrouver les résultats des évaluations et tests (de tremblement, de phonation et d'articulation).



Avertissement : Il est important de noter que les rapports de synthèse générés par DigiPark ne doivent pas être utilisés pour remplacer les conseils et les recommandations d'un professionnel de santé, mais plutôt comme un outil supplémentaire pour aider les patients à mieux comprendre leur état de santé et à améliorer leur communication avec leurs proches, aidants ou professionnels de santé



Avertissement : L'application est un outil d'accompagnement. Elle ne se substitue en aucun cas à l'avis de votre médecin, ni à votre ordonnance papier qui demeure l'unique document médical de référence. Bien que nous appliquions les normes les plus strictes pour la sécurité et la sauvegarde de vos données de santé, des aléas techniques (ex: coupure réseau, panne de téléphone) peuvent survenir. En cas de doute sur une prise médicamenteuse, référez-vous toujours à votre ordonnance originale.

Si vous constatez un dysfonctionnement de l'application ou une anomalie dans l'affichage de vos données, contactez immédiatement notre support technique à l'adresse support@diampark.io. Votre retour nous aide à garantir la sécurité et l'amélioration

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

continue de l'application.



Règlementaire & Informations

La section Règlementaire & Informations vous rappelle la version de l'application, mais aussi les informations du Fabricant, le marquage CE du dispositif ainsi que l'ensemble des informations réglementaires inhérentes au dispositif médical numérique CE classe I MRD 2017/745 (UE) et RGPD.

Accord partage des données :


Dans le cadre de la protection des données de santé, et conformément au RGPD (Règlement UE 2016/679), à la loi Informatique et Libertés, et aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR), l'utilisateur dispose d'un contrôle total sur ses données de santé.

Les données sont hébergées sur des serveurs certifiés HDS (Hébergeur de Données de Santé) conformément à l'article L.1111-8 du Code de la santé publique.

L'utilisateur peut agir et exprimer ses consentements dans cette section.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

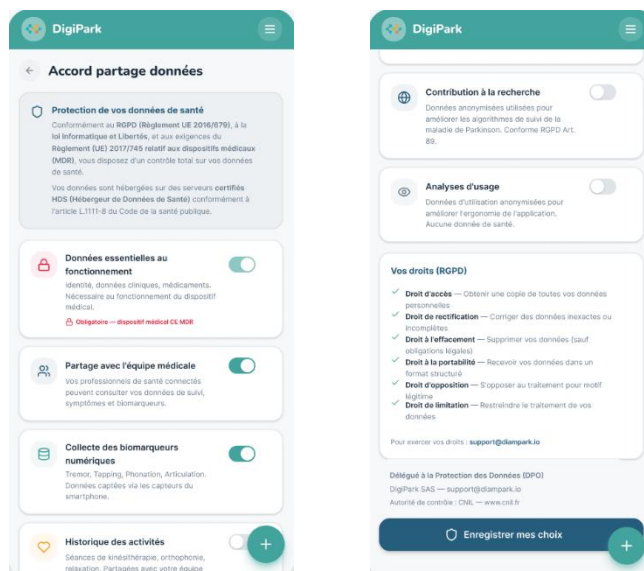

A tout moment, vous pouvez modifier votre consentement de partager vos données de santé dans l'application.

i Important : Pour obtenir un accès aidant sur la plateforme Web, le patient doit explicitement inviter l'aidant depuis les paramètres de son application mobile. L'aidant invité sera alors autorisé à ajouter le patient depuis la plateforme Web et visualiser ses données. L'aidant ne peut voir que les données déclarées par le patient sur son application mobile.

Conditions Générales d'Utilisation

Les CGU précisent les modalités d'accès et d'utilisation de l'application DIGIPARK. L'utilisation de l'application implique l'acceptation de ces CGU, qui resteront valables pendant toute la durée d'utilisation de l'application. Elles sont disponibles depuis l'application et sur notre site web ici : <https://diampark.io/fr/terms>

Conditions Générales de Ventes

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) définissent les modalités et conditions de vente des services proposés par DigiPark via son application mobile disponible sur Google Play et l'App Store. Elles complètent les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) et sont acceptées sans réserve par l'utilisateur lors de l'achat de services. Elle sont disponibles depuis l'application et sur notre site web ici : <https://diampark.io/fr/terms>

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

Politique de Confidentialité

Notre Politique de confidentialité vise à vous informer sur la manière et les raisons pour lesquelles nous traitons vos données personnelles dans le cadre des services que nous vous fournissons. Elle est disponible directement depuis l'application et sur notre site web ici :

<https://diampark.io/confidentiality-policy>

Notice d'Utilisation / Guide Utilisateur

La notice d'information électronique actuelle ainsi que les archives sont disponibles et téléchargeables à tout moment dans l'application « Guide utilisateur » et sur notre site web ici :

<https://diampark.io/e-ifu>

Mentions

DiamPark vous rappelle ici les mentions légales <https://diampark.io/fr/legal> :

Fabriqué par DiamPark, DigiPark est une application de santé numérique réglementée destinée aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et qui porte, au titre de la réglementation relative aux dispositifs médicaux (MDR 2017/745), le marquage CE. DigiPark inclut notamment un rappel de prise des médicaments indiqués dans cette pathologie, un journal des symptômes, et des exercices de rééducation. Lisez attentivement la notice d'utilisation <https://diampark.io/fr/guides> . Demandez conseil à votre professionnel de santé.

Les données de santé partagées dans l'application sont utilisées dans le strict respect de la réglementation applicable. En savoir plus sur l'utilisation de vos données et de vos droits dans notre politique de confidentialité <https://diampark.io/confidentiality-policy>. Les données sont conservées sur un serveur sécurisé HDS. DiamPark s'engage à ne jamais partager vos données avec un tiers.

Accès Plateforme web DigiPark

Accès Aidant [Plateforme web DigiPark]

L'aidant, invité par le patient, peut consulter une version simplifiée des informations déclarées par le patient :

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark

- Symptômes
- Activités
- Agenda
- Traitements déclarés

L'aidant n'a aucun moyen d'ajouter ou modifier les données, ni de déclencher des notifications ou alertes.

Accès Professionnel de santé [Plateforme web DigiPark]

Un paramédical invité dispose des mêmes fonctionnalités que l'aidant :

- consultation en lecture seule des informations déclarées ;
- visualisation des données cliniques brutes issues des modules compagnon ;
- accès aux données partagées (symptômes déclarés, activités, agenda, traitements déclarés) ;
- aucune possibilité de modifier les données ;
- aucune analyse, interprétation, alerte ou recommandation ;
- échanges via une messagerie dédiée aux usages pratiques exclusivement.



Avertissement : Contrairement à l'aidant, le professionnel de santé consulte des données à caractère clinique (scores d'évaluations, observance thérapeutique). Toutefois, la plateforme ne constitue pas un dispositif de télésurveillance médicale d'urgence et ne remplace pas les consultations médicales en présentiel. L'application ne fournit pas de système de tri (priorisation automatisée des patients), ni d'alertes en temps réel en cas de dégradation de l'état de santé.

Version v4.2

Date d'édition	2022-10-31
Date de mise à jour	2026-07-15
Date de publication	2026-07-15
Langue	Version française

Ce manuel d'utilisation est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Copyright © 2023 DigiPark

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DiamPark